



# Manual de operação

Aplicativos e acessórios da Estação de  
Trabalho Certegra®

**Certegra®**

@ Point of Care



# Aplicativos e acessórios da Estação de Trabalho Certegra®

## Manual de operação

Relate qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação a este dispositivo à Bayer ([radiology.bayer.com/contact](http://radiology.bayer.com/contact)) e à autoridade competente local europeia (ou, quando aplicável, à autoridade reguladora apropriada do país em que ocorreu o incidente).

Um glossário de símbolos pode ser encontrado na Seção 2 deste manual.

### Importadoras e distribuidoras

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Paquistão</b>      | Medequips smc (Pvt) Limited<br>30 Sharah-e-Quaid-Azam Lahore<br>Paquistão  |
| <b>Filipinas</b>      | Importado por:<br>Bayer Philippines Inc.,<br>29th Floor Menarco Tower,<br>32nd St. Bonifacio Global City,<br>Fort Bonifacio, Taguig City<br><br>Distribuído por:<br>Zuellig Pharma Corporation<br>KM 14 West Service Road, South Superhighway corner<br>Edison Avenue, Barangay Sun Valley, Paranaque City |
| <b>Arábia Saudita</b> | Scientific & Medical Equipment House (SMEH)<br>Building No. 639<br>King Fahd Highway<br>Al-Mutamarrat<br>Riyadh 12712, Arábia Saudita<br>Tel.: + 966 (0)11 2886 314 e<br>+ 966 (0)11 2885 904<br>Fax: + 966 1 217 0877   |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Introdução.....</b>  | <b>5</b>  |
| 1.1 Indicações de uso/Uso previsto .....  | 5         |
| 1.2 Contraindicações.....   | 5         |
| 1.3 Números de catálogo aplicáveis.....   | 5         |
| 1.4 Estação de Trabalho Certegra®.....  | 5         |
| 1.4.1 Segurança cibernética da estação de trabalho.....   | 6         |
| 1.5 PACS, sistemas de reconhecimento de fala (SR) e RIS.....  | 6         |
| 1.5.1 Imagem de captura secundária .....  | 6         |
| <b>2 Símbolos.....</b>  | <b>9</b>  |
| 2.1 Símbolos gerais.....  | 9         |
| 2.2 Classificações regulatórias .....   | 11        |
| 2.3 Ícones e classificações de RM.....  | 11        |
| <b>3 Advertências, precauções e avisos.....</b>   | <b>13</b> |
| <b>4 Painel de informática .....</b>  | <b>15</b> |
| 4.1 Fluxo de dados.....   | 15        |
| 4.2 Gerenciamento das informações do paciente .....   | 15        |
| 4.2.1 Adicionar ou editar as informações do paciente para a injeção seguinte.....                         | 15        |
| 4.2.2 Limpar todas as informações do paciente para a injeção seguinte.....                                | 18        |
| 4.2.3 Cancelar as alterações feitas nas informações do paciente para a injeção seguinte .....             | 18        |
| 4.3 Gerenciamento das informações do procedimento.....  | 18        |
| 4.3.1 Adicionar ou editar as informações do procedimento para a injeção seguinte.....                     | 18        |
| 4.3.2 Limpar todas as informações do procedimento para a injeção seguinte.....                            | 21        |
| 4.3.3 Cancelar as alterações feitas nas informações do procedimento para a injeção seguinte .....         | 21        |
| 4.3.4 Carregar valores padrão nas informações do procedimento para a injeção seguinte.....                | 21        |
| 4.4 Gerenciamento das informações do líquido .....  | 22        |
| 4.4.1 Adicionar ou editar as informações do líquido para a injeção seguinte (Líquido A ou Líquido B)..... | 22        |
| 4.4.2 Recuperar dados anteriores de contraste (botão Líquido A) .....                                     | 25        |
| 4.4.3 Limpar todas as informações do líquido para a injeção seguinte (Líquido A ou Líquido B).....        | 26        |
| 4.4.4 Cancelar as alterações feitas nas informações do líquido para a injeção seguinte .....              | 26        |
| 4.4.5 Carregar valores padrão nas informações do líquido para a injeção seguinte.....                     | 26        |
| 4.5 Gerenciamento das informações das observações.....  | 27        |
| 4.5.1 Adicionar ou editar as informações das observações para a injeção seguinte .....                    | 27        |
| 4.5.2 Limpar todas as informações de observações para a injeção seguinte .....                            | 28        |
| 4.6 Gerenciamento das informações de eventos.....   | 28        |
| 4.6.1 Visualizar informações de eventos.....  | 29        |
| 4.6.2 Editar observações no painel Eventos.....   | 30        |
| 4.7 Navegação e layout da tela.....   | 30        |
| 4.7.1 Painel de informática .....   | 30        |
| 4.7.2 Guia Paciente .....   | 31        |
| 4.7.3 Guia Procedimento .....   | 32        |
| 4.7.4 Guias Líquido A e Líquido B.....  | 33        |
| 4.7.5 Guia Observações .....  | 34        |
| 4.7.6 Guia Eventos .....  | 35        |
| <b>5 Lista de Trabalho de Modalidade .....</b>  | <b>37</b> |

|   |    |
|---|----|
| 5.1 Selecionar um paciente .....  | 37 |
| 5.1.1 Configurar as informações do paciente e do estudo para uma injeção de contraste .....   | 37 |
| 5.1.2 Inserção de paciente anônimo para uma injeção de contraste .....  | 38 |
| 5.2 Atualizar a lista de trabalho de pacientes do servidor da Lista de Trabalho de Modalidade.....                                    | 39 |
| 5.3 Encontrar um paciente na lista de trabalho de pacientes.....  | 39 |
| 5.3.1 Organizar a lista de trabalho de pacientes (aplicável a todos os cabeçalhos de colunas da lista de trabalho de pacientes) ..... | 40 |
| 5.3.2 Navegar na lista de trabalho de pacientes .....   | 40 |
| 5.3.3 Criar um filtro na lista de trabalho .....  | 40 |
| 5.3.4 Remover um filtro na lista de trabalho .....  | 43 |
| 5.4 Navegação e layout da tela .....  | 44 |
| 5.4.1 Lista de trabalho principal de pacientes .....  | 44 |
| 5.4.2 Tela de entrada detalhada da lista de trabalho.....   | 46 |
| 5.4.3 Tela de criação de filtros.....   | 48 |

## **6 Opções de configuração do painel de informática e da Lista de Trabalho de Modalidade ..... 49**

|  |    |
|--|----|
| 6.1 Visão geral da configuração.....   | 49 |
| 6.2 Configuração de valores padrão do painel de informática .....                            | 51 |
| 6.2.1 Ativar ou desativar a exibição do painel de informática.....                           | 51 |
| 6.2.2 Criar uma configuração padrão para as categorias com valores específicos .....         | 52 |
| 6.2.3 Criar uma configuração padrão para as categorias com listas criadas pelo usuário ..... | 52 |
| 6.3 Configuração de listas criadas pelo usuário nas categorias .....                         | 52 |
| 6.3.1 Reorganizar os valores de uma lista criada pelo usuário .....                          | 52 |
| 6.3.2 Adicionar um valor a uma lista criada pelo usuário.....                                | 53 |
| 6.3.3 Excluir um valor em uma lista criada pelo usuário .....                                | 53 |
| 6.3.4 Ocultar ou mostrar um valor em uma lista criada pelo usuário .....                     | 54 |

## **7 Confirmação dos dados..... 55**

|  |    |
|--|----|
| 7.1 Ativação da confirmação dos dados .....  | 55 |
| 7.2 Tela Confirmação dos dados.....  | 55 |
| 7.3 Atualização das informações do exame usando Confirmação de dados.....                  | 57 |
| 7.3.1 Atualizar dados do paciente .....  | 58 |
| 7.3.2 Recuperar dados de contraste (botão Líquido A) .....                                 | 59 |
| 7.3.3 Atualizar a seleção da Lista de trabalho de pacientes .....                          | 60 |
| 7.3.3.1 Atualizar a seleção de Lista de trabalho de pacientes usando Paciente anônimo..... | 61 |

## **8 Gerenciador Certegra ..... 63**

|   |    |
|---|----|
| 8.1 Login do Gerenciador Certegra.....      | 63 |
| 8.2 Especificações de compatibilidade.....  | 64 |
| 8.3 Funções e acesso .....                  | 64 |
| 8.4 Navegação do Gerenciador Certegra ..... | 65 |
| 8.4.1 Página de ajuda .....                 | 66 |

## **9 Campos obrigatórios ..... 69**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 9.1 Configuração e instalação.....    | 69 |
| 9.1.1 Login .....                     | 69 |
| 9.1.2 Ativar campos obrigatórios..... | 69 |

|   |            |
|---|------------|
| 9.1.3 Configurações de campos obrigatórios.....   | 70         |
| 9.2 Uso de campos obrigatórios.....   | 70         |
| 9.2.1 Campos obrigatórios pré-injeção (painel de informática) .....                       | 70         |
| 9.2.2 Campos obrigatórios pós-injeção (Confirmação de dados).....                         | 72         |
| <b>10 N° de múltiplo acesso .....</b>   | <b>75</b>  |
| 10.1 Licenciamento.....   | 75         |
| 10.2 Ativar .....   | 75         |
| 10.3 Selecione os números de acesso .....   | 75         |
| 10.3.1 Selecione os números de acesso usando a lista de trabalho de pacientes .....       | 75         |
| 10.3.2 Selecione os números de acesso usando o leitor de código de barras acessório ..... | 76         |
| 10.4 Edite ou remova os números de acesso selecionados .....                              | 76         |
| 10.5 Aplique os números de acesso selecionados à próxima injeção do mesmo paciente.....   | 76         |
| <b>11 Data Manager .....</b>  | <b>77</b>  |
| 11.1 Licenciamento.....   | 77         |
| 11.2 Proteções de segurança e conformidade.....   | 77         |
| 11.3 Funções e acesso .....   | 77         |
| 11.4 Login.....   | 78         |
| 11.5 Editar detalhes da injetora.....   | 78         |
| 11.6 Gerenciar injeções.....  | 79         |
| 11.6.1 Associar .....   | 79         |
| 11.6.1.1 Associação de estudos adicionais.....  | 81         |
| 11.6.2 Desassociar .....  | 81         |
| 11.6.3 Editar injeção.....  | 83         |
| 11.6.4 Transferir .....   | 85         |
| 11.6.5 Ocultar/mostrar .....  | 86         |
| 11.7 Exportar .....   | 88         |
| 11.7.1 Exportar resumo da injeção.....  | 88         |
| 11.7.2 Exportar detalhes da injeção.....  | 89         |
| 11.7.3 Exportar uso da seringa.....   | 92         |
| 11.8 Gerenciamento do local.....  | 93         |
| 11.8.1 Backup.....  | 93         |
| 11.8.2 Restaurar .....  | 94         |
| 11.9 Gerenciamento de usuário .....   | 96         |
| 11.9.1 Adicionar usuário .....  | 96         |
| 11.9.2 Minha conta.....   | 97         |
| 11.10 Paciente anônimo .....  | 97         |
| 11.10.1 Ativar e configurar paciente anônimo.....   | 97         |
| 11.11 Solução de problemas do Data Manager.....   | 98         |
| <b>12 Leitor de código de barras acessório e instalação .....</b>                         | <b>101</b> |
| 12.1 Introdução .....   | 101        |
| 12.1.1 Isenção de responsabilidade .....  | 102        |
| 12.2 Montagem do leitor de código de barras acessório.....                                | 102        |
| 12.2.1 Instale o cabo USB .....   | 102        |
| 12.2.2 Montagem do suporte.....   | 103        |
| 12.2.2.1 Montagem do suporte (opcional) .....   | 103        |
| 12.3 Leitura do código de barras de inicialização para uso no sistema.....                | 103        |

|   |     |
|---|-----|
| 12.4 Verifique a instalação e a configuração para uso ..... | 104 |
|---|-----|

## **13 Configuração do código de barras..... 105**

|   |     |
|---|-----|
| 13.1 Faça login no Gerenciador Certegra .....   | 105 |
| 13.2 Ative o código de barras.....  | 105 |
| 13.3 Código de barras de contraste 2D da Bayer .....  | 105 |
| 13.4 Configure códigos de barras e padrões de código de barras para uso do sistema .....        | 106 |
| 13.4.1 Configure o código de barras de contraste .....  | 106 |
| 13.4.1.1 Código de barras de contraste 2D que não é da Bayer .....                              | 107 |
| 13.4.1.2 Adicionar código de barras de contraste .....  | 108 |
| 13.4.1.3 Editar código de barras de contraste.....  | 109 |
| 13.4.1.4 Excluir código de barras de contraste .....  | 109 |
| 13.4.1.5 Contraste pré-configurado .....  | 109 |
| 13.4.2 Configurar o padrão de código de barras (data de validade, lote e paciente/estudo).....  | 109 |
| 13.4.2.1 Adicionar padrão de código de barras.....  | 110 |
| 13.4.2.2 Configurar o padrão de código de barras para ocultar caracteres (prefixo/sufixo) ..... | 111 |
| 13.4.2.3 Editar padrão de código de barras .....  | 112 |
| 13.4.2.4 Excluir padrão de código de barras.....  | 112 |
| 13.4.3 Configure o código de barras de tecnólogo .....  | 113 |
| 13.4.3.1 Adicionar código de barras de tecnólogo .....  | 113 |
| 13.4.3.2 Editar código de barras de tecnólogo.....  | 114 |
| 13.4.3.3 Excluir código de barras de tecnólogo .....  | 114 |
| 13.4.3.4 Importar código de barras de tecnólogo .....   | 114 |
| 13.4.3.5 Procurar tecnólogo .....   | 114 |
| 13.4.3.6 Editar o ID do tecnólogo exibido na Estação de Trabalho Certegra.....                  | 114 |
| 13.4.4 Exportar configurações de código de barras.....  | 114 |
| 13.4.5 Importar configurações de código de barras .....   | 115 |
| 13.5 Solução de problemas e notas de configuração.....  | 116 |

## **14 Informações gerais do código de barras ..... 117**

|  |     |
|--|-----|
| 14.1 Como utilizar o leitor de código de barras acessório.....             | 117 |
| 14.1.1 Varredura portátil .....  | 117 |
| 14.1.2 Varredura automática.....   | 118 |
| 14.1.3 Bipes e indicações de LED .....                                     | 118 |
| 14.1.4 Retorno tátil (vibração).....                                       | 119 |
| 14.2 Digitalize códigos de barra para a Estação de Trabalho Certegra ..... | 119 |
| 14.2.1 Digitalização de códigos de barras pré-injeção .....                | 119 |
| 14.2.2 Leitura de códigos de barras pós-injeção .....                      | 120 |
| 14.3 Solução de problemas do leitor de código de barras acessório.....     | 121 |
| 14.3.1 Redefinir parâmetros padrão (opcional) .....                        | 122 |
| 14.3.2 Remoção do cabo USB se necessário .....                             | 123 |
| 14.4 Manutenção e limpeza.....   | 123 |
| 14.4.1 Geral .....   | 123 |
| 14.4.2 Diariamente.....  | 124 |
| 14.4.3 Mensalmente .....   | 124 |
| 14.5 Treinamento necessário.....   | 124 |
| 14.6 Contraindicações .....  | 124 |
| 14.7 Especificações ambientais.....  | 125 |
| 14.8 Opcionais .....   | 125 |



# 1 Introdução

**NOTA:** As telas do monitor exibidas neste documento e os valores de dados contidos nelas servem apenas para fins ilustrativos e podem ser ligeiramente diferentes do que aparece em cada monitor.

O manual de operação do sistema de injeção de contraste para TC Stellant FLEX da MEDRAD® com Estação de Trabalho Certegra® oferece informações institucionais sobre as aplicações opcionais e os acessórios disponíveis para a Estação de Trabalho Certegra®. Exceto onde haja uma identificação específica, a função de cada aplicativo e acessório aplica-se a todos os sistemas de injetora compatíveis.

**NOTA:** Cada aplicativo e acessório pode ser vendido separadamente ou ativado opcionalmente. Nem todos os aplicativos e acessórios estão disponíveis em todos os mercados. Entre em contato com um representante de produto local da Bayer para obter mais informações ou verifique as instruções operacionais específicas de cada país.

**NOTA:** As imagens de tela abordadas neste manual são apenas para fins ilustrativos. As imagens reais podem variar.

## 1.1 Indicações de uso/Usos previstos

Os aplicativos de informática Certegra oferecem uma plataforma que possibilita o gerenciamento das informações de injeção de contraste de dispositivos Bayer, bem como o intercâmbio de informações com outros dispositivos dentro de um conjunto de imagens. Este sistema foi concebido como uma plataforma escalável que hospeda vários aplicativos licenciados.

## 1.2 Contraindicações

Desconhecidas.

## 1.3 Números de catálogo aplicáveis

Este manual aplica-se aos seguintes números de catálogo:

| Número de catálogo | Descrição do produto  |
|--------------------|---|
| CWKS STARTER PKG   | Painel de informática da Estação de Trabalho Certegra e Lista de Trabalho de Modalidade   |
| MIS PCS 105        | Interface PACS  |
| MIS PCS 300        | Interface Nuance SR   |
| MIS PCS 301        | Interface HL7   |
| BCRMXP             | Leitor de código de barras de identificação automática para sistema de injeção para RM MRXPERION da MEDRAD®   |
| BCRSCWS            | Leitor de código de barras de identificação automática para sistema de injeção de contraste para TC STELLANT da MEDRAD® com Estação de Trabalho Certegra      |
| BCRFLEX            | Leitor de código de barras de identificação automática para sistema de injeção de contraste para TC STELLANT FLEX da MEDRAD® com Estação de Trabalho Certegra |

## 1.4 Estação de Trabalho Certegra®

A Estação de Trabalho Certegra consiste em uma plataforma que possibilita o gerenciamento das informações de injeção de contraste de dispositivos da Bayer, bem como o intercâmbio de informações com outros dispositivos dentro de um conjunto de imagens. O sistema foi projetado como uma plataforma escalável que hospeda vários aplicativos licenciados.

**NOTA:** Especificações de operação, opções, acessórios e disponibilidade de recursos podem variar de acordo com o país. Consulte um representante de produto local da Bayer e as instruções de operação específicas de cada país.

### 1.4.1 Segurança cibernética da estação de trabalho

Quando a Informática está ativada, a unidade de disco rígido da Estação de Trabalho Certegra pode conter informações de saúde protegidas (PHI). A segurança e a privacidade dessas informações devem ser protegidas por todos os indivíduos que interagem com o dispositivo. Antes de descartar a estação de trabalho, essas informações devem ser removidas do disco rígido dentro do sistema. Entre em contato com a Bayer ou com o revendedor autorizado local para obter informações adicionais. Consulte a contracapa deste manual para obter informações para contato.

### 1.5 PACS, sistemas de reconhecimento de fala (SR) e RIS


PACS, sistemas de reconhecimento de fala (SR), RIS e outros recursos licenciáveis enviam informações da injetora para sistemas de informações hospitalares e podem atualizar outros sistemas hospitalares com documentação sobre a injeção quando licenciados e ativados. Essas informações incluem, sem limitação, estudo, dose de injeção, nome do contraste, concentração do contraste e muito mais. Os dados disponíveis para a interface são flexíveis e determinados depois de uma conversa com o cliente.

Esses recursos são ativados por meio de uma configuração técnica realizada pela equipe de manutenção ou alguém designado autorizado. Esses recursos não têm nenhuma interação ou interface de usuário na injetora.

Entre em contato com um representante de serviço para receber a documentação técnica aplicável (declarações de conformidade DICOM [84304905] e HL7 [84304891]) e obter mais informações.

#### 1.5.1 Imagem de captura secundária

A imagem de captura secundária (SCI) mostra informações detalhadas sobre a(s) injeção(ões) realizada(s). Fornece um protocolo de injeções programado e real para contraste e solução salina.

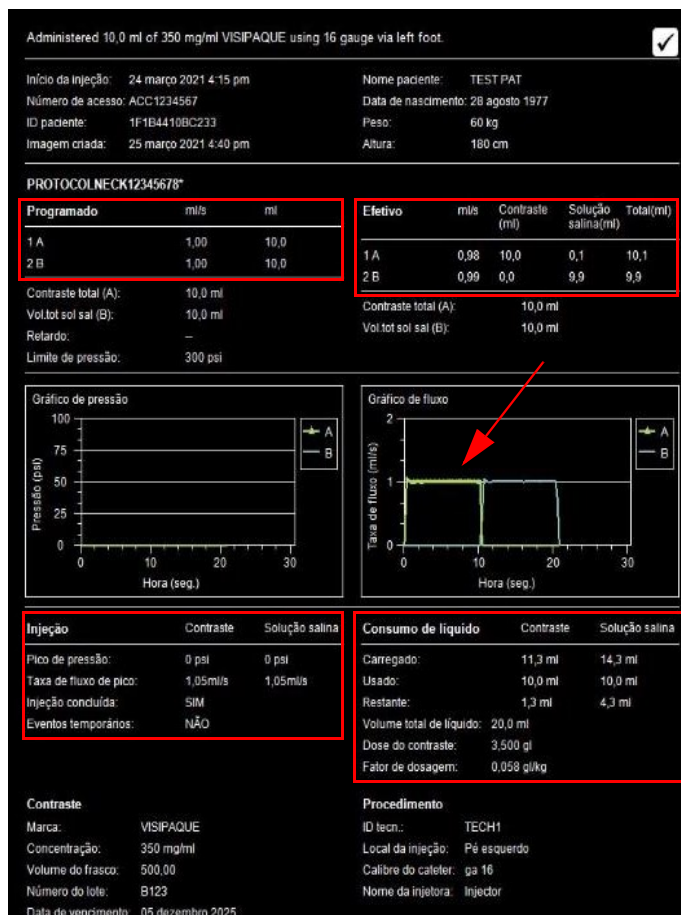

Como mostrado na captura de tela acima, a SCI fornece informações úteis de relatório sobre o exame do paciente.

| Título                      | Descrição   |
|-----------------------------|---|
| Protocolo programado        | Esta seção fornece a injeção da forma como programada na injetora. Se a injeção for realizada da forma normal, também representa as taxas de fluxo e volumes administrados. |
| Injeção real                | Se o limite de pressão no sistema for atingido, esta seção fornece uma taxa de fluxo média durante a injeção para fins de relatório.*                                       |
| Resumo da injeção           | A pressão de pico e a taxa de fluxo são mostradas aqui e são estimativas do sistema.**  |
| Consumo de líquido          | Esta seção fornece informações sobre o meio de contraste e a solução salina carregados na injetora e utilizados no exame.   |
| Gráficos de fluxo e pressão | Os gráficos de taxa de fluxo e de pressão fornecem um resultado das medidas registradas pelo sistema durante a injeção.   |

**NOTA:** \*Se o limite de pressão não for atingido, os valores no campo Injeção real sempre serão ligeiramente menores que os detalhes de injeção programados, pois incluem os aumentos e as diminuições da taxa de fluxo. Isso pode ser observado no gráfico de fluxo. A Taxa de fluxo efetivo exibida na captura secundária (SC) é a taxa de fluxo média em toda a duração da injeção. Em virtude da inclusão dos aumentos e das diminuições no cálculo da média, a taxa obtida sempre será um pouco abaixo da taxa programada. Quanto menor a duração da injeção, maior o impacto dos aumentos e das diminuições.

**NOTA:** \*\*A taxa de fluxo de pico pode parecer ligeiramente maior do que a taxa de fluxo programada devido à aceleração do pistão, e isso não se deve a um pico na taxa de fluxo de líquido.



## 2 Símbolos

### 2.1 Símbolos gerais

|  |  |
|--|--|
|  <b>ADVERTÊNCIA</b> | <p>Indica que a informação é uma advertência. As advertências alertam para circunstâncias que podem provocar ferimento ou morte do paciente ou do operador. Leia e compreenda as advertências antes de operar o sistema.</p>                           |
|  <b>CUIDADO</b>     | <p>Indica que a informação é uma precaução. Chama a atenção para circunstâncias que podem provocar ferimentos leves ou moderados no paciente ou operador. Leia e compreenda os avisos de cuidado antes de operar o sistema.</p>                        |
| <b>AVISO:</b>  | <p>Indica que a informação é um aviso. Os avisos advertem sobre circunstâncias que podem provocar danos ao dispositivo. Leia e compreenda os avisos antes de operar o sistema.</p>   |
| <b>Observação</b>  | <p>Indica que as informações contidas no parágrafo seguinte são informações adicionais importantes ou dicas para corrigir algum erro ou para encontrar informações relacionadas no manual.</p>   |
|                     | <p>Indica a necessidade do usuário de consultar as instruções de uso para obter informações importantes sobre cuidados como advertências e precauções que não podem, por vários motivos, ser apresentados no dispositivo médico propriamente dito.</p> |
|                    | <p>Indica a necessidade do usuário de consultar as instruções de uso.</p>  |
|                   | <p>Indica o fabricante do dispositivo médico.</p>  |
|                   | <p>Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia.</p>  |
| <b>Rx Only</b>   | <p>Cuidado: A legislação federal dos Estados Unidos restringe a venda deste dispositivo por profissionais médicos ou mediante pedido de profissionais médicos.</p>   |
|                   | <p>Indica a entidade que importa o dispositivo médico para o local.</p>  |
|                   | <p>Indica a entidade que distribui o dispositivo médico no local.</p>  |
|                   | <p>Para identificar o país do fabricante dos produtos.</p>   |
|                   | <p>Indica o número de série do fabricante para que um dispositivo médico específico possa ser identificado.</p>  |



Indica o número de catálogo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado.



Indica uma transportadora que contém informações do identificador exclusivo do dispositivo.



Indica que o item é um dispositivo médico.



Indica a data em que o dispositivo médico foi fabricado.



Indica os limites de temperatura aos quais o dispositivo médico pode ser exposto com segurança.



Indica a faixa de umidade à qual o dispositivo médico pode ser exposto com segurança.



Indica a faixa de pressão atmosférica à qual o dispositivo médico pode ser exposto com segurança.



Para indicar a posição vertical correta da embalagem de transporte.



Indica um dispositivo médico que precisa de proteção contra umidade.



Indica um dispositivo médico que pode ser quebrado ou danificado se não for manuseado com cuidado.



Coleta seletiva para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Para obter mais informações, consulte o site [www.weee.bayer.com](http://www.weee.bayer.com)

## 2.2 Classificações regulatórias



Indica uma marcação pela qual o fabricante mostra que o dispositivo está em conformidade com os requisitos aplicáveis estipulados no Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de abril de 2017 e com outras legislações de harmonização aplicáveis da União estabeleça sua afixação (para dispositivos médicos de Classe I).



Testado para manter a conformidade com os padrões da FCC.



Indica que este produto contém certas substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos que podem ser utilizados com segurança durante o período de proteção ambiental (indicado pelo número no meio do símbolo). Este produto deve ser reciclado imediatamente após o término do período de proteção ambiental. (Período de proteção ambiental)



Registro de certificação do produto (RPC) em Taiwan BSMI (Bureau of Standards, Metrology, and Inspection)



Comercialização de conformidade regulamentar (RCM) da Australian Communications and Media Authority (ACMA)



Marca KC (certificação da Coreia)

## 2.3 Ícones e classificações de RM



Um item que representa riscos inaceitáveis para o paciente, equipe médica ou outras pessoas no ambiente de RM.





### **3 Advertências, precauções e avisos**

Para ler as advertências e precauções relacionadas à injetora, consulte o manual de operação da injetora associada.



## 4 Painel de informática

O painel de informática está localizado no lado esquerdo da interface do usuário da Estação de Trabalho Certegra e possibilita a interação com os aplicativos licenciados e o gerenciamento de informática. O painel de informática gerencia informações importantes para o procedimento de injeção. Os principais grupos de informações gerenciados pelo painel de informática são as informações do paciente, informações do procedimento, informações do líquido, observações do procedimento e informações de eventos.

### 4.1 Fluxo de dados

As etapas a seguir descrevem o fluxo de dados de um procedimento típico de injeção de contraste quando o painel de informática for usado em conjunto com a Estação de Trabalho Certegra:

1. Prepare o procedimento de obtenção de imagens na modalidade e prepare a injetora.
2. Insira as informações nas guias **Paciente** e **Procedimento**.
3. Insira as informações nas guias **Líquido A** e **Líquido B**.
4. Insira as informações na guia **Observações**.
5. Inicie a injeção e o imageamento.
6. A Estação de Trabalho Certegra captura os dados do sistema da injetora durante a injeção.
7. Quando a injeção é concluída, as informações da injeção são associadas automaticamente às informações do paciente, procedimento, líquido e observações e armazenadas no banco de dados do Certegra.

### 4.2 Gerenciamento das informações do paciente

#### 4.2.1 Adicionar ou editar as informações do paciente para a injeção seguinte

Antes da injeção, adicione as informações do paciente ao registro de injeção por meio da guia Paciente no painel de informática.

1. Selecione a área Paciente no painel de informática (Figura 4 - 1: Painel de informática - Informações do paciente).

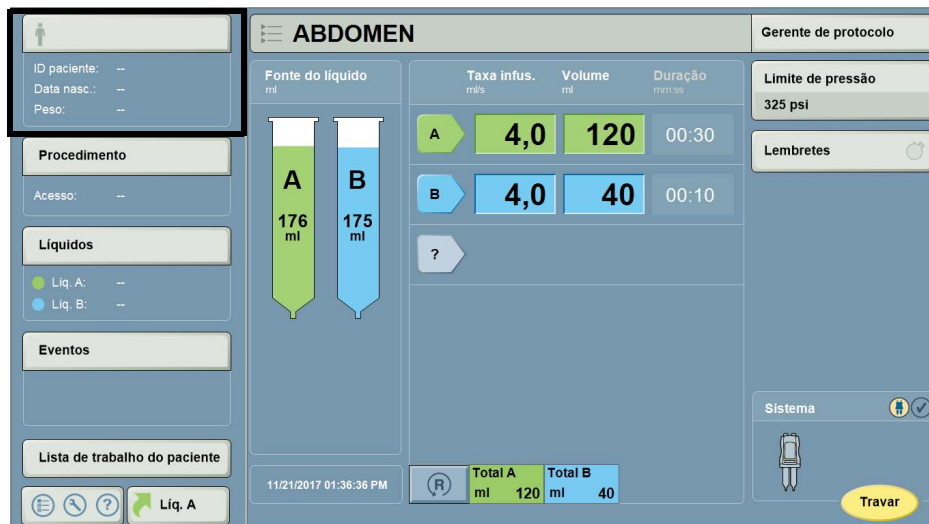


Figura 4 - 1: Painel de informática - Informações do paciente

2. A guia Paciente é exibida. Digite as informações em todos os campos relevantes:

a. ID do paciente, Sobrenome, Nome

- i. Selecione o campo ID, Sobrenome ou Nome (Figura 4 - 2: Guia Paciente - Inserção de ID do paciente, Sobrenome, Nome).

Figura 4 - 2: Guia Paciente - Inserção de ID do paciente, Sobrenome, Nome

- ii. Digite os dados com o teclado alfanumérico.
- iii. Pressione **Enter** para aceitar as alterações feitas no ID, sobrenome ou nome de um paciente ou pressione **Cancelar** para ignorar as alterações feitas.

b. Data de nascimento do paciente

- i. Selecione o campo Data de nascimento (Figura 4 - 3: Guia Paciente - Seleção de data).

Figura 4 - 3: Guia Paciente - Seleção de data

- ii. Acima do teclado numérico, selecione os campos Mês, Dia ou Ano.
- iii. Insira os dados de mês, dia ou ano com o teclado numérico.
- iv. Pressione **Enter** para aceitar as alterações feitas na data de nascimento de um paciente ou pressione **Cancelar** para ignorar as alterações feitas.

c. **Peso e altura do paciente**

- i. Selecione o campo **Peso** ou **Altura** (Figura 4 - 4: Guia Paciente - Seleção de peso).

Figura 4 - 4: Guia Paciente - Seleção de peso

- ii. Digite os dados apropriados com o teclado numérico.  
 iii. Pressione **Enter** para aceitar as alterações feitas no peso ou altura de um paciente ou pressione **Cancelar** para ignorar as alterações feitas.

d. **Sexo do paciente**

- i. Selecione o campo **Sexo** (Figura 4 - 5: Guia Paciente - Seleção de sexo).

Figura 4 - 5: Guia Paciente - Seleção de sexo

- ii. Selecione o valor na lista **Sexo**. Quando o valor é selecionado, o campo **Sexo** é atualizado e a lista desaparece.  
 iii. Para apagar o sexo atual, pressione **Limpar**. Para ignorar as alterações feitas no sexo de um paciente, pressione **Cancelar**.
3. Pressione **OK** para aceitar todas as alterações feitas nas informações do paciente ou pressione **Cancelar** para ignorar todas as alterações feitas nas informações do paciente.

## 4.2.2 Limpar todas as informações do paciente para a injeção seguinte

Antes da injeção, apague as informações do paciente do registro de injeção por meio da guia Paciente no painel de informática.

1. Selecione a área de informações do paciente no painel de informática.
2. Pressione **Limpar tudo**.
3. Uma mensagem é exibida. Pressione **Sim** para confirmar ou pressione **Não** para voltar para a guia Paciente.
4. Pressione **OK** para salvar as alterações.

## 4.2.3 Cancelar as alterações feitas nas informações do paciente para a injeção seguinte

Na guia Informações do paciente, cancele as alterações feitas nas informações do paciente para a injeção seguinte selecionando **Cancelar**. As alterações feitas são canceladas e o sistema retorna para a tela inicial.

## 4.3 Gerenciamento das informações do procedimento

### 4.3.1 Adicionar ou editar as informações do procedimento para a injeção seguinte

Antes da injeção, adicione as informações do procedimento ao registro de injeção por meio da guia Procedimento no painel de informática.

1. Selecione a área Procedimento no painel de informática (Figura 4 - 6: Painel de informática - Procedimento).



Figura 4 - 6: Painel de informática - Procedimento

2. A guia Procedimento é exibida. Digite as informações em todos os campos relevantes:

a. ID do tecnólogo

i. Selecione o campo ID do tecnólogo (Figura 4 - 7: Guia Procedimento - Inserção do ID do tecnólogo).

A imagem mostra a interface de usuário 'Informações' com a aba 'Procedimento' selecionada. O campo 'ID do tecnólogo' contém o valor 'K0718C' e está circulado em uma caixa preta. Outros campos incluem 'Local da injeção' (contendo '--'), 'Número de acesso' (contendo 'ACC1234567'), 'Calibre do cateter' (contendo '--') com um botão 'Carregar valores padrão', 'ID do estudo' (contendo '44711855'), 'Descrição do estudo' (contendo '7FG4DWO60F4625H8D9O3174S7832RC') e 'Chave de integração do RIS' (contendo '--'). Botões 'OK' e 'Cancelar' estão visíveis na parte inferior direita.

Figura 4 - 7: Guia Procedimento - Inserção do ID do tecnólogo

ii. Digite o ID do tecnólogo com o teclado alfanumérico.

iii. Pressione **Enter** para salvar as alterações ou **Cancelar** para ignorá-las.

b. Local da injeção

i. Selecione o campo Local da injeção (Figura 4 - 8: Guia Procedimento - Seleção do local da injeção).

A imagem mostra a mesma interface de usuário 'Informações' com a aba 'Procedimento' selecionada. O campo 'Local da injeção' está circulado em uma caixa preta e contém o valor '--'. Os outros campos e botões são idênticos aos mostrados na Figura 4-7.

Figura 4 - 8: Guia Procedimento - Seleção do local da injeção

ii. Selecione o valor na lista Local da injeção. Quando o valor é selecionado, o campo Local da injeção é atualizado e a lista desaparece.

**NOTA:** Se o local da injeção correto não for mostrado, mas aparecerem setas, pressione a seta **Para cima** ou **Para baixo** para mostrar entradas adicionais. Se o local da injeção não estiver na lista, consulte 6.3.4 - Ocultar ou mostrar um valor em uma lista criada pelo usuário para exibir entradas adicionais na lista Local da injeção.

iii. Pressione **Limpar** para remover o valor existente ou pressione **Cancelar** para ignorar as alterações.

c. Número de acesso e descrição do estudo

- i. Selecione o campo Número de acesso ou Descrição do estudo (Figura 4 - 9: Guia Procedimento - Inserção do número de acesso/descrição do estudo).

Figura 4 - 9: Guia Procedimento - Inserção do número de acesso/descrição do estudo

- ii. Digite os dados com o teclado alfanumérico.
- iii. Pressione **Enter** para salvar as alterações feitas no número de acesso ou na descrição do estudo ou pressione **Cancelar** para ignorar as alterações feitas.

d. Calibre do cateter

- i. Selecione o campo Calibre do cateter (Figura 4 - 10: Guia Procedimento - Seleção do calibre do cateter).

Figura 4 - 10: Guia Procedimento - Seleção do calibre do cateter

- ii. Selecione o valor na lista Calibre do cateter. Quando o valor é selecionado, o campo Calibre do cateter é atualizado e a lista desaparece.

**NOTA:** Se o calibre do cateter correto não aparecer na lista Calibre do cateter, mas aparecerem setas, pressione a seta **Para cima** ou **Para baixo** para mostrar entradas adicionais. Se o calibre do cateter não estiver na lista, consulte 6.3.4 - Ocultar ou mostrar um valor em uma lista criada pelo usuário para exibir entradas adicionais na lista Calibre do cateter.



- iii. Pressione **Limpar** para remover o valor existente ou pressione **Cancelar** para ignorar as alterações.
- 3. Pressione **OK** para salvar todas as alterações feitas nas informações do procedimento ou pressione **Cancelar** para ignorar todas as alterações feitas.

### 4.3.2 Limpar todas as informações do procedimento para a injeção seguinte

Antes da injeção, apague as informações do procedimento do registro de injeção por meio da guia Procedimento no painel de informática.

1. Selecione a área Procedimento no painel de informática.
2. Pressione **Limpar tudo**.
3. Uma mensagem é exibida. Pressione **Sim** para confirmar ou pressione **Não** para voltar para a guia Procedimento.
4. Pressione **OK** para salvar as alterações.

### 4.3.3 Cancelar as alterações feitas nas informações do procedimento para a injeção seguinte

Na guia Procedimento, cancele as alterações feitas nas informações do procedimento para a injeção seguinte selecionando **Cancelar**. As alterações feitas são canceladas e o sistema retorna para a tela inicial.

### 4.3.4 Carregar valores padrão nas informações do procedimento para a injeção seguinte

**NOTA:** Para configurar informações de procedimento padrão, consulte 6.2 - Configuração de valores padrão do painel de informática.

Antes da injeção, carregue as informações de procedimento padrão em um registro de injeção por meio da guia Procedimento no painel de informática.

1. Selecione a área Procedimento no painel de informática.
2. A guia Procedimento é exibida. Pressione **Carregar valores padrão** (Figura 4 - 11: Guia Procedimento - Carregar valores padrão).

| Informações  |  |
|--|--|
| Informações do procedimento atual  |  |
| Paciente   | Procedimento   |
| <p><b>ID do tecnólogo</b></p> <p>K0718C</p> <p><b>Número de acesso</b></p> <p>ACC1234567</p> <p><b>ID do estudo</b></p> <p>44711855</p> <p><b>Descrição do estudo</b></p> <p>7FG4DWO60F4625H8D9O3174S7832RC</p> <p><b>Chave de integração do RIS</b></p> <p>--</p> | <p><b>Líquido A</b></p> <p><b>Líquido B</b></p> <p><b>Observações</b></p> <p><b>Local da injeção</b></p> <p>--</p> <p><b>Calibre do cateter</b></p> <p>--</p> <p>Carregar valores padrão</p> <p>OK</p> <p>Cancelar</p> |

Figura 4 - 11: Guia Procedimento - Carregar valores padrão

3. Pressione **OK** para salvar as alterações.

Figura 4 - 12: Guia Procedimento – Chave de integração do RIS

## 4.4 Gerenciamento das informações do líquido

### 4.4.1 Adicionar ou editar as informações do líquido para a injeção seguinte (Líquido A ou Líquido B)

Antes da injeção, adicione as informações do paciente a um registro de injeção por meio da área Líquidos no painel de informática.

1. Selecione a área Líquido no painel de informática (Figura 4 - 13: Painel de informática - Líquidos).

Figura 4 - 13: Painel de informática - Líquidos

2. A guia Líquido A é exibida (Figura 4 - 14: Guia Líquido A).

**NOTA:** Selecione Líquido B para abrir a guia correspondente.

Figura 4 - 14: Guia Líquido A

3. Digite as informações em todos os campos relevantes:

a. **Tipo da fonte: Líquido A**

- i. Selecione o campo Tipo da fonte (Figura 4 - 15: Seleção da fonte do líquido A).

Figura 4 - 15: Seleção da fonte do líquido A


- ii. Selecione o valor na lista Fonte do líquido. Quando o valor é selecionado, o campo Fonte do líquido é atualizado e a lista desaparece.

**NOTA:** Se a fonte do líquido correta não aparecer na lista Fonte do líquido, mas aparecerem setas, pressione a seta **Para cima** ou **Para baixo** para mostrar entradas adicionais.

- iii. Pressione **Limpar** para remover o valor existente ou pressione **Cancelar** para ignorar as alterações.

b. Tipo da fonte: Líquido B

- i. Selecione o campo Tipo da fonte (Figura 4 - 16: Seleção da fonte do líquido B).

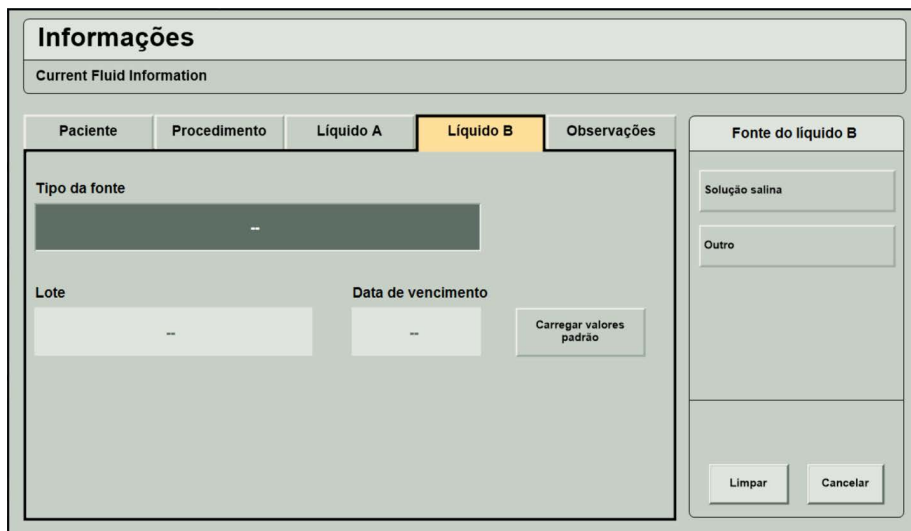


The screenshot shows a software interface titled 'Informações' with a sub-header 'Current Fluid Information'. It features a tabbed menu with 'Paciente', 'Procedimento', 'Líquido A', 'Líquido B' (selected), and 'Observações'. The main area contains a 'Tipo da fonte' dropdown menu (highlighted with a black box), 'Lote' and 'Data de vencimento' input fields, and a 'Carregar valores padrão' button. On the right, a 'Fonte do líquido B' section has 'Solução salina' and 'Outro' options. At the bottom right are 'Limpar' and 'Cancelar' buttons.

Figura 4 - 16: Seleção da fonte do líquido B

- ii. Selecione **Solução salina** ou **Outra** como fonte do líquido. Quando o valor é selecionado, o campo Tipo de fonte é atualizado e a lista desaparece.  
iii. Pressione **Limpar** para remover o valor existente ou pressione **Cancelar** para ignorar as alterações.

c. Lote

- i. Selecione o campo Lote (Figura 4 - 17: Seleção de lote).

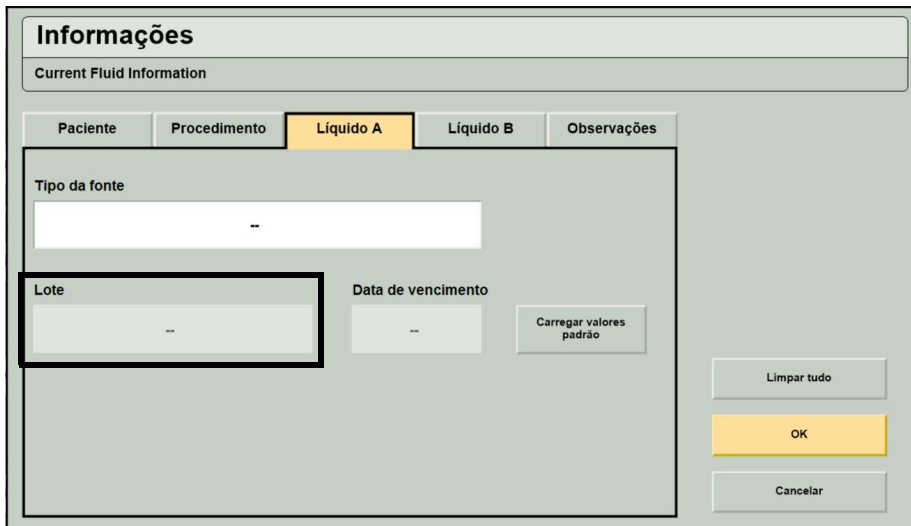

The screenshot shows the same software interface as Figure 4-16, but with the 'Líquido A' tab selected. The 'Lote' input field is highlighted with a black box. The 'Tipo da fonte' field is now empty. The 'Fonte do líquido B' section on the right now contains 'Limpar tudo', 'OK', and 'Cancelar' buttons. The 'Carregar valores padrão' button is still present.

Figura 4 - 17: Seleção de lote

- ii. Digite os dados com o teclado alfanumérico.  
iii. Pressione **Enter** para aceitar as alterações feitas nas informações do lote ou pressione **Cancelar** para ignorar as alterações feitas.

## d. Data de vencimento

- i. Selecione o campo Data de vencimento (Figura 4 - 18: Seleção de data).

Figura 4 - 18: Seleção de data

- ii. Acima do teclado numérico, selecione os campos Mês, Dia ou Ano.
  - iii. Insira o mês, dia ou ano com o teclado numérico.
  - iv. Selecione **Digitar** para aceitar as alterações feitas na data de validade ou **Cancelar** para ignorar as alterações feitas.
4. Pressione **OK** para aceitar as alterações feitas nas informações do líquido ou pressione **Cancelar** para ignorar as alterações feitas.

#### 4.4.2 Recuperar dados anteriores de contraste (botão Líquido A)

Use o botão Líquido A para recuperar dados de contraste anteriores para a próxima injeção. O botão Líquido A armazena os últimos dados de contraste lidos ou inseridos manualmente.

1. Na tela principal da Estação de Trabalho Certegra, selecione **Líquido A** (Figura 4 - 19: Botão Líquido A).

Figura 4 - 19: Botão Líquido A

2. A janela Líquido A exibe os últimos dados de contraste lidos ou inseridos manualmente (Figura 4 - 20: Janela Líquido A na tela inicial).



Figura 4 - 20: Janela Líquido A na tela inicial

3. Selecione **OK** para confirmar a seleção das informações de contraste exibidas ou selecione **Cancelar** para cancelar a operação e voltar à tela inicial da Estação de Trabalho Certegra.

#### 4.4.3 Limpar todas as informações do líquido para a injeção seguinte (Líquido A ou Líquido B)

Antes da injeção, apague as informações do líquido de um registro de injeção por meio da guia Líquido no painel de informática.

1. Selecione a área Líquidos no painel de informática.
2. A guia Líquido A é exibida.

**NOTA:** Selecione Líquido B para abrir a guia correspondente.

3. Pressione **Limpar tudo**.
4. Uma mensagem é exibida. Pressione **Sim** para confirmar ou pressione **Não** para voltar para a guia Líquidos.
5. Pressione **OK** para salvar as alterações.

#### 4.4.4 Cancelar as alterações feitas nas informações do líquido para a injeção seguinte

Na guia Líquido A ou Líquido B, cancele as alterações feitas nas informações do líquido para a injeção seguinte pressionando **Cancelar**. As alterações feitas são canceladas e o sistema retorna para a tela inicial.

#### 4.4.5 Carregar valores padrão nas informações do líquido para a injeção seguinte

**NOTA:** Para configurar informações do líquido, consulte 6.2 - Configuração de valores padrão do painel de informática.

Antes da injeção, carregue as informações de líquido padrão em um registro de injeção por meio da guia Líquidos no painel de informática.

1. Selecione a área Líquidos no painel de informática.
2. A guia Líquido A é exibida.

**NOTA:** Selecione Líquido B para abrir a guia correspondente.

3. Pressione **Carregar valores padrão** (Figura 4 - 21: Guia Líquido A - Carregar valores padrão).

**Informações**  
Current Fluid Information

Paciente    Procedimento    **Líquido A**    Líquido B    Observações

Tipo da fonte  
--

Lote    Data de vencimento

--    --

Carregar valores padrão

Limpar tudo

OK

Cancelar

Figura 4 - 21: Guia Líquido A - Carregar valores padrão

4. Pressione **OK** para salvar as alterações.

## 4.5 Gerenciamento das informações das observações

### 4.5.1 Adicionar ou editar as informações das observações para a injeção seguinte

Antes da injeção, adicione as informações de observações ao registro de injeção por meio da guia Observações no painel de informática.

1. Selecione a área Paciente, Procedimento, Líquidos ou Eventos no painel de informática (Figura 4 - 22: Painel de informática - Paciente, Procedimento, Líquidos e Eventos).

**ABDOMEN**    Gerente de protocolo

Fonte do líquido    Taxa infus.    Volume    Duração

ml    ml/s    ml    mm:ss

A    4,0    120    00:30

B    4,0    40    00:10

?    ?    ?    ?

176 ml    175 ml

Total A    Total B

ml    ml

120    40

11/21/2017 01:36:36 PM

Sistema

Travar

Figura 4 - 22: Painel de informática - Paciente, Procedimento, Líquidos e Eventos

2. A janela Informações do paciente é exibida. Selecione a guia Observações (Figura 4 - 23: Guia Observações).

**NOTA:** Se a área Eventos do painel de informática tiver sido selecionada, pressione **Editar observações**. Um teclado é exibido automaticamente. Continue na etapa 4.

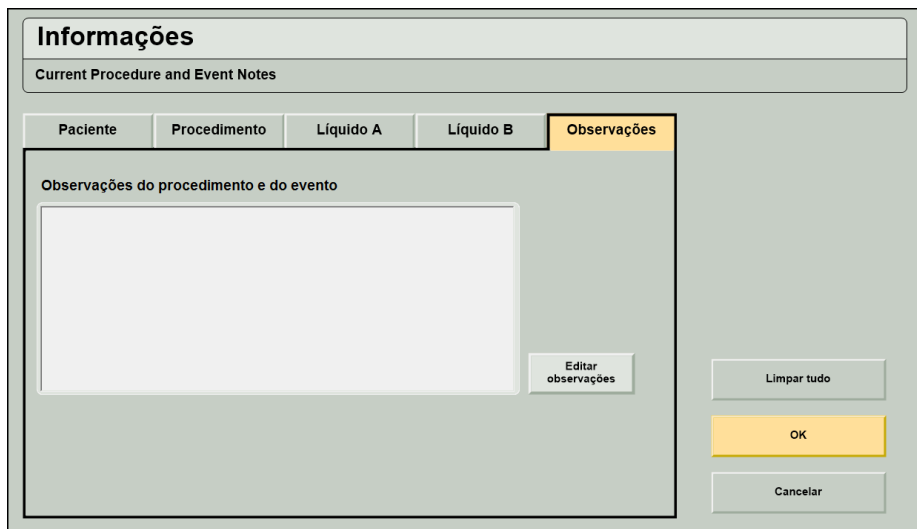


Figura 4 - 23: Guia Observações

3. Pressione **Editar observações**.
4. Digite as informações das observações com o teclado exibido.
5. Pressione **OK** para salvar as alterações feitas nas observações ou pressione **Cancelar** para ignorar a alteração feita.
6. A caixa Observações de procedimento e eventos exibe as alterações feitas.
7. Para salvar todas as alterações feitas, pressione **OK**. Para cancelar todas as alterações feitas, pressione **Cancelar**.

#### 4.5.2 Limpar todas as informações de observações para a injeção seguinte

Antes da injeção, apague as informações de observações de um registro de injeção por meio da guia Observações no painel de informática.

1. Selecione a área de informações do paciente, procedimento, líquido ou eventos no painel de informática.  
**NOTA:** As observações podem ser editadas na guia Eventos, mas não podem ser apagadas. Se a área Eventos do painel de informática tiver sido selecionada, pressione **Cancelar** para voltar para a tela inicial da Estação de Trabalho Certegra.
2. Selecione a guia Observações.
3. Pressione **Limpar tudo**.
4. Uma mensagem é exibida. Pressione **Sim** para confirmar ou pressione **Não** para voltar para a guia Observações.
5. Pressione **OK** para salvar as alterações.

#### 4.6 Gerenciamento das informações de eventos

As ocorrências de eventos gerados pelo sistema (se houver) são exibidas na área Eventos do painel de informática.

**NOTA:** As mensagens de eventos gerados pelo sistema que são exibidas na área Eventos não são capturadas como parte do registro de injeção. Essas informações não serão transferidas para o PACS ou RIS.



### 4.6.1 Visualizar informações de eventos

1. Selecione a área Eventos no painel de informática (Figura 4 - 24: Guia Eventos).

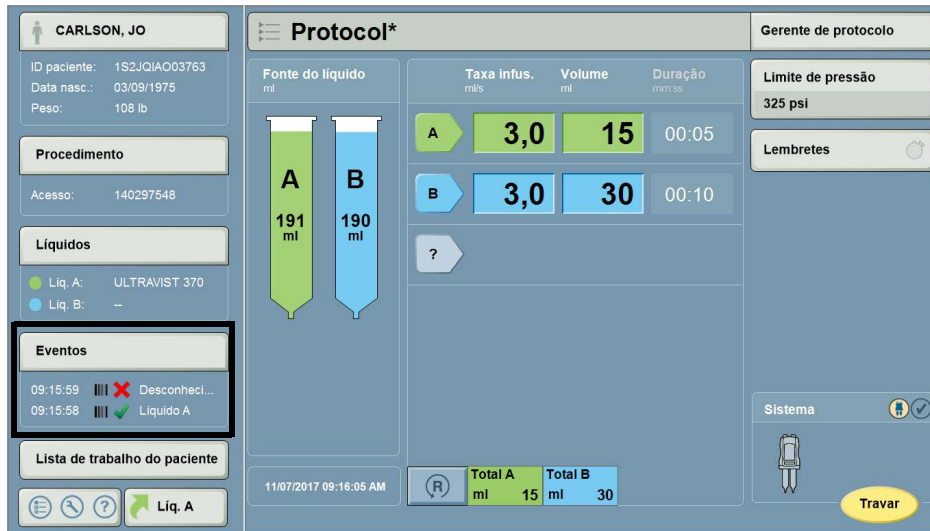


Figura 4 - 24: Guia Eventos

2. A guia Eventos é exibida (Figura 4 - 25: Detalhes da guia Eventos).

**NOTA:** Uma marca de verificação verde representa uma leitura de código de barras bem-sucedida. Uma leitura bem-sucedida é exibida com o nome do campo preenchido e um carimbo de data e hora da leitura.

**NOTA:** Um X vermelho representa uma mensagem de erro, que pode incluir uma leitura de código de barras com falha, um padrão de código de barras não configurado para uso com o sistema ou alguma tentativa de ler um código de barras quando a leitura é proibida pelo sistema.

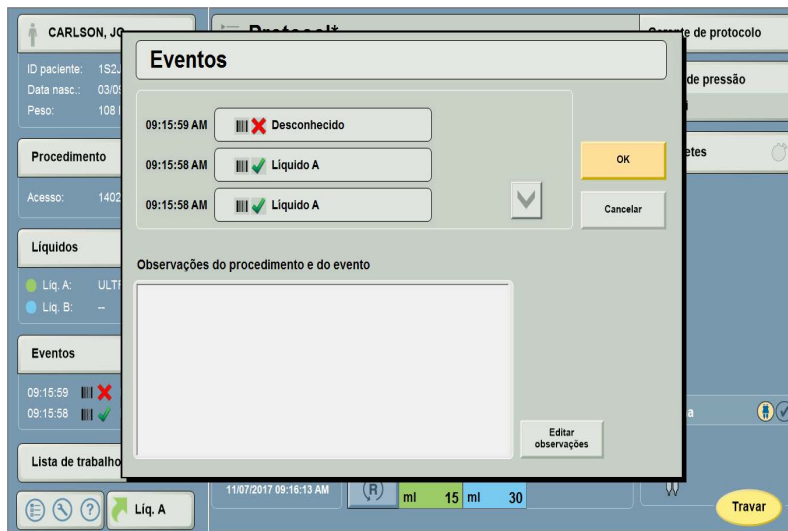


Figura 4 - 25: Detalhes da guia Eventos

## 4.6.2 Editar observações no painel Eventos

**NOTA:** As observações podem ser editadas na guia Eventos, mas não podem ser apagadas. Para apagar as observações, consulte 4.5.2 - Limpar todas as informações de observações para a injeção seguinte.

1. Selecione a área Eventos no painel de informática.
2. A guia Eventos é exibida. Selecione **Editar observações** (Figura 4 - 26: Guia Eventos - Editar observações).

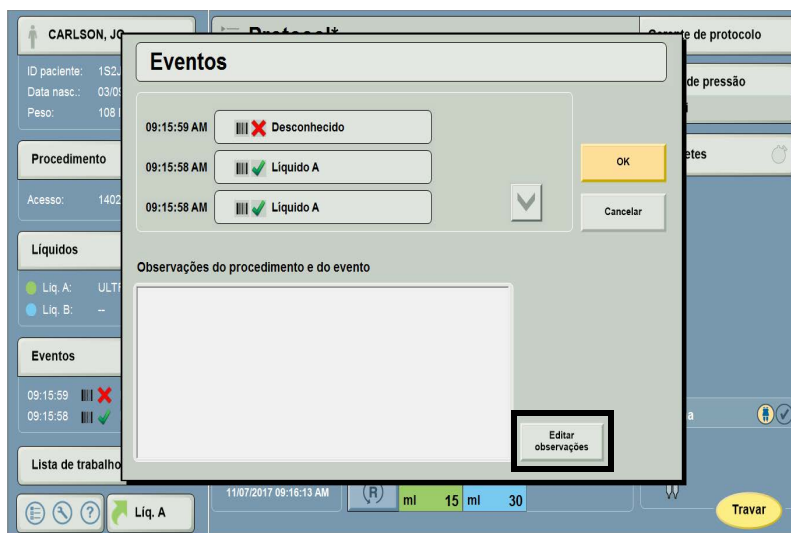


Figura 4 - 26: Guia Eventos - Editar observações

3. Digite as informações das observações com o teclado exibido.
4. Pressione **OK** para salvar as alterações feitas nas observações ou pressione **Cancelar** para ignorar a alteração feita.
5. A caixa Observações de procedimento e eventos exibe as alterações feitas.
6. Para salvar todas as alterações feitas, pressione **OK**. Para cancelar todas as alterações feitas, pressione **Cancelar**.

## 4.7 Navegação e layout da tela

### 4.7.1 Painel de informática

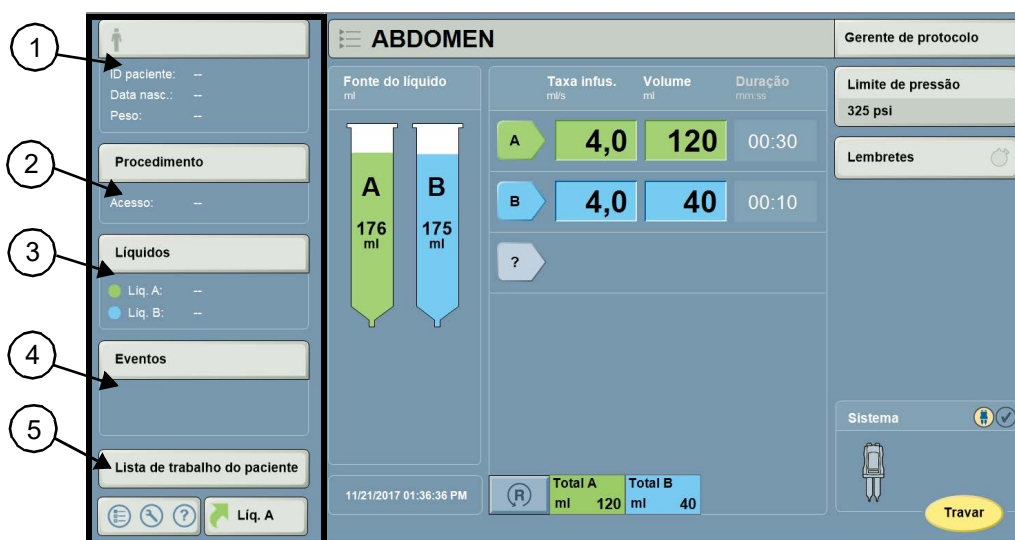


Figura 4 - 27: Painel de informática

Tabela 4 - 1: Navegação e layout da tela do painel de informática

| Número | Nome                                | Descrição   |
|--------|-------------------------------------|---|
| 1      | Informações do paciente             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra as principais informações do paciente: Nome do paciente, ID, data de nascimento e peso.</li> <li>Permite acessar a guia Paciente, que contém informações detalhadas do paciente. Consulte 4.7.2 - Guia Paciente.</li> </ul>   |
| 2      | Informações do procedimento         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra as principais informações do procedimento: Número de acesso.</li> <li>Permite acessar a guia Procedimento, que contém informações detalhadas do procedimento. Consulte 4.7.3 Guia Procedimento.</li> </ul>  |
| 3      | Informações do líquido              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exibe as principais informações de identificação dos líquidos de cada seringa: marca e concentração (contraste) e tipo de líquido (solução salina).</li> <li>Permite acessar as duas guias de líquido, Líquido A e Líquido B, que contém informações detalhadas dos líquidos. Consulte 4.7.4 Guias Líquido A e Líquido B.</li> </ul> |
| 4      | Informações dos eventos             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exibe os eventos gerados pelo sistema, caso tenham ocorrido. Consulte 4.6 - Gerenciamento das informações de eventos.</li> </ul>   |
| 5      | Botão Lista de trabalho do paciente | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permite acessar a lista de trabalho do paciente e a funcionalidade Lista de Trabalho de Modalidade. Consulte 5 - Lista de Trabalho de Modalidade.</li> </ul>   |

### 4.7.2 Guia Paciente

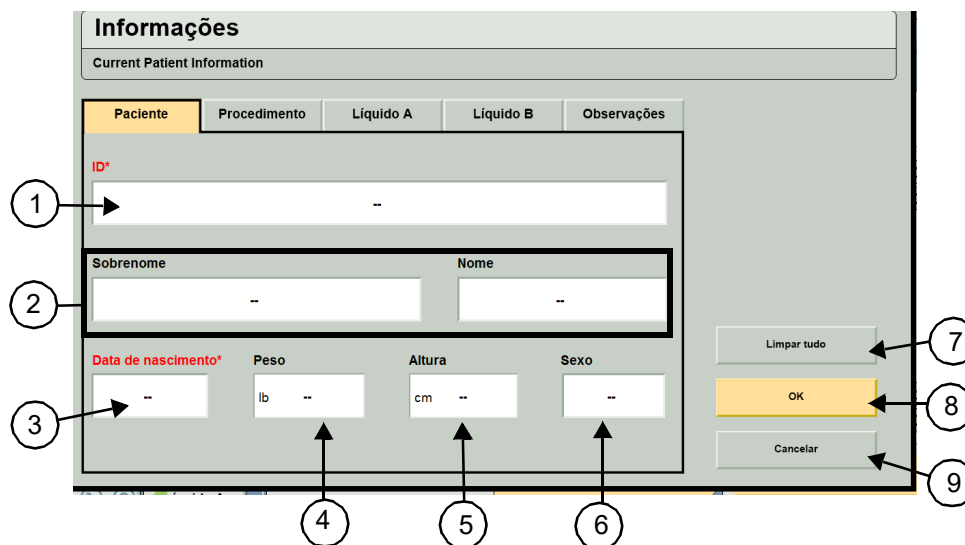


Figura 4 - 28: Guia Paciente

Tabela 4 - 2: Navegação e layout da tela da guia Paciente

| Número | Nome               | Descrição   |
|--------|--------------------|---|
| 1      | ID                 | Identificação ou número de prontuário do paciente (MRN)   |
| 2      | Sobrenome, Nome    | Sobrenome e nome do paciente  |
| 3      | Data de nascimento | Data de nascimento do paciente  |
| 4      | Peso               | Peso do paciente  |
| 5      | Altura             | Altura do paciente  |
| 6      | Sexo               | Sexo do paciente  |
| 7      | Botão Limpar tudo  | Apaga todos os valores em todos os campos com guias: Paciente, Procedimento, Líquido A, Líquido B e Observações.  |
| 8      | Botão OK           | Aceita todos os valores em todos os campos com guias: Paciente, Procedimento, Líquido A, Líquido B e Observações. |
| 9      | Botão Cancelar     | Cancela as alterações feitas nas informações e sai da janela Informações do paciente.                             |

### 4.7.3 Guia Procedimento

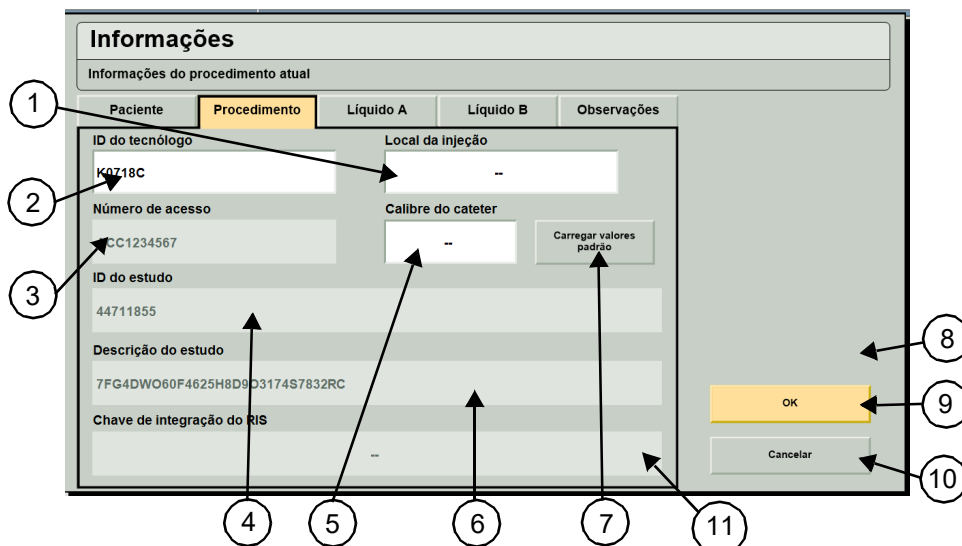


Figura 4 - 29: Guia Procedimento

Tabela 4 - 3: Navegação e layout da tela da guia Procedimento

| Número | Nome             | Descrição   |
|--------|------------------|---|
| 1      | Local da injeção | Local no paciente onde o cateter intravenoso será posicionado |
| 2      | ID do tecnólogo  | ID do tecnólogo responsável pelo procedimento                 |
| 3      | Número de acesso | O número de acesso do procedimento                            |
| 4      | ID do estudo     | Número de identificação associado ao procedimento             |

Tabela 4 - 3: Navegação e layout da tela da guia Procedimento

| Número | Nome                          | Descrição   |
|--------|-------------------------------|---|
| 5      | Calibre do cateter            | Calibre do cateter usado para o procedimento  |
| 6      | Descrição do estudo           | Descrição do estudo para o procedimento   |
| 7      | Botão Carregar valores padrão | Inserir os valores padrão em todos os campos de dados do procedimento.  |
| 8      | Botão Limpar tudo             | Apaga todos os valores em todos os campos com guias: Paciente, Procedimento, Líquido A, Líquido B e Observações.  |
| 9      | Botão OK                      | Aceita todos os valores em todos os campos com guias: Paciente, Procedimento, Líquido A, Líquido B e Observações. |
| 10     | Botão Cancelar                | Cancela as alterações feitas e sai da janela Informações do paciente.   |
| 11     | Chave de integração do RIS    | Chave de integração do RIS para o procedimento  |

#### 4.7.4 Guias Líquido A e Líquido B

**NOTA:** A Figura 4 - 30: Guia Líquido mostra a guia Líquido A. A guia Líquido B é idêntica à guia Líquido A.

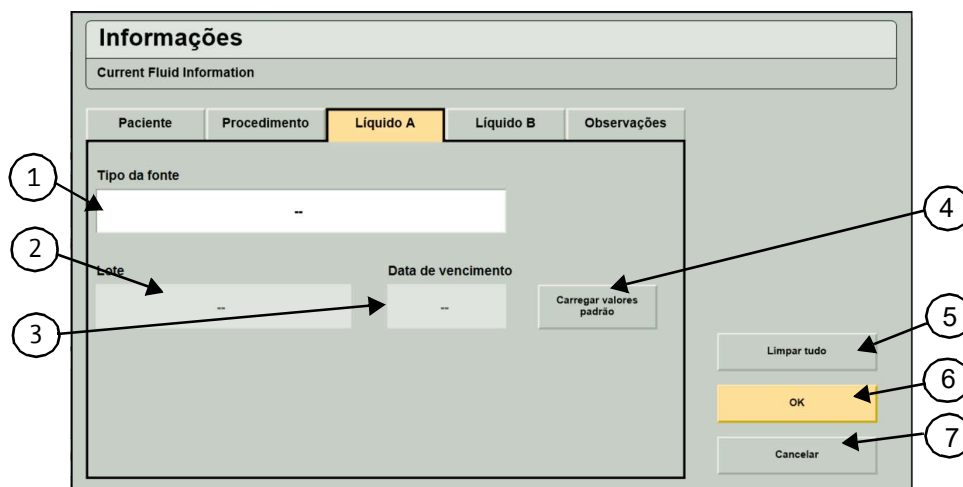


Figura 4 - 30: Guia Líquido

Tabela 4 - 4: Navegação e layout da tela da guia Líquido A e Líquido B

| Número | Nome                          | Descrição  |
|--------|-------------------------------|--|
| 1      | Tipo da fonte                 | Identificação do líquido: contraste ou solução salina  |
| 2      | Lote                          | Código do lote do recipiente do líquido  |
| 3      | Data de vencimento            | Data de vencimento do recipiente do líquido  |
| 4      | Botão Carregar valores padrão | Inserir os valores padrão em todos os campos de dados de Líquido A.  |
| 5      | Botão Limpar tudo             | Apaga todos os valores em todos os campos com guias: Paciente, Procedimento, Líquido A, Líquido B e Observações. |

Tabela 4 - 4: Navegação e layout da tela da guia Líquido A e Líquido B

| Número | Nome           | Descrição   |
|--------|----------------|---|
| 6      | Botão OK       | Aceita todos os valores em todos os campos com guias: Paciente, Procedimento, Líquido A, Líquido B e Observações. |
| 7      | Botão Cancelar | Cancela as alterações feitas nas informações e sai da janela Informações do paciente.                             |

### 4.7.5 Guia Observações

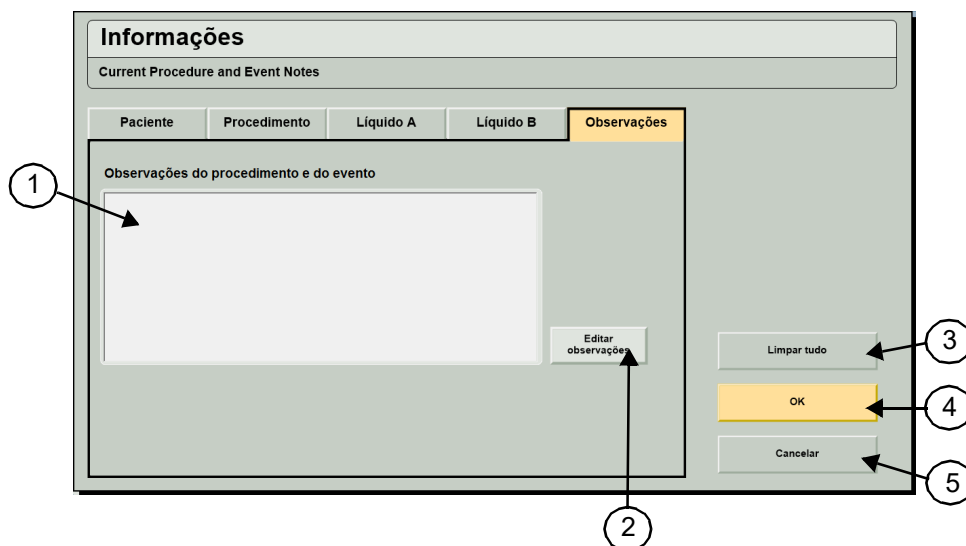


Figura 4 - 31: Guia Observações

Tabela 4 - 5: Navegação e layout da tela da guia Observações

| Número | Nome                                    | Descrição   |
|--------|---|---|
| 1      | Observações do procedimento e do evento | Visualização das observações atualmente inseridas   |
| 2      | Botão Editar observações                | Permite modificar o parágrafo de observações do procedimento e dos eventos.                                       |
| 3      | Botão Limpar tudo                       | Apaga todos os valores em todos os campos com guias: Paciente, Procedimento, Líquido A, Líquido B e Observações.  |
| 4      | Botão OK                                | Aceita todos os valores em todos os campos com guias: Paciente, Procedimento, Líquido A, Líquido B e Observações. |
| 5      | Botão Cancelar                          | Cancela as alterações feitas nas informações e sai da janela Informações do paciente.                             |

### 4.7.6 Guia Eventos

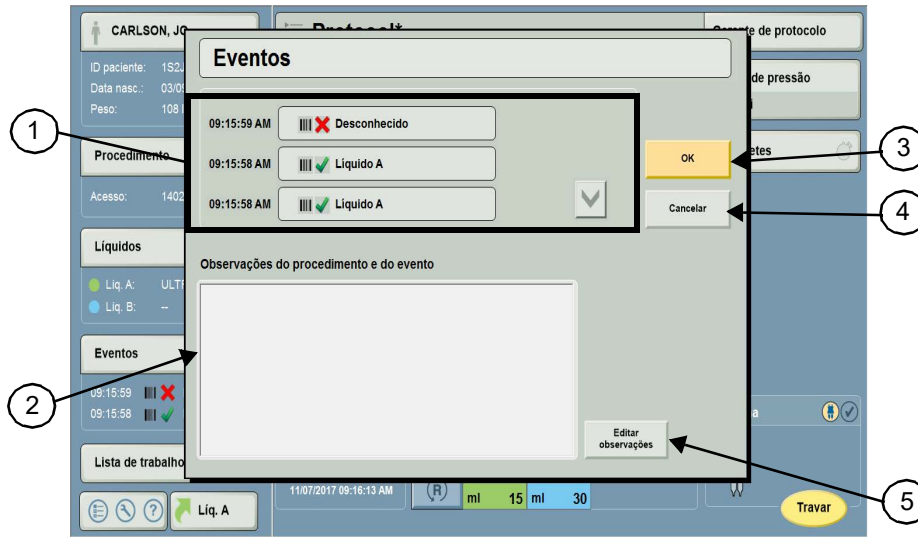


Figura 4 - 32: Guia Eventos

Tabela 4 - 6: Navegação e layout da tela da guia Eventos

| Número | Nome                                    | Descrição  |
|--------|---|--|
| 1      | Detalhes dos eventos                    | Exibe uma lista de eventos bem-sucedidos ou não com carimbos de data e hora. Consulte 4.6.1 - Visualizar informações de eventos. |
| 2      | Observações do procedimento e do evento | Visualização das observações atualmente inseridas  |
| 3      | Botão OK                                | Aceita as alterações feitas no parágrafo de observações do procedimento e dos eventos.   |
| 4      | Botão Cancelar                          | Cancela as alterações feitas nas informações e sai da guia Eventos.  |
| 5      | Botão Editar observações                | Permite modificar o parágrafo de observações do procedimento e dos eventos.  |





## 5 Lista de Trabalho de Modalidade

A Lista de Trabalho de Modalidade é um aplicativo que permite utilizar o servidor da Lista de Trabalho de Modalidade do departamento para identificar e selecionar o paciente e o estudo do procedimento de injeção de contraste seguinte para preencher automaticamente as seções de informações do paciente e do procedimento no painel de informática. Quando o aplicativo acessa o servidor da Lista de Trabalho de Modalidade do departamento, um conjunto de registros de pacientes e estudos é carregado no sistema da Estação de Trabalho Certegra para a criação de uma lista de trabalho de pacientes interna.

**NOTA:** Devido a integrações diferentes com o painel de informática, a Lista de Trabalho de Modalidade pode não ser aplicável em todos os sistemas.

### 5.1 Selecionar um paciente

#### 5.1.1 Configurar as informações do paciente e do estudo para uma injeção de contraste

Para configurar as informações do paciente e do estudo para uma injeção de contraste usando o recurso Lista de Trabalho de Modalidade na Estação de Trabalho Certegra:

1. Selecione **Lista de trabalho do paciente** na tela inicial da Estação de Trabalho Certegra (Figura 5 - 1: Lista de trabalho do paciente).

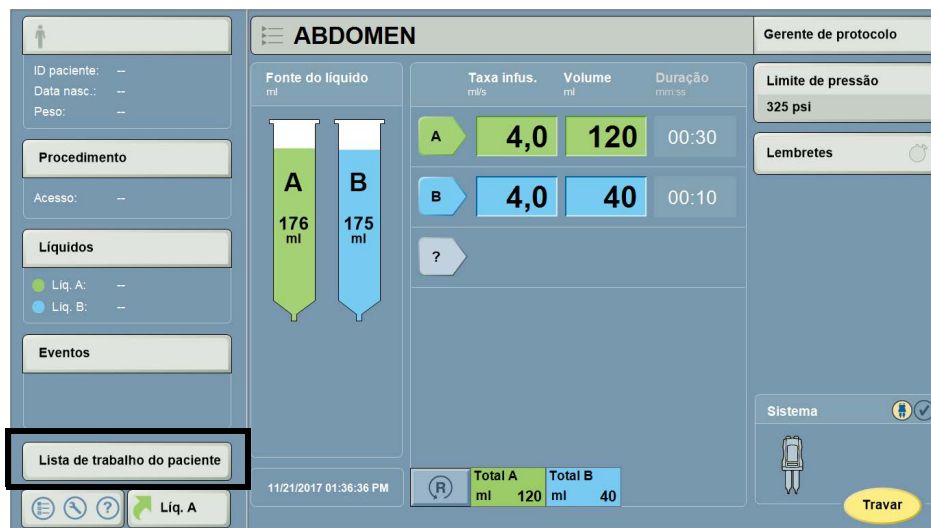


Figura 5 - 1: Lista de trabalho do paciente

- Uma chamada ativa é feita para o servidor Lista de Trabalho de Modalidade da instalação. As entradas resultantes são exibidas na tela Lista de trabalho de pacientes (Figura 5 - 2: Tela principal da lista de trabalho de pacientes).

| Nome do paciente     | Data de nascimento | ID            | Hora - Data         | Acesso    | Descrição do estudo                  |
|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| ALLEN, BRANDY        | 07/02/1948         | 1H3SRLICF08QI | 04:00 PM 10/09/2017 | 796613297 | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CO  |
| BANKS, DOROTHY       | 03/30/1977         | CCZPZRDC15Y4  | 04:00 AM 10/09/2017 | 172176880 | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTR |
| BISHOP, JULIO        | 12/26/1971         | 1E1IVX8E5TM3F | 11:00 PM 10/09/2017 | 712312971 | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CO  |
| BROOKS, TAMMY        | 08/19/1942         | 1Q1DMTR48AX7U | 04:00 AM 10/08/2017 | 24869513  | 71551 - CHEST WITH AND WITHOUT CONF  |
| CAMPBELL, OLGA       | 03/31/1963         | 1A7OCUS56USTX | 12:00 AM 10/08/2017 | 615295914 | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTR |
| COLLINS, RUTH        | 05/29/1971         | 1RL88TLLWMQ8K | 05:00 AM 10/09/2017 | 340461916 | 72196 - PELVIS WITH AND WITHOUT CONT |
| DAVIS, HENRY         | 03/23/1980         | 17B9700F30EA8 | 12:00 AM 10/07/2017 | 749282309 | 71550 - CHEST WITHOUT CONTRAST       |
| FERNANDEZ, CHARLO... | 07/09/1938         | 9A1UYREZC2BX  | 12:00 AM 10/07/2017 | 411928034 | 70551 - BRAIN WITHOUT CONTRAST       |
| FERNANDEZ, DALE      | 09/05/1958         | FC2ZIF43XTX1  | 10:00 PM 10/07/2017 | 249949304 | 73702 - CTA LOWER EXTREMITY WITH ANE |
| FLEMING, BERNARD     | 12/26/1993         | 1OJ0NMLKLIDR  | 03:00 PM 10/07/2017 | 641917899 | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CO  |

Figura 5 - 2: Tela principal da lista de trabalho de pacientes

- Identifique o paciente e estudo apropriados para o estudo de contraste seguinte.
- Selecione o paciente pressionando qualquer um dos elementos associados à linha de entrada do paciente na Lista de trabalho de pacientes. Isso confirma a seleção do paciente e do estudo para o procedimento de injeção seguinte, retorna o sistema para a tela inicial da Estação de Trabalho Certegra e preenche as guias Paciente e Procedimento com as informações apropriadas.

### 5.1.2 Inserção de paciente anônimo para uma injeção de contraste

Use o botão Paciente anônimo para inserir um nome de paciente pré-determinado como placeholder quando não houver informações do paciente disponíveis. Pressionar o botão Paciente anônimo preenche os campos de nome e sobrenome com valores pré-determinados (por exemplo, “John Doe”) e apaga outros campos específicos.


**NOTA:** Para configurar valores de Paciente anônimo, consulte 11.10.1 - Ativar e configurar paciente anônimo.

Para inserir um paciente anônimo para uma injeção:

**NOTA:** O paciente anônimo também pode ser selecionado depois da injeção usando Confirmação de dados. Consulte 7.3.3.1 Atualizar a seleção de Lista de trabalho de pacientes usando Paciente anônimo para obter mais informações.

- Selecione **Lista de trabalho de pacientes** na tela inicial da Estação de Trabalho Certegra.
- Uma chamada ativa é feita para o servidor Lista de Trabalho de Modalidade da instalação. As entradas resultantes são exibidas na tela Lista de trabalho de pacientes.

3. Selecione o botão **Paciente anônimo** (Figura 5 - 3: Paciente anônimo).

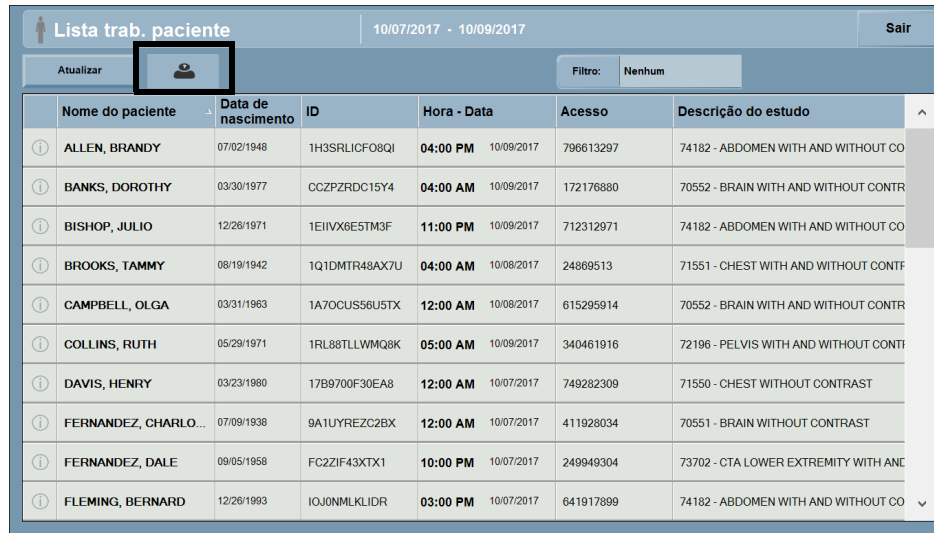

|   | Nome do paciente     | Data de nascimento | ID            | Hora - Data         | Acesso    | Descrição do estudo                   |
|---|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|
| ① | ALLEN, BRANDY        | 07/02/1948         | 1H3SRLICF08QI | 04:00 PM 10/09/2017 | 796613297 | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CO   |
| ① | BANKS, DOROTHY       | 03/30/1977         | CCZPZRDC15Y4  | 04:00 AM 10/09/2017 | 172176880 | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTR  |
| ① | BISHOP, JULIO        | 12/28/1971         | 1EIVX8E5TM3F  | 11:00 PM 10/09/2017 | 712312971 | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CO   |
| ① | BROOKS, TAMMY        | 08/19/1942         | 1Q1DMTR48AX7U | 04:00 AM 10/08/2017 | 24869513  | 71551 - CHEST WITH AND WITHOUT CONF   |
| ① | CAMPBELL, OLGA       | 03/31/1963         | 1A7OCUS56U5TX | 12:00 AM 10/08/2017 | 615295914 | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTR  |
| ① | COLLINS, RUTH        | 05/29/1971         | 1RL88TLLWMQ8K | 05:00 AM 10/09/2017 | 340461916 | 72196 - PELVIS WITH AND WITHOUT CONTI |
| ① | DAVIS, HENRY         | 03/23/1980         | 17B9700F30EA8 | 12:00 AM 10/07/2017 | 749282309 | 71550 - CHEST WITHOUT CONTRAST        |
| ① | FERNANDEZ, CHARLO... | 07/09/1938         | 9A1UYREZC2BX  | 12:00 AM 10/07/2017 | 411928034 | 70551 - BRAIN WITHOUT CONTRAST        |
| ① | FERNANDEZ, DALE      | 09/05/1958         | FC2ZIF43XTX1  | 10:00 PM 10/07/2017 | 249949304 | 73702 - CTA LOWER EXTREMITY WITH ANE  |
| ① | FLEMING, BERNARD     | 12/28/1993         | IOJ0NMLKLIDR  | 03:00 PM 10/07/2017 | 641917899 | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CO   |


Figura 5 - 3: Paciente anônimo

4. O sistema retorna à tela inicial da Estação de Trabalho Certegra. O campo Paciente é preenchido com nome e sobrenome pré-determinados, e outros campos específicos são apagados.

## 5.2 Atualizar a lista de trabalho de pacientes do servidor da Lista de Trabalho de Modalidade

Abra a Lista de trabalho de pacientes selecionando **Lista de trabalho de pacientes** na tela inicial da Estação de Trabalho Certegra. Uma chamada ativa é feita para o servidor da Lista de Trabalho de Modalidade do departamento, e as entradas resultantes são exibidas na tela Lista de trabalho de pacientes.

Para atualizar a Lista de trabalho de pacientes, a qualquer momento, na tela principal da lista de trabalho de pacientes, pressione **Atualizar** (Figura 5 - 4: Atualizar Lista de trabalho de pacientes).

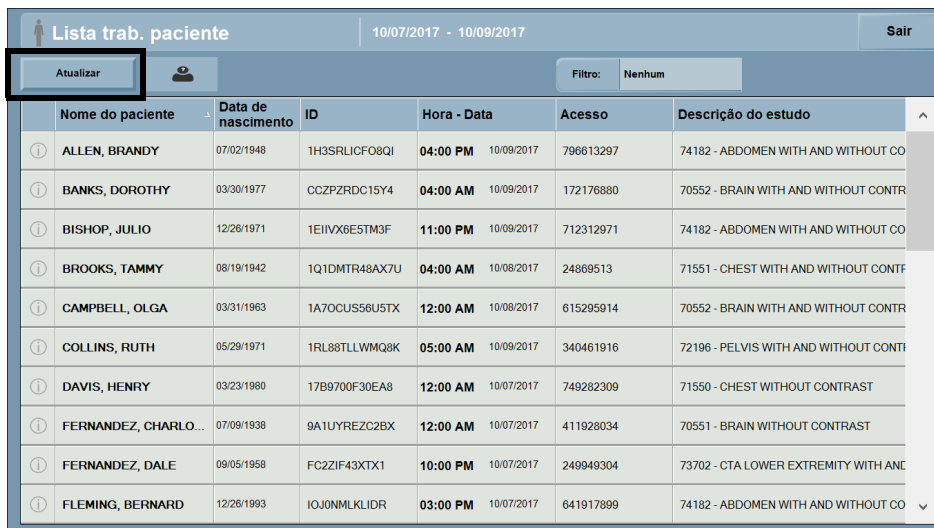

|   | Nome do paciente     | Data de nascimento | ID            | Hora - Data         | Acesso    | Descrição do estudo                   |
|---|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|
| ① | ALLEN, BRANDY        | 07/02/1948         | 1H3SRLICF08QI | 04:00 PM 10/09/2017 | 796613297 | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CO   |
| ① | BANKS, DOROTHY       | 03/30/1977         | CCZPZRDC15Y4  | 04:00 AM 10/09/2017 | 172176880 | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTR  |
| ① | BISHOP, JULIO        | 12/28/1971         | 1EIVX8E5TM3F  | 11:00 PM 10/09/2017 | 712312971 | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CO   |
| ① | BROOKS, TAMMY        | 08/19/1942         | 1Q1DMTR48AX7U | 04:00 AM 10/08/2017 | 24869513  | 71551 - CHEST WITH AND WITHOUT CONF   |
| ① | CAMPBELL, OLGA       | 03/31/1963         | 1A7OCUS56U5TX | 12:00 AM 10/08/2017 | 615295914 | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTR  |
| ① | COLLINS, RUTH        | 05/29/1971         | 1RL88TLLWMQ8K | 05:00 AM 10/09/2017 | 340461916 | 72196 - PELVIS WITH AND WITHOUT CONTI |
| ① | DAVIS, HENRY         | 03/23/1980         | 17B9700F30EA8 | 12:00 AM 10/07/2017 | 749282309 | 71550 - CHEST WITHOUT CONTRAST        |
| ① | FERNANDEZ, CHARLO... | 07/09/1938         | 9A1UYREZC2BX  | 12:00 AM 10/07/2017 | 411928034 | 70551 - BRAIN WITHOUT CONTRAST        |
| ① | FERNANDEZ, DALE      | 09/05/1958         | FC2ZIF43XTX1  | 10:00 PM 10/07/2017 | 249949304 | 73702 - CTA LOWER EXTREMITY WITH ANE  |
| ① | FLEMING, BERNARD     | 12/28/1993         | IOJ0NMLKLIDR  | 03:00 PM 10/07/2017 | 641917899 | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CO   |

Figura 5 - 4: Atualizar Lista de trabalho de pacientes

## 5.3 Encontrar um paciente na lista de trabalho de pacientes

Para abrir a Lista de trabalho de pacientes, selecione **Lista de trabalho de pacientes** na tela inicial da Estação de Trabalho Certegra. Uma chamada ativa é feita para o servidor da Lista de Trabalho de Modalidade do departamento, e as entradas resultantes são exibidas na tela Lista de trabalho de pacientes.

### 5.3.1 Organizar a lista de trabalho de pacientes (aplicável a todos os cabeçalhos de colunas da lista de trabalho de pacientes)

**NOTA:** É possível classificar o cabeçalho de cada coluna da Lista de trabalho de pacientes.

1. Pressione o cabeçalho aplicável.
2. Um acento circunflexo aparece ao lado do nome do cabeçalho.
3. Pressione o cabeçalho novamente para classificar em ordem decrescente.
4. Pressione o cabeçalho duas vezes para classificar em ordem crescente.

### 5.3.2 Navegar na lista de trabalho de pacientes

Use a barra de rolagem à direita da lista de trabalho de pacientes para navegar pela lista.

- ◆ Selecionar os símbolos de seta para cima ou para baixo move a lista de trabalho uma entrada por vez.
- ◆ Selecione e arraste o controle deslizante da barra de rolagem para cima ou para baixo para mover a lista para cima ou para baixo até que o controle não seja mais tocado.
- ◆ Pressione e solte a barra de rolagem acima ou abaixo do controle deslizante da barra de rolagem para mover o trabalho de entradas de uma página para cima ou para baixo.
- ◆ Pressione e solte a barra de rolagem acima ou abaixo do controle deslizante da barra de rolagem para mover o trabalho de entradas de uma página para cima ou para baixo até o controle deslizante atingir o ponto tocado.

### 5.3.3 Criar um filtro na lista de trabalho

Para criar um filtro na Lista de trabalho de pacientes:

1. Na tela principal da Lista de trabalho de pacientes, pressione **Filtro** (Figura 5 - 5: Filtro da Lista de trabalho de pacientes).

The screenshot shows a software interface titled 'Lista trab. paciente' with a date range of '10/07/2017 - 10/09/2017'. A 'Filtro' dropdown menu is open, showing 'Nenhum' as the selected option. Below the menu is a table with columns: Nome do paciente, Data de nascimento, ID, Hora - Data, Acesso, and Descrição do estudo. The table contains 11 rows of patient data.

|   | Nome do paciente     | Data de nascimento | ID            | Hora - Data         | Acesso    | Descrição do estudo                   |
|---|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|
| ① | ALLEN, BRANDY        | 07/02/1948         | 1H3SRLICF08QI | 04:00 PM 10/09/2017 | 796613297 | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CO   |
| ① | BANKS, DOROTHY       | 03/30/1977         | CCZPZRDC15Y4  | 04:00 AM 10/09/2017 | 172176880 | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTR  |
| ① | BISHOP, JULIO        | 12/26/1971         | 1E1IVX8ESTM3F | 11:00 PM 10/09/2017 | 712312971 | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CO   |
| ① | BROOKS, TAMMY        | 08/19/1942         | 1Q1DMTR48AX7U | 04:00 AM 10/08/2017 | 24869513  | 71551 - CHEST WITH AND WITHOUT CONF   |
| ① | CAMPBELL, OLGA       | 03/31/1963         | 1A7OCUS56U5TX | 12:00 AM 10/08/2017 | 615295914 | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTR  |
| ① | COLLINS, RUTH        | 05/29/1971         | 1RL88TLLWMQ8K | 05:00 AM 10/09/2017 | 340461916 | 72196 - PELVIS WITH AND WITHOUT CONTI |
| ① | DAVIS, HENRY         | 03/23/1980         | 17B9700F30EA8 | 12:00 AM 10/07/2017 | 749282309 | 71550 - CHEST WITHOUT CONTRAST        |
| ① | FERNANDEZ, CHARLO... | 07/09/1938         | 9A1UYREZC2BX  | 12:00 AM 10/07/2017 | 411928034 | 70551 - BRAIN WITHOUT CONTRAST        |
| ① | FERNANDEZ, DALE      | 09/05/1958         | FCZZIF43XTX1  | 10:00 PM 10/07/2017 | 249949304 | 73702 - CTA LOWER EXTREMITY WITH ANE  |
| ① | FLEMING, BERNARD     | 12/26/1993         | 1OJ0NMLKLIDR  | 03:00 PM 10/07/2017 | 641917899 | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CO   |

Figura 5 - 5: Filtro da Lista de trabalho de pacientes

2. Selecione os critérios do filtro apropriados (Figura 5 - 6: Selecionar filtro).



Figura 5 - 6: Selecionar filtro

**NOTA:** Para os critérios de filtro nome da estação, ID, número de acesso, médico solicitante e descrição do estudo, o sistema usa os conceitos de caracteres curinga e “começar com” para criar um filtro que retorne todas as entradas que começam com os caracteres digitados.

- a. **Nome do paciente**
  - i. Digite os dados do filtro com o teclado alfanumérico.
  - ii. Pressione **Enter** para aceitar as alterações feitas ou pressione **Cancelar** para ignorá-las.
- b. **ID**
  - i. Digite os dados do filtro com o teclado alfanumérico.
  - ii. Pressione **Enter** para aceitar as alterações feitas ou pressione **Cancelar** para ignorá-las.
- c. **Número de acesso**
  - i. Digite os dados do filtro com o teclado alfanumérico.
  - ii. Pressione **Enter** para aceitar as alterações feitas ou pressione **Cancelar** para ignorá-las.

d. Data

- i. Insira dados de filtro.
- ii. Selecione os campos Mês, Dia e Ano para alterar o valor do campo (Figura 5 - 7: Lista de trabalho de pacientes - Selecionar data).

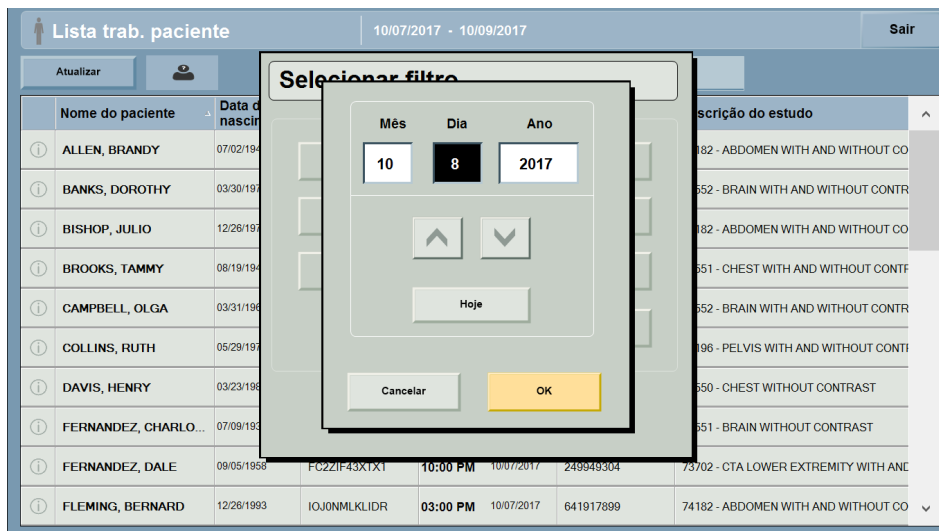


Figura 5 - 7: Lista de trabalho de pacientes - Selecionar data

- iii. Use as setas para aumentar ou diminuir o valor ou pressione **Hoje** para usar a data atual.
- iv. Pressione **OK** para aceitar as alterações feitas ou pressione **Cancelar** para ignorá-las.

e. Nome da estação

- i. Selecione uma entrada na lista Nome da estação (Figura 5 - 8: Lista de trabalho de pacientes - Selecionar nome da estação).

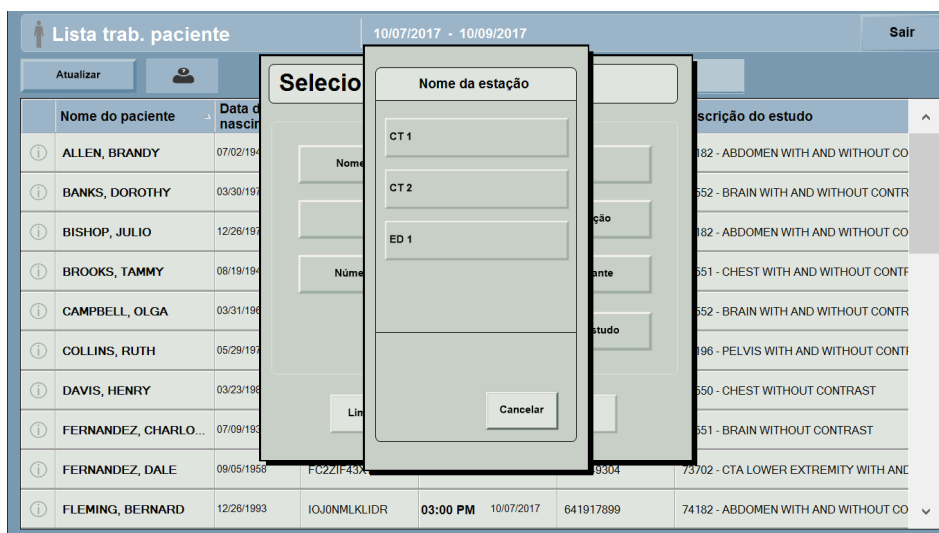


Figura 5 - 8: Lista de trabalho de pacientes - Selecionar nome da estação

- ii. Quando o valor é selecionado, o campo Nome da estação é atualizado e a lista desaparece.

**NOTA:** Se o local da injeção correto não for mostrado, mas aparecerem setas, pressione a seta **Para cima** ou **Para baixo** para mostrar entradas adicionais. Se o nome da estação não estiver contido na lista, consulte 6.3.2 - Adicionar um valor a uma lista criada pelo usuário para adicionar entradas à lista Nome da estação.

- iii. Pressione **Limpar** para remover o valor existente ou pressione **Cancelar** para ignorar as alterações.

- f. **Médico solicitante**
    - i. Digite os dados do filtro com o teclado alfanumérico.
    - ii. Pressione **Enter** para aceitar as alterações feitas ou pressione **Cancelar** para ignorá-las.
  - g. **Descrição do estudo**
    - i. Digite os dados do filtro com o teclado alfanumérico.
    - ii. Pressione **Enter** para aceitar as alterações feitas ou pressione **Cancelar** para ignorá-las.
3. Os dados de filtro são criados automaticamente depois de selecionar os critérios de filtro apropriados e pressionar **Enter**. O sistema aplica os critérios de filtro selecionados, filtra os dados para a lista de trabalho de pacientes e exibe apenas os registros da lista de trabalho de pacientes que correspondem ao filtro.

### 5.3.4 Remover um filtro na lista de trabalho

1. Selecione **Filtro** na tela principal da Lista de trabalho de pacientes.
2. Selecione **Limpar filtro** para remover o filtro (Figura 5 - 9: Limpar filtro).



Figura 5 - 9: Limpar filtro

3. O filtro é removido, e o sistema retorna à tela principal da Lista de trabalho de pacientes sem um filtro aplicado. A área de filtro exibe "Filtro: nenhum".

## 5.4 Navegação e layout da tela

### 5.4.1 Lista de trabalho principal de pacientes

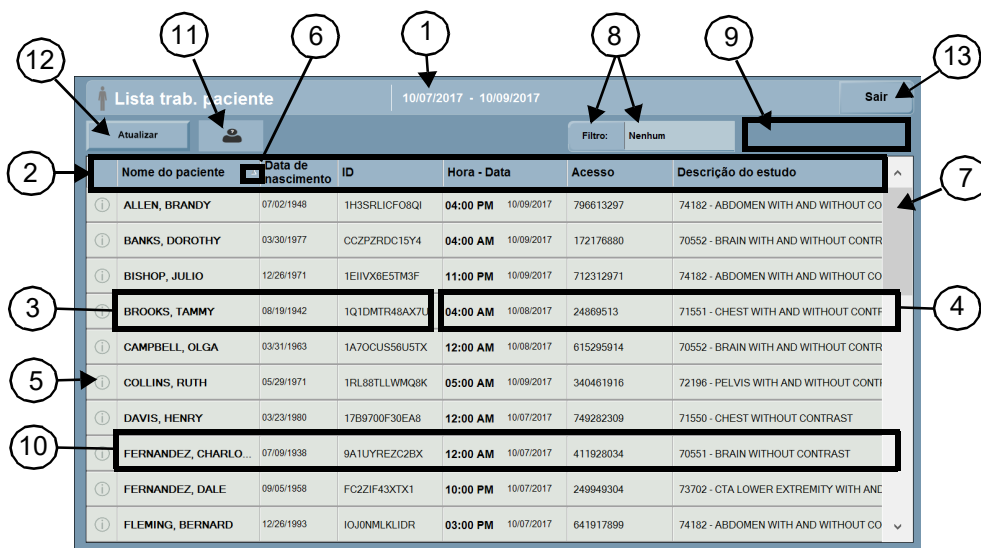


Figura 5 - 10: Tela principal da lista de trabalho de pacientes

Tabela 5 - 1: Áreas de informações da tela principal da Lista de trabalho de pacientes

| Número | Nome   | Descrição  |
|--------|--|--|
| 1      | Intervalo de data  | Exibe o intervalo de data dos estudos exibidos que são extraídos do servidor da Lista de Trabalho de Modalidade.   |
| 2      | Cabeçalhos das colunas   | Exibe os tipos de informações importantes que são recuperadas do servidor da Lista de Trabalho de Modalidade. <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Nome do paciente: Nome do paciente (sobrenome, nome)</li> <li>◆ Data de nascimento: Data de nascimento do paciente</li> <li>◆ ID: ID do paciente</li> <li>◆ Hora, data: Hora e data do estudo programado</li> <li>◆ Acesso: Número de acesso atribuído ao estudo programado</li> <li>◆ Descrição do estudo: Descrição do estudo programado</li> </ul> |
| 3      | Informações do paciente  | Exibe as informações do paciente, incluindo nome, data de nascimento e identificação.  |
| 4      | Informações do estudo  | Exibe as informações do estudo, incluindo data programada e hora de início, número de acesso e descrição do estudo.  |
| 5      | Botão de informações detalhadas sobre a entrada da lista de trabalho | Permite acessar informações detalhadas sobre o paciente e o estudo selecionados conforme mostrado em Figura 5 - 11: Tela de entrada detalhada da lista de trabalho.  |



Tabela 5 - 1: Áreas de informações da tela principal da Lista de trabalho de pacientes

| Número | Nome                    | Descrição  |
|--------|-------------------------|--|
| 6      | Organização das colunas | <p>A classificação é ativada e realçada por um acento circunflexo no canto da coluna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Clique no cabeçalho da coluna “Nome do paciente” para alternar entre as classificações alfabéticas dos nomes dos pacientes de A a Z e de Z a A.</li> <li>◆ Clique no cabeçalho da coluna “Data de nascimento” para alternar entre as classificações cronológicas da data de nascimento dos pacientes da mais antiga para a mais recente e da mais recente para a mais antiga.</li> <li>◆ Clique no cabeçalho da coluna “ID” para alternar entre as classificações numéricas da identificação dos pacientes programados da menor para a maior e da maior para a menor.</li> <li>◆ Clique no cabeçalho da coluna “Hora/Data” para alternar entre as classificações cronológicas da data e hora programada da mais antiga para a mais recente e da mais recente para a mais antiga.</li> <li>◆ Clique no cabeçalho da coluna “Acesso” para alternar entre as classificações numéricas dos números de acesso do estudo do menor para o maior e do maior para o menor.</li> <li>◆ Clique no cabeçalho da coluna “Descrição do estudo” para alternar entre as classificações alfabéticas da descrição dos estudos de A a Z e de Z a A.</li> </ul> |
| 7      | Barra de rolagem        | <p>Permite mover para cima e para baixo na Lista de trabalho de pacientes. A seleção de áreas da barra de rolagem percorre a Lista de trabalho de pacientes para cima ou para baixo em uma das seguintes maneiras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Selecionar os símbolos de seta para cima ou para baixo move a lista de trabalho uma entrada por vez.</li> <li>◆ Selecione e arraste o controle deslizante da barra de rolagem para cima ou para baixo para mover a Lista de trabalho para cima ou para baixo até que o controle não seja mais tocado.</li> <li>◆ Pressione e solte a barra de rolagem acima ou abaixo do controle deslizante da barra de rolagem para mover o trabalho de entradas de uma página para cima ou para baixo.</li> <li>◆ Pressione e solte a barra de rolagem acima ou abaixo do controle deslizante da barra de rolagem para mover o trabalho de entradas de uma página para cima ou para baixo até o controle deslizante atingir o ponto tocado.</li> </ul>  |

Tabela 5 - 1: Áreas de informações da tela principal da Lista de trabalho de pacientes

| Número | Nome                      | Descrição  |
|--------|---------------------------|--|
| 8      | Área de filtragem         | Permite filtrar a Lista de trabalho de pacientes para exibir apenas os registros que satisfaçam os requisitos dos critérios do filtro aplicados: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Em branco – nenhum filtro usado.</li> <li>◆ Nome do paciente</li> <li>◆ ID paciente</li> <li>◆ Data de início</li> <li>◆ Descrição do estudo</li> <li>◆ Médico solicitante</li> <li>◆ Nome da estação</li> <li>◆ Número de acesso</li> </ul> |
| 9      | Exibir dados de filtragem | Exibe os dados usados para o filtro aplicado. O campo permanece em branco se nenhum filtro for aplicado.   |
| 10     | Selecionar um paciente    | Permite selecionar um paciente e estudo na Lista de trabalho pressionando qualquer um dos elementos associados a uma linha de entrada do paciente na Lista de trabalho de pacientes.   |
| 11     | Botão Paciente anônimo    | Preenche o nome e o sobrenome do paciente com valores pré-configurados quando as informações do paciente não estão disponíveis.  |
| 12     | Botão Atualizar           | Atualiza as informações na Lista de trabalho de pacientes enviando uma nova consulta ao servidor da Lista de Trabalho de Modalidade do departamento.   |
| 13     | Botão Sair                | Sai da tela da Lista de trabalho de pacientes sem selecionar um paciente e retorna o sistema para a tela inicial da Estação de Trabalho Certegra.  |

### 5.4.2 Tela de entrada detalhada da lista de trabalho

A tela de entrada detalhada da Lista de trabalho exibe todas as informações recuperadas do servidor da Lista de Trabalho de Modalidade do departamento que talvez não tenham sido exibidas na tela principal da Lista de trabalho de pacientes.

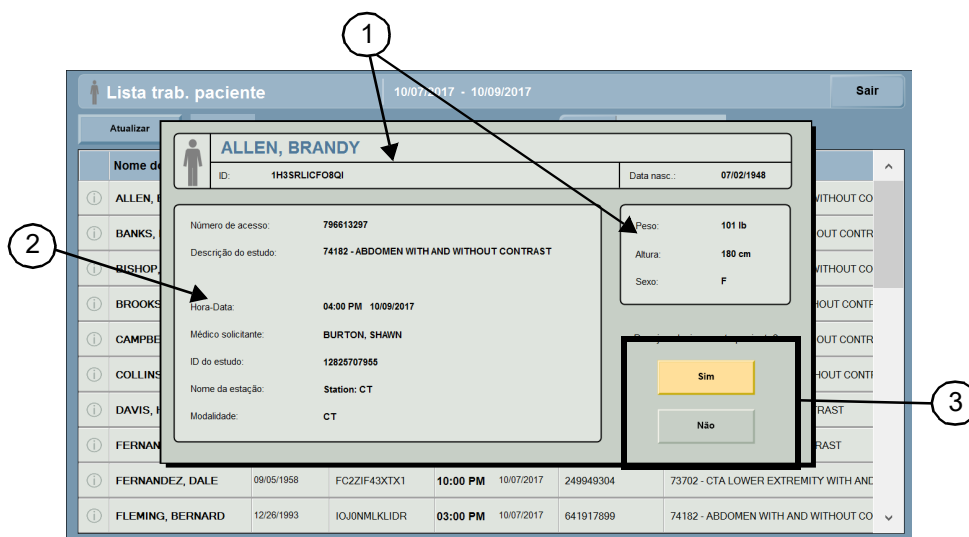


Figura 5 - 11: Tela de entrada detalhada da lista de trabalho

Tabela 5 - 2: Áreas de informações da tela de entrada detalhada da lista de trabalho

| Número | Nome                          | Descrição  |
|--------|-------------------------------|--|
| 1      | Informações do paciente       | Exibe todas as informações do paciente recuperadas, incluindo: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Sobrenome, Nome</li> <li>◆ ID</li> <li>◆ Data de nascimento</li> <li>◆ Peso</li> <li>◆ Altura</li> <li>◆ Sexo</li> </ul>   |
| 2      | Informações do estudo         | Exibe todas as informações do estudo recuperadas, incluindo: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Número de acesso</li> <li>◆ Descrição do estudo</li> <li>◆ Hora, data: Hora e data programadas para o estudo</li> <li>◆ Médico solicitante</li> <li>◆ ID do estudo</li> <li>◆ Nome da estação: Estação programada para o estudo</li> <li>◆ Modalidade: Modalidade (TC ou RM) para a qual o estudo foi feito</li> </ul>   |
| 3      | Botões de seleção do paciente | Os botões Sim e Não confirmam ou cancelam a seleção do paciente e do estudo para o procedimento de injeção seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pressionar <b>Sim</b> confirma a seleção do paciente e do estudo para o procedimento de injeção seguinte, retorna o sistema para a tela inicial da Estação de Trabalho Certegra e preenche as guias Paciente e Procedimento com as informações apropriadas.</li> <li>◆ Pressionar <b>Não</b> cancela a seleção do paciente e do estudo para o procedimento de injeção seguinte e retorna o sistema para a tela principal da Lista de trabalho de pacientes.</li> </ul> |

### 5.4.3 Tela de criação de filtros

Crie um filtro para exibir apenas as entradas da Lista de trabalho de pacientes que atendem a determinados critérios. Para criar um filtro, selecione a seção Área de filtragem da página principal da Lista de trabalho de pacientes (mostrada como o número 8 da lista na Figura 5 - 10: Tela principal da lista de trabalho de pacientes).

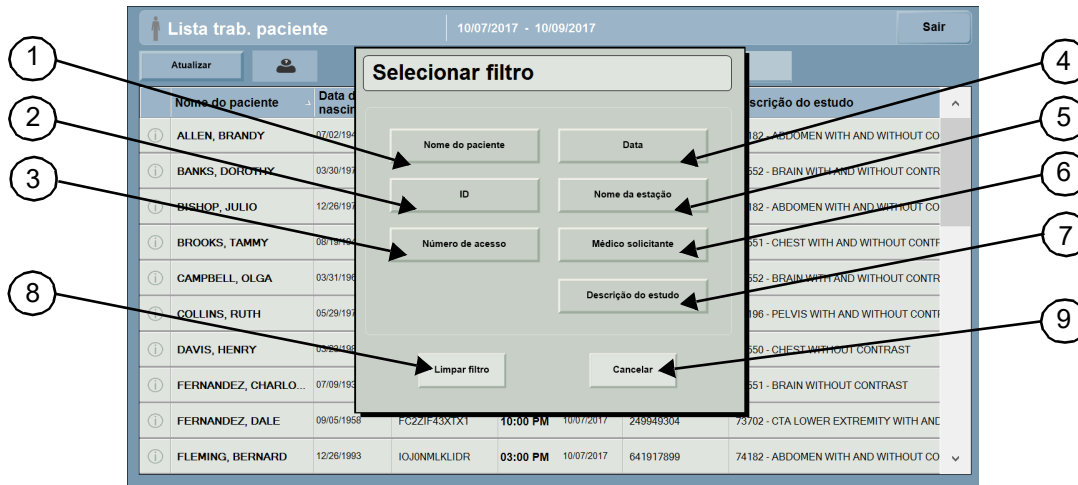


Figura 5 - 12: Selecionar filtro

Tabela 5 - 3: Áreas da tela Criação de filtro com elementos de navegação

| Número | Nome                | Descrição  |
|--------|---------------------|--|
| 1      | Nome do paciente    | Filtra a Lista de trabalho e exibe apenas os nomes dos pacientes que atendem aos critérios de dados de filtragem.  |
| 2      | ID                  | Filtra a Lista de trabalho e exibe apenas os pacientes com IDs que atendem aos critérios de dados de filtragem.  |
| 3      | Número de acesso    | Filtra a Lista de trabalho e exibe apenas os pacientes com estudos com números de acesso que atendem aos critérios de dados de filtragem.                |
| 4      | Data                | Filtra a Lista de trabalho e exibe apenas os pacientes com estudos que começam nas datas que atendem aos critérios de dados de filtragem.                |
| 5      | Nome da estação     | Filtra a Lista de trabalho e exibe apenas os pacientes com estudos programados para os nomes de estação que atendem aos critérios de dados de filtragem. |
| 6      | Médico solicitante  | Filtra a Lista de trabalho e exibe apenas os pacientes com estudos com nomes de médicos solicitantes que atendem aos critérios de dados de filtragem.    |
| 7      | Descrição do estudo | Filtra a Lista de trabalho e exibe apenas os pacientes com estudos com descrições que atendem aos critérios de dados de filtragem.                       |
| 8      | Botão Limpar filtro | Apaga o filtro aplicado atualmente.  |
| 9      | Botão Cancelar      | Cancela a criação de filtro e retorna o sistema à tela principal da Lista de trabalho de pacientes.  |

## 6 Opções de configuração do painel de informática e da Lista de Trabalho de Modalidade

O recurso Lista de Trabalho de Modalidade possui dois componentes de configuração: *Configuração do sistema*, que é realizada apenas uma vez para uma determinada unidade hospitalar durante a instalação do sistema e não é alterada com frequência, e *configuração da implementação*, que é feita durante a instalação, mas pode ser modificada durante a operação.

### 6.1 Visão geral da configuração

Para definir opções configuráveis em Configuração de informática:

1. No menu inicial, selecione **Configuração de informática** (Figura 6 - 1: Categorias de configuração).

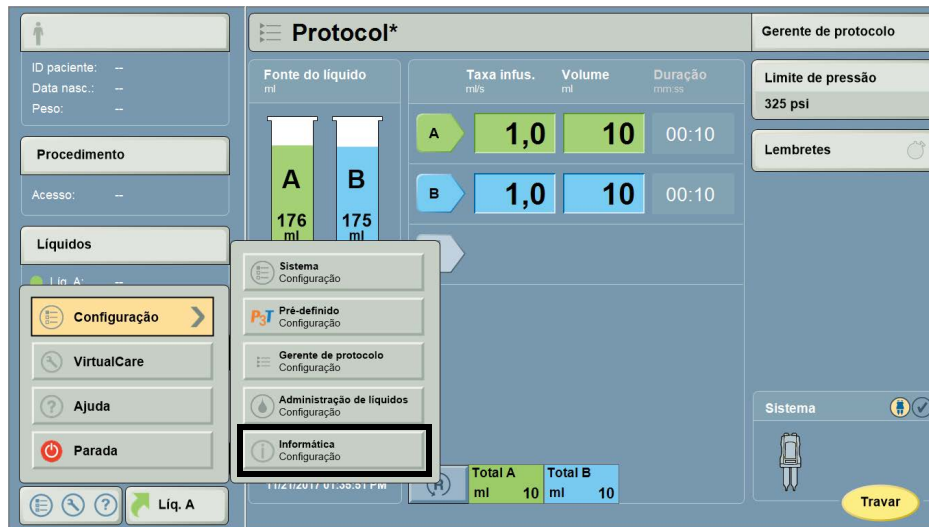


Figura 6 - 1: Categorias de configuração

2. Selecione uma categoria de configuração (Figura 6 - 2: Configuração de informática (Página 1) e Figura 6 - 3: Configuração de informática (Página 2)).

**NOTA:** Selecione os botões “>” e “<” para ir para a próxima página ou voltar para a página anterior.

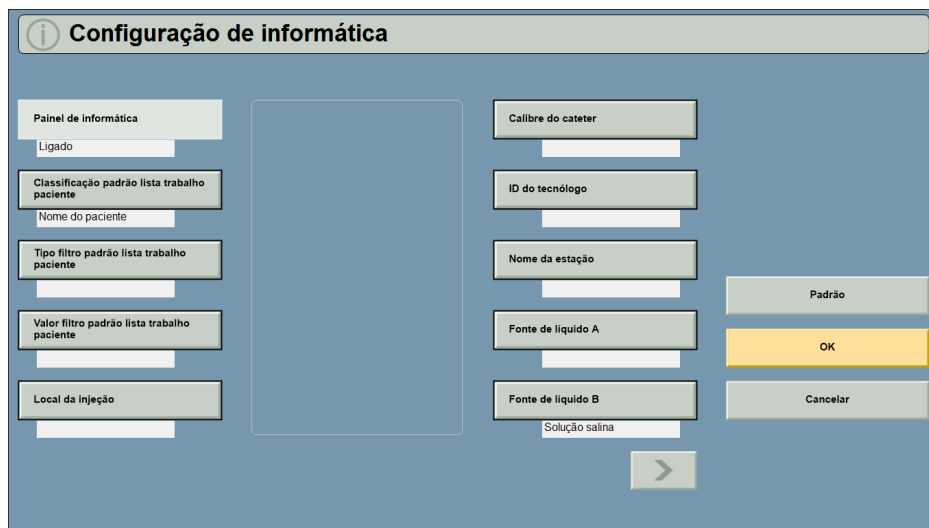


Figura 6 - 2: Configuração de informática (Página 1)

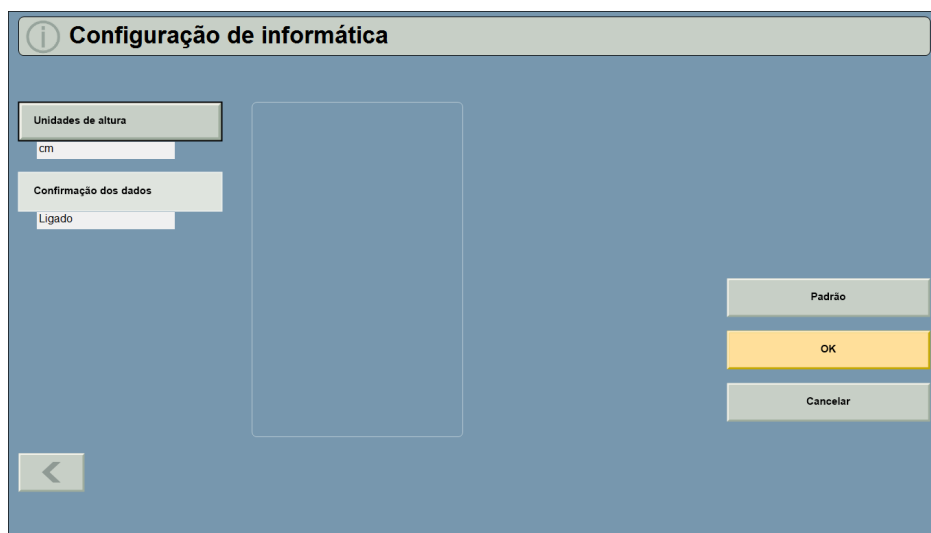


Figura 6 - 3: Configuração de informática (Página 2)

- Defina e selecione os valores conforme necessário. Consulte Tabela 6 - 1: Categorias de configuração de informática para obter mais informações.

**NOTA:** Tabela 6 - 1: Categorias de configuração de informática é uma combinação de itens que controlam os padrões do sistema e itens que gerenciam as listas usadas ao operar o painel de informática.

Tabela 6 - 1: Categorias de configuração de informática

| Categoria de configuração                                | Descrição   | Valor selecionável   |
|--|---|--|
| Painel de informática                                    | Ativa e desativa o painel de informática na interface de usuário da Estação de Trabalho Certegra.   | Ligado, Desligado  |
| Organização padrão da lista de trabalho de pacientes     | Define o método de organização padrão da lista de trabalho de pacientes.  | Nome do paciente, Hora e Data  |
| Tipo de filtro padrão da lista de trabalho de pacientes  | Define o tipo de filtro padrão da lista de trabalho de pacientes. Se estiver definido, este filtro será aplicado cada vez que a Lista de trabalho de pacientes for acessada.  | Nome do paciente, ID do paciente, Número de acesso, Data, Nome da estação, Médico solicitante, Descrição do estudo, Nenhum |
| Valor do filtro padrão da lista de trabalho de pacientes | Define o valor de filtro padrão da lista de trabalho de pacientes. Se estiver definido, este filtro será aplicado cada vez que a Lista de trabalho de pacientes for acessada. | Vários   |
| Local da injeção   | Gerencia a lista de locais de injeção disponíveis para exibição no sistema.   | Lista de locais de injeção   |
| Calibre do cateter                                       | Gerencia a lista de calibres de cateter disponíveis para exibição no sistema.   | Lista Calibre do cateter   |
| ID do tecnólogo  | Gerencia a lista de IDs do tecnólogo disponíveis para exibição no sistema.  | Entrada alfanumérica necessária  |

Tabela 6 - 1: Categorias de configuração de informática

| Categoria de configuração | Descrição  | Valor selecionável  |
|---------------------------|--|---|
| Nome da estação           | Gerencia a lista de nomes de estação disponíveis para exibição no sistema. | N/D   |
| Fonte do líquido A        | Define o valor padrão para o Líquido A.                                    | Lista de fontes de líquido definida para Fonte do líquido A nas telas de configuração de administração do líquido da Estação de Trabalho Certegra |
| Fonte do líquido B        | Define o valor padrão para o Líquido B.                                    | Solução salina, Outro   |
| Unidades de altura        | Define as unidades de medida para a altura do paciente.                    | centímetro, polegada  |
| Confirmação dos dados     | Ativa e desativa o recurso de confirmação dos dados.                       | Ligado, Desligado   |

4. Pressione **OK**.
5. Uma mensagem é exibida. Pressione **Sim** para confirmar as alterações ou pressione **Não** para voltar para Configuração de informática.

## 6.2 Configuração de valores padrão do painel de informática

### 6.2.1 Ativar ou desativar a exibição do painel de informática

1. No menu inicial da Estação de Trabalho Certegra, selecione **Configuração de informática**.
2. Pressione **Painel de informática** (Figura 6 - 4: Item de configuração do painel de informática).

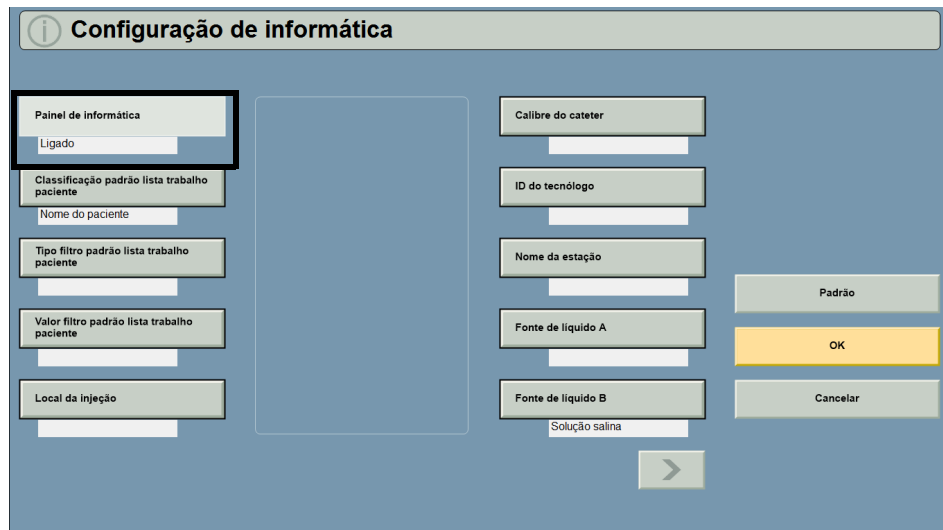


Figura 6 - 4: Item de configuração do painel de informática

3. Pressione o botão **Ligado** ou **Desligado** para ativar ou desativar o Painel de informática, respectivamente.
4. Pressione **OK** para salvar as alterações.

## 6.2.2 Criar uma configuração padrão para as categorias com valores específicos

1. No menu inicial da Estação de Trabalho Certegra, selecione **Configuração de informática**.
2. Selecione uma das categorias para definir um valor padrão.
3. Selecione o valor padrão desejado.
4. Pressione **OK** para salvar as alterações.

## 6.2.3 Criar uma configuração padrão para as categorias com listas criadas pelo usuário

1. No menu inicial da Estação de Trabalho Certegra, selecione **Configuração de informática**.
2. Selecione uma das categorias para definir um valor padrão.
3. Use as setas **Para cima** ou **Para baixo** para percorrer os valores exibidos.
4. Selecione e destaque um valor para se tornar a configuração padrão.
5. Pressione **Definir como padrão**.
6. Pressione **OK** para salvar as alterações.
7. Pressione **Sim** para confirmar as alterações.

## 6.3 Configuração de listas criadas pelo usuário nas categorias

### 6.3.1 Reorganizar os valores de uma lista criada pelo usuário

1. No menu inicial da Estação de Trabalho Certegra, selecione **Configuração de informática**.
2. Selecione uma categoria. Por exemplo, "Calibre do cateter" é selecionado em Figura 6 - 5: Lista de valores criada pelo usuário.

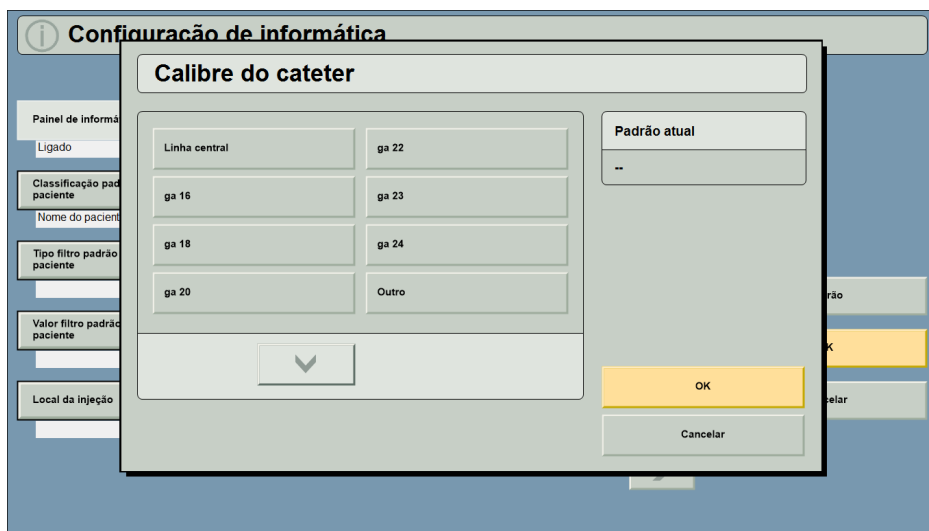


Figura 6 - 5: Lista de valores criada pelo usuário



3. Selecione um valor na lista a ser movido. Por exemplo, "ga 18" é selecionado em Figura 6 - 6: Mover valor para cima ou para baixo na lista.

**NOTA:** Se o valor correto não for mostrado, mas aparecerem setas, pressione a seta **Para cima** ou **Para baixo** para mostrar entradas adicionais.

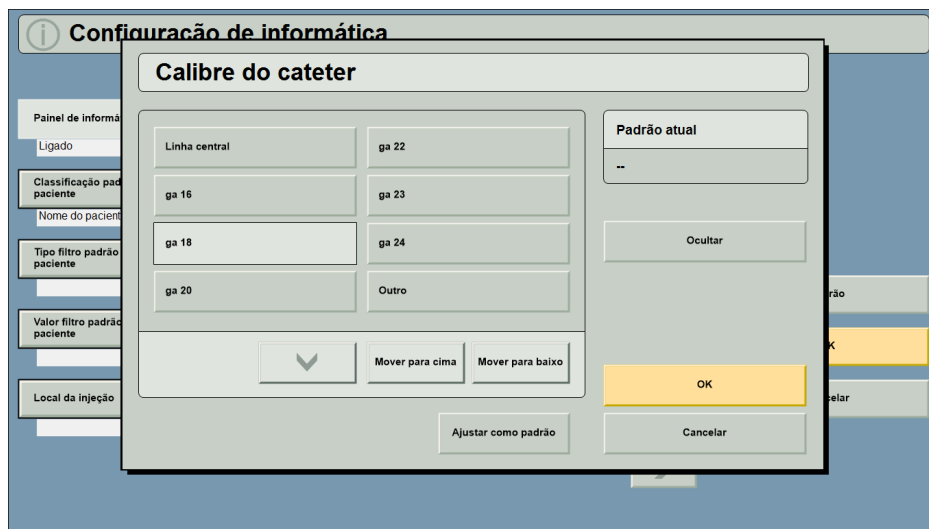


Figura 6 - 6: Mover valor para cima ou para baixo na lista

4. Pressione **Mover para cima** ou **Mover para baixo** para mover o valor na lista.
5. Pressione **OK** para fazer a alteração.
6. Pressione **Sim** para confirmar a alteração.

### 6.3.2 Adicionar um valor a uma lista criada pelo usuário

1. No menu inicial da Estação de Trabalho Certegra, selecione **Configuração de informática**.
2. Selecione uma das categorias para adicionar um valor.
3. Pressione **Adicionar novo**.
4. Insira os dados do novo valor.
5. Pressione **OK** para fazer a alteração.
6. Pressione **Sim** para confirmar a alteração.

### 6.3.3 Excluir um valor em uma lista criada pelo usuário

1. No menu inicial da Estação de Trabalho Certegra, selecione **Configuração de informática**.
2. Selecione uma das categorias para excluir um valor.
3. Selecione o valor aplicável a ser excluído.
4. Pressione **Excluir**.
5. Pressione **Sim** para confirmar a alteração.

### 6.3.4 Ocultar ou mostrar um valor em uma lista criada pelo usuário

1. No menu inicial da Estação de Trabalho Certegra, selecione **Configuração de informática**.
2. Selecione uma das categorias para ocultar ou mostrar um valor.
3. Selecione o valor aplicável.
4. Selecione **Ocultar** ou **Mostrar**.
5. Pressione **Sim** para confirmar a alteração.

## 7 Confirmação dos dados

Use o recurso Confirmação de dados para revisar, editar e confirmar dados de exame de informática pós-injeção e garantir que as informações corretas sejam capturadas como parte do registro eletrônico do paciente e, se configurado, enviadas para sistemas externos.

**NOTA:** Somente usuários do MEDRAD® MRXperion: Esse recurso deve estar ativado para que o Teste de injeção e os volumes de KVO sejam registrados, além dos dados do exame da Informática e dos dados da injeção.

### 7.1 Ativação da confirmação dos dados

Para ativar Confirmação de dados, configure o botão Confirmação de dados como **Ligado** em Configuração da Informática. Consulte 6.1 - Visão geral da configuração para obter mais informações. Por padrão, Confirmação de dados não está ativado.

### 7.2 Tela Confirmação dos dados

Se Confirmação de dados estiver ativado, a tela Injeção concluída será exibida com o botão Analisar dados quando uma injeção for concluída (Figura 7 - 1: Tela Injeção concluída - Analisar dados).

The screenshot displays the 'Injeção concluída' (Injection completed) screen. The interface is divided into several sections:

- Header:** Shows a checkmark, 'Injeção concluída', a timer at '00:00:48', and the role 'Gerente de protocolo'.
- Left Panel:** Contains patient information (ID, Data nasc., Peso), procedure details (Procedimento, Acesso), liquid types (Líquidos: Liq. A, Liq. B), events (Eventos), and a patient work list (Lista de trabalho do paciente).
- Main Content Area:**
  - Dados de procedimento:** Limite de pressão (psi) 325, Concentração de iodo (mg/ml) 0.
  - Protocolo\*:** A table with columns for flow rate (ml/s), volume (ml), and time (mm:ss). It shows two rows: A (1,0 ml/s, 10 ml, 00:10) and B (1,0 ml/s, 10 ml, 00:10).
  - Totais:** Duração (hh:mm:ss) 00:00:30. A summary table shows Solução salina (ml) 10,0 and Contraste (ml) 10,0. Iodo (g) is 0.
- Right Panel:** Contains a 'Resumo' button and a 'Gráfico' button. At the bottom, the 'Analisar dados' button is highlighted with a black box.

Figura 7 - 1: Tela Injeção concluída - Analisar dados

Selecione o botão **Analisar dados** para abrir a tela Confirmação dos dados (Figura 7 - 2: Tela Confirmação dos dados).

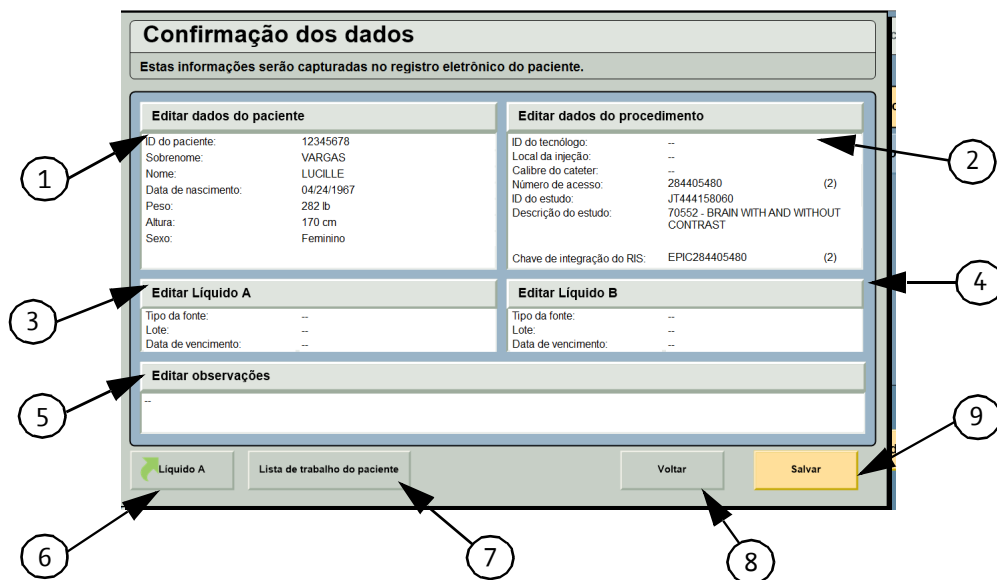


Figura 7 - 2: Tela Confirmação dos dados

Tabela 7 - 1: Áreas de informação de Confirmação de dados

| Número | Nome                                | Descrição   |
|--------|-------------------------------------|---|
| 1      | Dados do paciente                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra os dados do paciente para o exame.</li> <li>Permite o acesso à guia Paciente para a edição dos dados.</li> <li>Consulte 4.7.2 - Guia Paciente para obter mais informações.</li> </ul>   |
| 2      | Dados de procedimento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra os dados do procedimento para o exame.</li> <li>Permite o acesso à guia Procedimento para a edição dos dados.</li> <li>Consulte 4.7.3 - Guia Procedimento para obter mais informações.</li> </ul>                                 |
| 3      | Dados do Líquido A                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra os dados do líquido A para o exame.</li> <li>Permite acessar as duas guias de líquido, Líquido A e Líquido B, para editar os dados.</li> <li>Consulte 4.7.4 - Guias Líquido A e Líquido B para obter mais informações.</li> </ul> |
| 4      | Dados do Líquido B                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra os dados do líquido B para o exame.</li> <li>Permite acessar as duas guias de líquido, Líquido A e Líquido B, para editar os dados.</li> <li>Consulte 4.7.4 - Guias Líquido A e Líquido B para obter mais informações.</li> </ul> |
| 5      | Observações                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra as observações para o exame.</li> <li>Permite o acesso à guia Observações para a edição dos dados.</li> <li>Consulte 4.7.5 - Guia Observações para obter mais informações.</li> </ul>   |
| 6      | Botão Líquido A                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recupera dados de contraste a partir dos últimos dados de contraste lidos ou inseridos manualmente.</li> <li>Consulte 7.3.2 - Recuperar dados de contraste (botão Líquido A) para obter mais informações.</li> </ul>                     |
| 7      | Botão Lista de trabalho do paciente | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permite o acesso para alterar o paciente e/ou o estudo.</li> <li>Consulte 5.4.1 - Lista de trabalho principal de pacientes para obter mais informações.</li> </ul>   |

Tabela 7 - 1: Áreas de informação de Confirmação de dados

| Número | Nome         | Descrição   |
|--------|--------------|---|
| 8      | Botão Voltar | <ul style="list-style-type: none"> <li>Retorna o sistema para a tela Injeção concluída (Figura 7 - 1: Tela Injeção concluída - Analisar dados). A tela Injeção concluída exibe o botão Analisar dados.</li> </ul>   |
| 9      | Botão Salvar | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registra os dados do exame atual, bem como dados de injeção, no registro eletrônico do paciente e, se configurado, envia as informações aplicáveis para sistemas externos.</li> <li>Sai da tela Confirmação de dados e retorna o sistema para a tela Injeção concluída (Figura 7 - 3: Tela Injeção concluída - Próxima injeção). A tela Injeção concluída exibe os botões Mesmo paciente e Novo paciente.</li> </ul> |

Depois que **Salvar** é selecionado na tela Confirmação de dados, a tela Injeção concluída é exibida com os botões Mesmo paciente e Novo paciente (Figura 7 - 3: Tela Injeção concluída - Próxima injeção).

**NOTA:** Assim que **Salvar** é selecionado na tela Confirmação de dados, é necessário fazer outras modificações nos dados do paciente usando a função Editar no Data Manager. Consulte 11.6.3 - Editar injeção para obter mais informações.

Selecione **Mesmo paciente** para iniciar a próxima injeção com o mesmo paciente ou selecione **Novo paciente** para iniciar a próxima injeção com um novo paciente.

Figura 7 - 3: Tela Injeção concluída - Próxima injeção

### 7.3 Atualização das informações do exame usando Confirmação de dados

**NOTA:** Para atualizar as informações do exame usando Confirmação de dados, selecione cabeçalhos ou subseções para abrir a guia do campo selecionado. Para obter mais informações sobre a atualização desses campos, consulte a seção aplicável em 4 - Painel de informática.

**NOTA:** Para esclarecer duas funções com nomes semelhantes, a seção 7.3.1 - Atualizar dados do paciente descreve como atualizar os dados do paciente e a seção 7.3.3 - Atualizar a seleção da Lista de trabalho de pacientes descreve como selecionar um novo paciente na Lista de trabalho de pacientes.

### 7.3.1 Atualizar dados do paciente

- NOTA:** Para alterar o paciente ou estudo exibido, consulte 7.3.3 - Atualizar a seleção da Lista de trabalho de pacientes.
- NOTA:** Os campos obrigatórios não preenchidos são exibidos com texto vermelho. Consulte 9 - Campos obrigatórios para obter mais informações sobre os campos obrigatórios.
- NOTA:** As informações do paciente e do estudo exibidas na janela Confirmação de dados podem ser atualizadas usando o leitor de código de barras acessório. Consulte 14.2.2 - Leitura de códigos de barras pós-injeção para obter mais informações.

Para atualizar as informações do exame usando Confirmação de dados:

1. Selecione o campo Editar dados do paciente (Figura 7 - 4: Editar dados do paciente).

**Confirmação dos dados**  
Estas informações serão capturadas no registro eletrônico do paciente.

| Editar dados do paciente |            | Editar dados do procedimento |   |
|--------------------------|------------|------------------------------|---|
| ID do paciente:          | 12345678   | ID do tecnólogo:             | --                                      |
| Sobrenome:               | VARGAS     | Local da injeção:            | --                                      |
| Nome:                    | LUCILLE    | Calibre do cateter:          | --                                      |
| Data de nascimento:      | 04/24/1967 | Número de acesso:            | 284405480 (2)                           |
| Peso:                    | 282 lb     | ID do estudo:                | JT444158060                             |
| Altura:                  | 170 cm     | Descrição do estudo:         | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST |
| Sexo:                    | Feminino   | Chave de integração do RIS:  | EPIC284405480 (2)                       |

| Editar Líquido A    |    | Editar Líquido B    |    |
|---------------------|----|---------------------|----|
| Tipo da fonte:      | -- | Tipo da fonte:      | -- |
| Lote:               | -- | Lote:               | -- |
| Data de vencimento: | -- | Data de vencimento: | -- |

**Editar observações**  
--

Figura 7 - 4: Editar dados do paciente

2. A guia Paciente é exibida. Atualize os campos como desejar.
3. Selecione **OK** para aceitar as alterações.
4. As informações do paciente atualizadas são exibidas na tela Confirmação de dados.

**Confirmação dos dados**  
Estas informações serão capturadas no registro eletrônico do paciente.

| Editar dados do paciente |            | Editar dados do procedimento |   |
|--------------------------|------------|------------------------------|---|
| ID do paciente:          | 12345678   | ID do tecnólogo:             | --                                      |
| Sobrenome:               | VARGAS     | Local da injeção:            | --                                      |
| Nome:                    | LUCILLE    | Calibre do cateter:          | --                                      |
| Data de nascimento:      | 04/24/1967 | Número de acesso:            | 284405480 (2)                           |
| Peso:                    | 282 lb     | ID do estudo:                | JT444158060                             |
| Altura:                  | 170 cm     | Descrição do estudo:         | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST |
| Sexo:                    | Feminino   | Chave de integração do RIS:  | EPIC284405480 (2)                       |

| Editar Líquido A    |    | Editar Líquido B    |    |
|---------------------|----|---------------------|----|
| Tipo da fonte:      | -- | Tipo da fonte:      | -- |
| Lote:               | -- | Lote:               | -- |
| Data de vencimento: | -- | Data de vencimento: | -- |

**Editar observações**  
--

Figura 7 - 5: Tela Confirmação de dados atualizada

5. Selecione **Salvar** para salvar as alterações feitas e voltar para a tela Injeção concluída.

### 7.3.2 Recuperar dados de contraste (botão Líquido A)

Use o botão Líquido A em Confirmação de dados para recuperar dados de contraste para a injeção concluída. O botão Líquido A armazena os últimos dados de contraste lidos ou inseridos manualmente.

1. Selecione **Líquido A** (Figura 7 - 6: Botão Líquido A em Confirmação de dados).

**Confirmação dos dados**  
Estas informações serão capturadas no registro eletrônico do paciente.

| Editar dados do paciente |            | Editar dados do procedimento |   |
|--------------------------|------------|------------------------------|---|
| ID do paciente:          | 12345678   | ID do tecnólogo:             | --                                      |
| Sobrenome:               | VARGAS     | Local da injeção:            | --                                      |
| Nome:                    | LUCILLE    | Calibre do cateter:          | --                                      |
| Data de nascimento:      | 04/24/1967 | Número de acesso:            | 284405480 (2)                           |
| Peso:                    | 282 lb     | ID do estudo:                | JT444158060                             |
| Altura:                  | 170 cm     | Descrição do estudo:         | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST |
| Sexo:                    | Feminino   | Chave de integração do RIS:  | EPIC284405480 (2)                       |

| Editar Líquido A    |    | Editar Líquido B    |    |
|---------------------|----|---------------------|----|
| Tipo da fonte:      | -- | Tipo da fonte:      | -- |
| Lote:               | -- | Lote:               | -- |
| Data de vencimento: | -- | Data de vencimento: | -- |

Editar observações  
--

**Líquido A**    Lista de trabalho do paciente    Voltar    Salvar

Figura 7 - 6: Botão Líquido A em Confirmação de dados

2. A janela Líquido A exibe os últimos dados de contraste lidos ou inseridos manualmente (Figura 7 - 7: Janela Líquido A).

**Líquido A**  
Confirmar seleção

|            |                     |                |
|------------|---------------------|----------------|
| Origem     | ULTRAVIST 370 50 ml | OK<br>Cancelar |
| Lote       | ABCD1239            |                |
| Vencimento | 09/09/2016          |                |

Figura 7 - 7: Janela Líquido A

3. Selecione **OK** para confirmar a seleção das informações de contraste exibidas ou selecione **Cancelar** para cancelar a operação e voltar para Confirmação de dados.
4. Selecione **Salvar** para salvar as alterações feitas e voltar para a tela Injeção concluída.

### 7.3.3 Atualizar a seleção da Lista de trabalho de pacientes

Para alterar o paciente e/ou estudo usando Confirmação de dados:

1. Selecione **Lista de trabalho do paciente** (Figura 7 - 8: Botão Lista de trabalho do paciente).

**Confirmação dos dados**  
Estas informações serão capturadas no registro eletrônico do paciente.

| Editar dados do paciente |            | Editar dados do procedimento |   |
|--------------------------|------------|------------------------------|---|
| ID do paciente:          | 12345678   | ID do tecnólogo:             | --                                      |
| Sobrenome:               | VARGAS     | Local da injeção:            | --                                      |
| Nome:                    | LUCILLE    | Calibre do cateter:          | --                                      |
| Data de nascimento:      | 04/24/1967 | Número de acesso:            | 284405480 (2)                           |
| Peso:                    | 282 lb     | ID do estudo:                | JT444158060                             |
| Altura:                  | 170 cm     | Descrição do estudo:         | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST |
| Sexo:                    | Feminino   | Chave de integração do RIS:  | EPIC284405480 (2)                       |

| Editar Líquido A    |    | Editar Líquido B    |    |
|---------------------|----|---------------------|----|
| Tipo da fonte:      | -- | Tipo da fonte:      | -- |
| Lote:               | -- | Lote:               | -- |
| Data de vencimento: | -- | Data de vencimento: | -- |

**Editar observações**  
--

Figura 7 - 8: Botão Lista de trabalho do paciente

2. A tela Lista de trabalho de pacientes é exibida. Selecione o item de lista de trabalho apropriado.
3. As informações do paciente recém-selecionadas são exibidas na tela Confirmação de dados.

**Confirmação dos dados**  
Estas informações serão capturadas no registro eletrônico do paciente.

| Editar dados do paciente |            | Editar dados do procedimento |   |
|--------------------------|------------|------------------------------|---|
| ID do paciente:          | 12345678   | ID do tecnólogo:             | --                                      |
| Sobrenome:               | VARGAS     | Local da injeção:            | --                                      |
| Nome:                    | LUCILLE    | Calibre do cateter:          | --                                      |
| Data de nascimento:      | 04/24/1967 | Número de acesso:            | 284405480 (2)                           |
| Peso:                    | 282 lb     | ID do estudo:                | JT444158060                             |
| Altura:                  | 170 cm     | Descrição do estudo:         | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST |
| Sexo:                    | Feminino   | Chave de integração do RIS:  | EPIC284405480 (2)                       |

| Editar Líquido A    |    | Editar Líquido B    |    |
|---------------------|----|---------------------|----|
| Tipo da fonte:      | -- | Tipo da fonte:      | -- |
| Lote:               | -- | Lote:               | -- |
| Data de vencimento: | -- | Data de vencimento: | -- |

**Editar observações**  
--

Figura 7 - 9: Confirmação dos dados de Informática

4. Selecione **Salvar** para salvar as alterações feitas e voltar para a tela Injeção concluída.



### 7.3.3.1 Atualizar a seleção de Lista de trabalho de pacientes usando Paciente anônimo

Use o botão Paciente anônimo para inserir um nome de paciente pré-determinado como placeholder quando não houver informações do paciente disponíveis. Pressionar o botão Paciente anônimo preenche os campos de nome e sobrenome com valores pré-determinados (por exemplo, "John Doe") e apaga outros campos específicos.

**NOTA:** Para configurar valores de Paciente anônimo, consulte 11.10.1 - Ativar e configurar paciente anônimo.

Para inserir um paciente anônimo para uma injeção:

**NOTA:** O paciente anônimo também pode ser selecionado antes da injeção usando o painel de informática. Consulte 5.1.2 Inserção de paciente anônimo para uma injeção de contraste para obter mais informações.

1. Selecione **Lista de trabalho de pacientes** na tela inicial da Estação de Trabalho Certegra.
2. Uma chamada ativa é feita para o servidor da Lista de trabalho de modalidade da instalação. As entradas resultantes são exibidas na tela Lista de trabalho de pacientes.
3. Selecione o botão **Paciente anônimo**.
4. O sistema retorna para a janela Confirmação de dados. O campo Editar dados do paciente é preenchido com um nome e sobrenome pré-determinados.
5. Selecione **Salvar** para salvar as alterações feitas e voltar para a tela Injeção concluída.



## 8 Gerenciador Certegra

O Gerenciador Certegra é um recurso da plataforma Certegra que gerencia aplicativos de gerenciamento de dados e configurações de acessórios.

### 8.1 Login do Gerenciador Certegra

Faça login no Gerenciador Certegra para acessar os recursos listados em Tabela 8 - 2: Recursos e funções do Gerenciador Certegra.

**NOTA:** O acesso ao Gerenciador Certegra é restrito a usuários autorizados. É necessário inserir um nome de usuário e uma senha válidos para fazer login. Depois de conectado, você pode acessar todas as funções do Gerenciador Certegra.


1. Abra um navegador compatível em um computador que esteja na mesma rede da Estação de Trabalho Certegra.
2. Abra o URL do Gerenciador Certegra.

**NOTA:** Se necessário, entre em contato com a equipe de manutenção ou um representante local designado para obter o URL.

3. Faça login no Gerenciador Certegra (Figura 8 - 1: Login do Gerenciador Certegra). Consulte as credenciais de login fornecidas pela equipe de manutenção.

Gerenciador Certegra

|                   |          |                  |           |        |         |           |         |
|-------------------|----------|------------------|-----------|--------|---------|-----------|---------|
| Nome da injetora: | Injector | Tipo de injetor: | Siellant2 | Suíte: | Default | Hospital: | Default |
|-------------------|----------|------------------|-----------|--------|---------|-----------|---------|



Nome do usuário

Senha


**Figura 8 - 1: Login do Gerenciador Certegra**

**NOTA:** Para recuperar as credenciais de login, entre em contato com a equipe de manutenção.

**NOTA:** Se a inserção do nome de usuário ou da senha for ignorada antes de **Login** ser selecionado, a mensagem de campo obrigatório será exibida e não será mais possível selecionar o botão Login.

**NOTA:** Se o nome de usuário ou a senha não for reconhecido, uma mensagem de erro será exibida. Entre em contato com a equipe de manutenção ou um representante local designado.

4. A página inicial é exibida (Figura 8 - 2: Página inicial do Gerenciador Certegra).

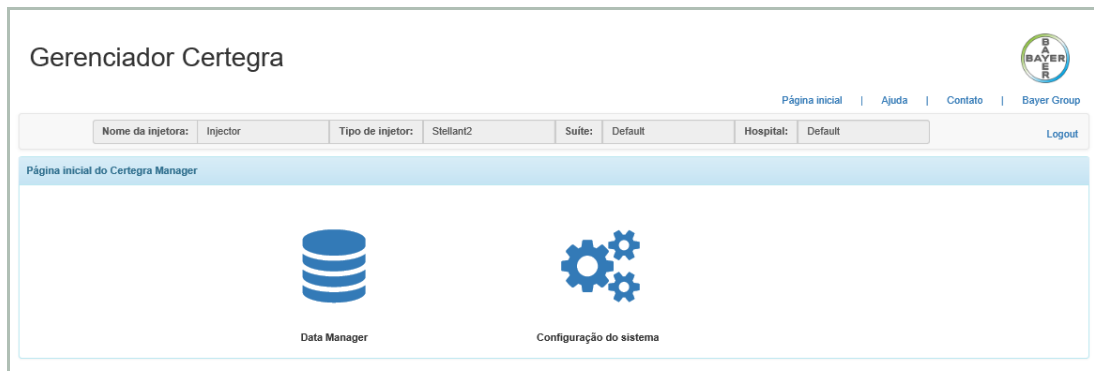

**Figura 8 - 2: Página inicial do Gerenciador Certegra**

**NOTA:** Revise a barra de informações na parte superior da tela para verificar se a injetora e a modalidade corretos estão exibidos.

**NOTA:** É necessário ter uma licença para operar alguns recursos no Gerenciador Certegra. Se nenhuma licença for encontrada, os ícones serão desativados e uma mensagem de erro será exibida.

## 8.2 Especificações de compatibilidade

O Gerenciador Certegra é compatível com:

- ◆ Microsoft IE9 (Internet Explorer versão 9) e posterior
- ◆ Mozilla Firefox versão 14 e posterior

## 8.3 Funções e acesso

As funções de usuário e o acesso a determinadas funções do Gerenciador Certegra são definidos em Tabela 8 - 1: Funções e acesso do usuário ao Gerenciador Certegra.

**Tabela 8 - 1: Funções e acesso do usuário ao Gerenciador Certegra**

| Recurso do Gerenciador Certegra  | Administração de usuário | Usuário    |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Data Manager                     | Acessar                  | Acessar    |
| Configuração do código de barras | Acessar                  | Sem acesso |
| Campos obrigatórios              | Acessar                  | Sem acesso |
| Paciente anônimo                 | Acessar                  | Sem acesso |
| Nº de múltiplo acesso            | Acessar                  | Sem acesso |

## 8.4 Navegação do Gerenciador Certegra

Os recursos do Gerenciador Certegra são definidos em Tabela 8 - 2: Recursos e funções do Gerenciador Certegra.

**Tabela 8 - 2: Recursos e funções do Gerenciador Certegra**

| Opções da página inicial | Recursos e funções   |
|--------------------------|--|
| Data Manager             | <b>Data Manager:</b> Permite que a equipe do hospital realize atividades de gerenciamento de dados a partir de um sistema de injeção compatível quando uma injeção é concluída. Consulte 11 - Data Manager.  |
| Configuração do sistema  | Os seguintes recursos estão listados em Configuração do sistema (Figura 8 - 3: Opções de configuração do sistema): <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Campos obrigatórios:</b> Exige que as informações do paciente, procedimento, líquido e/ou observações sejam inseridas para cada registro de injeção. Consulte 9 - Campos obrigatórios.</li> <li>◆ <b>Configuração do código de barras:</b> Define e gerencia os parâmetros de código de barras para o leitor de código de barras. Consulte 13 - Configuração do código de barras.</li> <li>◆ <b>Paciente anônimo:</b> Define um placeholder de nome de paciente quando as informações reais do paciente não estão disponíveis. Consulte 11.10 - Paciente anônimo.</li> <li>◆ <b>Nº de múltiplo acesso:</b> Ativa a atribuição de mais de um número de acesso a uma injeção. Consulte 10 - Nº de múltiplo acesso.</li> </ul> |



**Figura 8 - 3: Opções de configuração do sistema**

A barra de informações na parte superior da tela exibe a injetora e a modalidade selecionados (Figura 8 - 4: Barra de informações).



**Figura 8 - 4: Barra de informações**

Para navegar pelos recursos no Gerenciador Certegra, use os menus suspensos localizados na barra de informações. Por exemplo, os menus suspensos de Configuração do código de barras são exibidos em Figura 8 - 5: Menus suspensos.

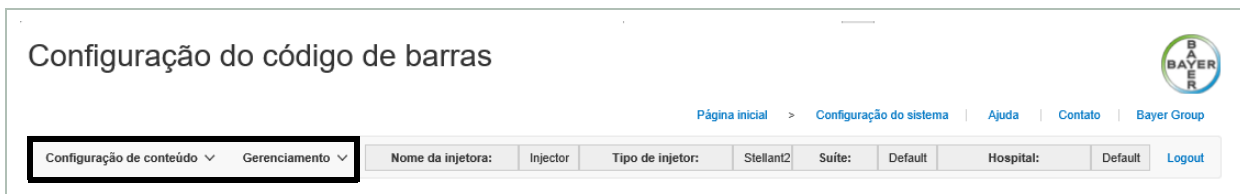


Figura 8 - 5: Menus suspensos

Selecione alguma opção para abrir um menu suspenso e ver uma lista de funções adicionais. Por exemplo, Configuração do paciente/estudo é selecionado no menu suspenso Configuração de conteúdo em Figura 8 - 6: Opções de menu suspenso.

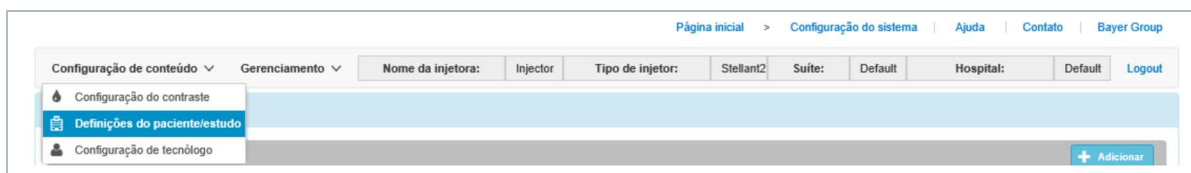


Figura 8 - 6: Opções de menu suspenso

### 8.4.1 Página de ajuda

Use a página de ajuda para visualizar e baixar o manual de operação do sistema de injeção de contraste para TC Stellant FLEX da MEDRAD® com Estação de Trabalho Certegra®.

1. Selecione **Ajuda** em qualquer página do Gerenciador Certegra (Figura 8 - 7: Página de ajuda).


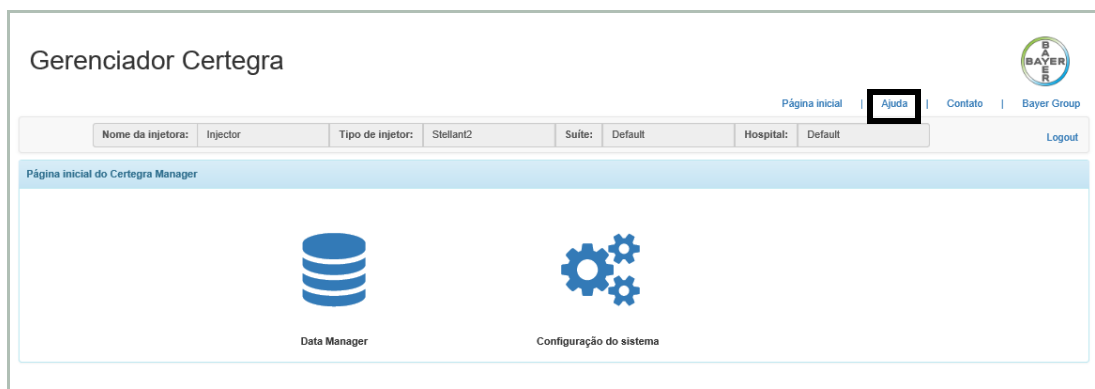


Figura 8 - 7: Página de ajuda

2. Uma nova janela é exibida com uma lista de idiomas do manual de operação (Figura 8 - 8: Lista de idiomas do manual de operação).

Gerenciador Certegra

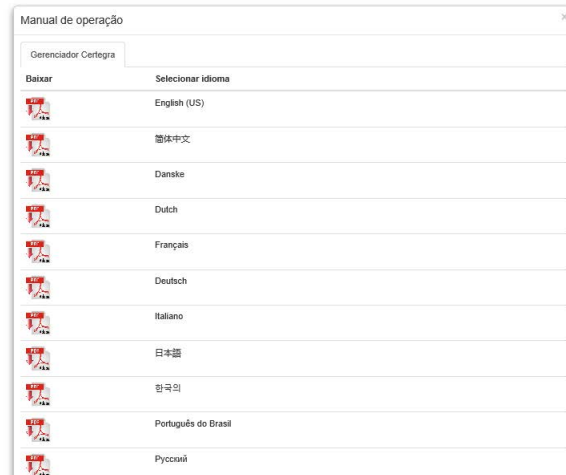

**Figura 8 - 8: Lista de idiomas do manual de operação**

3. Para salvar ou ver o manual de operação, selecione o botão PDF ao lado do idioma apropriado.
4. Uma janela separada é aberta com o manual de operação apropriado.
5. Para retornar para a página Gerenciar injeções, selecione **X** no canto da tela ou feche a janela.





## 9 Campos obrigatórios

Use Campos obrigatórios para exigir que as informações do paciente, procedimento, líquido e/ou observações sejam inseridas para cada registro de injeção.

**NOTA:** A ativação de Campos obrigatórios ativa o painel Informática e a Confirmação de dados. A desativação de Campos obrigatórios não desativa nenhum reforço. Para obter mais informações sobre o painel Informática, consulte 4 - Painel de informática. Para obter mais informações sobre Confirmação de dados, consulte 7 - Confirmação dos dados.

### 9.1 Configuração e instalação

#### 9.1.1 Login

Os parâmetros de campo obrigatório são gerenciados em Campos obrigatórios. Faça login no Gerenciador Certegra para acessar Campos obrigatórios, listado em Configurações do sistema. Se você já estiver conectado ao Gerenciador Certegra, pule para a etapa 2.

1. Faça login no Gerenciador Certegra. Consulte 8.1 - Login do Gerenciador Certegra para obter instruções.
2. Selecione **Configuração do sistema**.
3. Selecione **Campos obrigatórios**.
4. A página Configurações de campos obrigatórios é exibida (Figura 9 - 1: Opções de configuração de campos obrigatórios).

Figura 9 - 1: Opções de configuração de campos obrigatórios

#### 9.1.2 Ativar campos obrigatórios

1. Faça login no Gerenciador Certegra e navegue até a página Campos obrigatórios. Consulte 9.1.1 - Login para obter instruções.
2. Para ativar Campos obrigatórios, marque a caixa de seleção ao lado de **Ativar campos obrigatórios** até aparecer a marca de verificação (Figura 9 - 2: Ativar campos obrigatórios).

Figura 9 - 2: Ativar campos obrigatórios

**NOTA:** Para desativar Campos obrigatórios, marque a caixa de seleção ao lado de Ativar campos obrigatórios até a marca de verificação desaparecer.

### 9.1.3 Configurações de campos obrigatórios

1. Faça login no Gerenciador Certegra e navegue até a página Campos obrigatórios. Consulte 9.1.1 - Login para obter instruções.
2. Defina as configurações de campo obrigatório. Em cada categoria, marque a caixa de seleção ao lado dos campos apropriados. Consulte Tabela 9 - 1: Opções de configuração de campos obrigatórios para obter uma lista de todos os campos obrigatórios.

**Tabela 9 - 1: Opções de configuração de campos obrigatórios**

| <b>Categorias</b>            | <b>Campos obrigatórios específicos</b>   |
|------------------------------|--|
| Informações do paciente      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Nome</li> <li>◆ Sobrenome</li> <li>◆ ID paciente</li> <li>◆ Data de nascimento do paciente</li> <li>◆ Altura do paciente</li> <li>◆ Peso do paciente</li> <li>◆ Sexo do paciente</li> </ul> |
| Informações do estudo        | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ID do estudo</li> <li>◆ Descrição do estudo</li> <li>◆ Número de acesso</li> <li>◆ Chave de integração do RIS</li> </ul>  |
| Informações de injeção       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ID tecn.</li> <li>◆ Calibre do cateter</li> <li>◆ Local da injeção</li> </ul>   |
| Líquido A (contraste)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tipo da fonte (marca)</li> <li>◆ Lote/Remessa</li> <li>◆ Data de vencimento</li> </ul>  |
| Líquido B (soro fisiológico) | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tipo da fonte (marca)</li> <li>◆ Lote/Remessa</li> <li>◆ Data de vencimento</li> </ul>  |
| Observações                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Observações</li> </ul>  |

3. Selecione **Salvar** para salvar as alterações ou **Cancelar** para cancelá-las.

## 9.2 Uso de campos obrigatórios

### 9.2.1 Campos obrigatórios pré-injeção (painel de informática)

Na tela inicial da Estação de Trabalho Certegra, asteriscos brancos ao lado das informações de paciente, procedimento e/ou líquido indicam um campo obrigatório que está sem as informações necessárias.

**NOTA:** Deixar os campos obrigatórios em branco não impede que a injetora seja armada nem que a injeção seja iniciada e concluída.

Para adicionar informações a um campo obrigatório pré-injeção usando o painel de informática:

1. Selecione a área aplicável no painel de informática (Figura 9 - 3: Painel de informática - Campos obrigatórios ausentes).

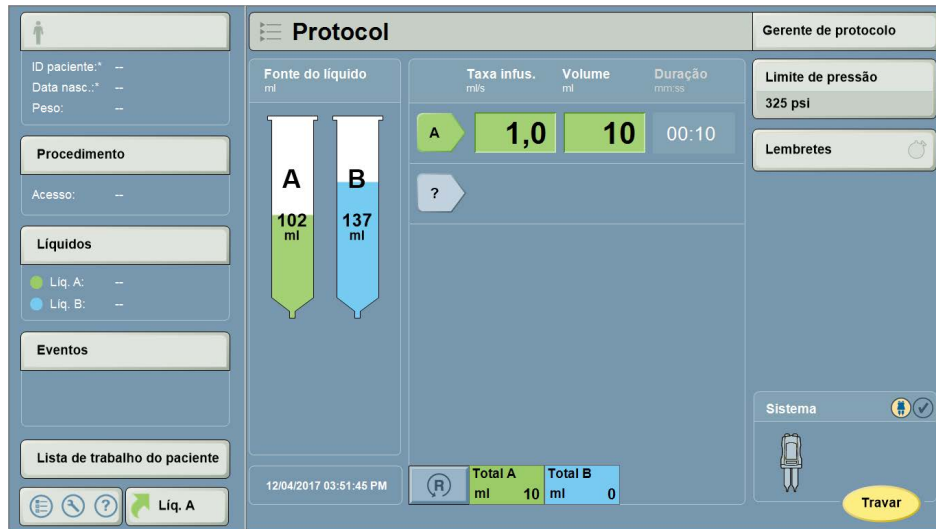


Figura 9 - 3: Painel de informática - Campos obrigatórios ausentes

2. A guia do campo selecionado é exibida com os campos obrigatórios que faltam indicados por um asterisco e destacados em vermelho (Figura 9 - 4: Campos obrigatórios ausentes).

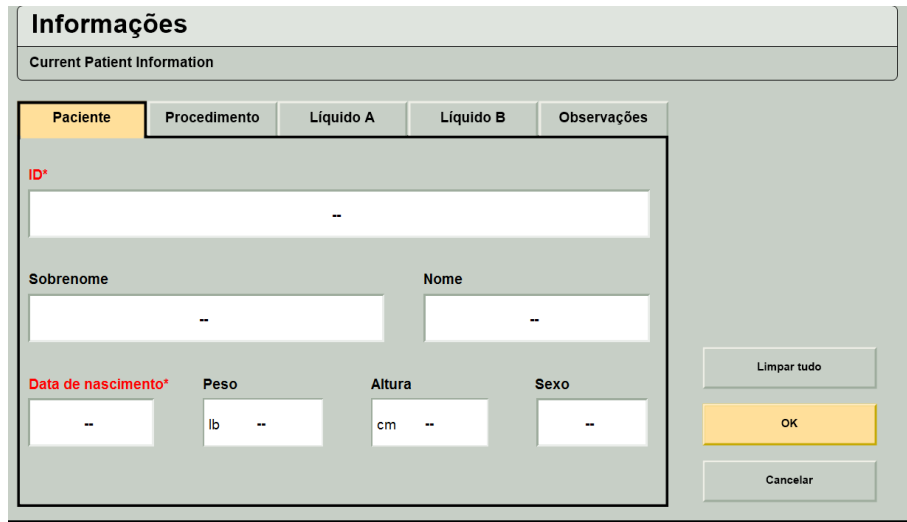


Figura 9 - 4: Campos obrigatórios ausentes

3. Atualize os campos obrigatórios ausentes. Consulte 4 - Painel de informática para obter mais informações sobre como adicionar e editar informações de paciente, procedimento e líquido.
4. Pressione **OK** para aceitar as alterações feitas ou pressione **Cancelar** para todas elas.
5. Selecione **Salvar** para salvar as alterações feitas nas informações de paciente, procedimento e/ou líquido e voltar para a tela inicial da Estação de Trabalho Certegra.

## 9.2.2 Campos obrigatórios pós-injeção (Confirmação de dados)

Se Confirmação de dados estiver ativado, a tela Injeção concluída será exibida com o botão Analisar dados quando uma injeção for concluída. Selecione o botão **Analisar dados** para abrir a tela Confirmação de dados.

**Confirmação dos dados**  
Estas informações serão capturadas no registro eletrônico do paciente.

| Editar dados do paciente |            | Editar dados do procedimento |   |
|--------------------------|------------|------------------------------|---|
| ID do paciente:          | 12345678   | ID do tecnólogo:             | --                                      |
| Sobrenome:               | VARGAS     | Local da injeção:            | --                                      |
| Nome:                    | LUCILLE    | Calibre do cateter:          | --                                      |
| Data de nascimento:      | 04/24/1967 | Número de acesso:            | 284405480 (2)                           |
| Peso:                    | 282 lb     | ID do estudo:                | JT444158060                             |
| Altura:                  | 170 cm     | Descrição do estudo:         | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST |
| Sexo:                    | Feminino   | Chave de integração do RIS:  | EPIC284405480 (2)                       |

| Editar Líquido A    |    | Editar Líquido B    |    |
|---------------------|----|---------------------|----|
| Tipo da fonte:      | -- | Tipo da fonte:      | -- |
| Lote:               | -- | Lote:               | -- |
| Data de vencimento: | -- | Data de vencimento: | -- |

**Editar observações**  
--

Figura 9 - 5: Tela Confirmação dos dados

Na tela Confirmação de dados, asteriscos e textos vermelhos indicam campos obrigatórios que estão sem as informações necessárias (Figura 9 - 6: Campos obrigatórios ausentes).

**NOTA:** O botão Salvar fica desativado até todos os campos obrigatórios serem preenchidos.

**Confirmação dos dados**  
Estas informações serão capturadas no registro eletrônico do paciente.

| Editar dados do paciente |      | Editar dados do procedimento |    |
|--------------------------|------|------------------------------|----|
| ID do paciente:*         | --   | ID do tecnólogo:             | -- |
| Sobrenome:               | --   | Local da injeção:            | -- |
| Nome:                    | --   | Calibre do cateter:          | -- |
| Data de nascimento:*     | --   | Número de acesso:            | -- |
| Peso:                    | --lb | ID do estudo:                | -- |
| Altura:                  | --cm | Descrição do estudo:         | -- |
| Sexo:                    | --   |                              |    |

| Editar Líquido A    |    | Editar Líquido B    |    |
|---------------------|----|---------------------|----|
| Tipo da fonte:      | -- | Tipo da fonte:      | -- |
| Lote:               | -- | Lote:               | -- |
| Data de vencimento: | -- | Data de vencimento: | -- |

**Editar observações**  
--

Figura 9 - 6: Campos obrigatórios ausentes

Para inserir informações ausentes em um campo obrigatório na tela Confirmação de dados:

1. Selecione o campo aplicável (Figura 9 - 7: Confirmação de dados - Campos obrigatórios ausentes).

Figura 9 - 7: Confirmação de dados - Campos obrigatórios ausentes

2. A guia do campo selecionado é exibida com os campos obrigatórios que faltam indicados por um asterisco e destacados em vermelho (Figura 9 - 8: Campos obrigatórios ausentes).

Figura 9 - 8: Campos obrigatórios ausentes

3. Atualize os campos obrigatórios ausentes. Consulte 4 - Painel de informática para obter mais informações sobre como adicionar e editar informações de paciente, procedimento e/ou líquido.
4. Pressione **OK** para aceitar as alterações feitas ou pressione **Cancelar** para todas elas.
5. Assim que todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, as informações do exame poderão ser salvas. Selecione **Salvar** para salvar as alterações feitas e voltar para a tela Confirmação de dados.



## 10 N° de múltiplo acesso

Use o n° de múltiplo acesso para atribuir mais de um número de acesso a uma injeção.

**NOTA:** A ativação do n° de múltiplo acesso ativa o painel Informática e a confirmação de dados. Desativar o n° de múltiplo acesso não desativa nenhum dos recursos.

### 10.1 Licenciamento

Uma licença é necessária para ativar o recurso do n° de múltiplo acesso. Entre em contato com a Bayer para obter mais informações.

### 10.2 Ativar

Faça login no Gerenciador Certegra para ativar o n° de múltiplo acesso nas Configurações do sistema.

1. Faça login no Gerenciador Certegra. Consulte 8.1 - Login do Gerenciador Certegra para obter instruções.
2. Selecione **Configuração do sistema**.
3. Selecione N° de múltiplo acesso.
4. Selecione a caixa de seleção para **ativar o n° de múltiplo acesso**.

### 10.3 Selecione os números de acesso

Os números de múltiplo acesso podem ser selecionados antes de iniciar ou após concluir a injeção. As etapas a seguir são aplicáveis a ambos os cenários.

#### 10.3.1 Selecione os números de acesso usando a lista de trabalho de pacientes

1. Selecione **Lista de trabalho de pacientes** na tela inicial da Estação de Trabalho Certegra ou na tela de confirmação dos dados.
2. Uma chamada ativa é feita para o servidor da Lista de trabalho de modalidade da instalação. As entradas resultantes são exibidas na tela Lista de trabalho de pacientes.
3. Selecione o paciente apropriado.
4. Se mais de um número de acesso estiver associado ao paciente, a tela de n° de múltiplo acesso é exibida com os números de acesso atribuídos ao paciente (Figura 10 - 1: N° de múltiplo acesso).

| LUCILLE VARGAS   |           |   |                     |                         |  |
|--|-----------|---|---------------------|-------------------------|--|
| Selecionar números de acesso associados a essa injeção |           |   |                     |                         |  |
|  | Acesso    | Descrição do estudo                       | Hora - Data         | Chave de integração RIS |  |
| <input type="checkbox"/>                               | 932135737 | 73702 - CTA LOWER EXTREMITY WITH AND ...  | 11:00 PM 03/10/2021 | EPIC932135737           |  |
| <input type="checkbox"/>                               | 831407014 | 71551 - CHEST WITH AND WITHOUT CONTRA...  | 05:00 AM 03/10/2021 | EPIC831407014           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                    | 825226125 | 71550 - CHEST WITHOUT CONTRAST            | 05:00 AM 03/10/2021 | EPIC825226125           |  |
| <input type="checkbox"/>                               | 284405480 | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST   | 05:00 AM 03/10/2021 | EPIC284405480           |  |
| <input type="checkbox"/>                               | 279486936 | 72196 - PELVIS WITH AND WITHOUT CONTRA... | 06:00 AM 03/10/2021 | EPIC279486936           |  |

Figura 10 - 1: N° de múltiplo acesso

5. Selecione o(s) número(s) de acesso aplicáveis e pressione **OK**.
6. Se um ou mais números de acesso estiverem selecionados, o número de números de acesso atribuídos à injeção será exibido entre parênteses, de acordo com o procedimento.

### 10.3.2 Selecione os números de acesso usando o leitor de código de barras acessório

Se um código de barras do MRN ou do número de acesso for digitalizado usando um leitor de código de barras acessório, será feita uma chamada ativa para o servidor da Lista de Trabalho de Modalidade da instalação para encontrar o registro do paciente aplicável. Se mais de um número de acesso estiver associado ao paciente, a tela de nº de múltiplo acesso aparece com os números de acesso vinculados ao paciente (Figura 10 - 1: N° de múltiplo acesso).

**NOTA:** Se um código de barras do MRN for digitalizado, a lista de trabalho do paciente será exibida primeiro. Selecione o paciente aplicável e a tela do N° de múltiplo acesso é exibida com os números de acesso atribuídos ao paciente.

Selecione o(s) número(s) de acesso aplicáveis e pressione **OK**. Se um ou mais números de acesso estiverem selecionados, o número de números de acesso atribuídos à injeção será exibido entre parênteses, de acordo com o procedimento.

### 10.4 Edite ou remova os números de acesso selecionados

Os números de múltiplo acesso selecionados podem ser editados ou removidos antes de iniciar ou após concluir a injeção. As etapas a seguir são aplicáveis a ambos os cenários.

Se mais de um número de acesso estiver associado ao paciente, o botão de **N° de múltiplo acesso** aparece próximo aos números de acesso na guia Procedimento (Figura 10 - 2: Botão de nº de múltiplo acesso).

**NOTA:** Para acessar a guia Procedimento, selecione a área Procedimento no painel de informática, ou selecione o campo Editar Dados do Procedimento na tela Confirmação de Dados.



Figura 10 - 2: Botão de nº de múltiplo acesso

Selecione o botão **N° de múltiplo acesso** e a tela do N° de múltiplo acesso aparece com os números de acesso atribuídos ao paciente (Figura 10 - 1: N° de múltiplo acesso). Selecione ou desmarque o(s) número(s) de acesso aplicáveis e pressione **OK**.

### 10.5 Aplique os números de acesso selecionados à próxima injeção do mesmo paciente

Selecionar **Mesmo paciente** na tela Confirmação dos dados aplica os números de acesso selecionados para a injeção anterior à próxima injeção do mesmo paciente.

**NOTA:** Adicionar novos ou remover números de acesso para a próxima injeção não altera os números de acesso atribuídos à injeção anterior do mesmo paciente.



## 11 Data Manager

O Data Manager é um recurso importante da plataforma Certegra que permite que a equipe do hospital realize atividades de gerenciamento de dados a partir de um sistema de injeção compatível quando uma injeção é concluída. Tais atividades incluem:

- ◆ Captura de injeção: Transfere as informações de injeção a partir de um sistema de injeção para o Data Manager. Os dados capturados são armazenados em um banco de dados local.
- ◆ Acesso: Acessa os dados de injeção, armazenados no banco de dados.
- ◆ Associação: Cria um link entre uma injeção e os dados do estudo.
- ◆ Desassociação: Remove um link automaticamente realizado pelo sistema da injetora entre uma injeção e o estudo.
- ◆ Editar injeção: Edite dados de paciente, procedimento e líquido de uma injeção selecionada.
- ◆ Transferir: Transfira os registros de injeção para o PACS ou RIS/VR.
- ◆ Ocultar/mostrar: Oculta ou mostra registros de injeção para processamento adicional no sistema.
- ◆ Exportação: Exporta as informações de injeção para uma planilha de análise e apresentação de dados.
- ◆ Backup: Realiza backup de todo o banco de dados do Certegra em um arquivo de backup do banco de dados.
- ◆ Restaurar: Restaura um banco de dados do Certegra que passou por backup anterior a partir de um arquivo de backup do banco de dados.
- ◆ Gerenciamento de usuário: Adicione um usuário e acesse informações da conta.

### 11.1 Licenciamento

O Data Manager é um recurso licenciável; portanto, uma licença é necessária para acessar o aplicativo.

### 11.2 Proteções de segurança e conformidade

As seguintes proteções de segurança e conformidade estão integradas no Data Manager:

- ◆ Autenticação: São necessárias credenciais de usuário (nome do usuário e senha) para acessar os registros de injeção com o Gerenciador Certegra.
- ◆ Controle de auditoria: A alteração de qualquer dado auxiliar por meio do Data Manager é auditada. O recurso de Auditoria controla todas as alterações feitas nos registros e captura as credenciais de login, data da alteração e as alterações feitas no registro.

### 11.3 Funções e acesso

As funções de usuário e o acesso a determinadas funções do Data Manager são definidos na Tabela 11 - 1: Funções e acesso do usuário ao Data Manager.

**Tabela 11 - 1: Funções e acesso do usuário ao Data Manager**

| Recurso do Data Manager  | Função do recurso        | Administração de usuário | Usuário    |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| Injeções                 | Gerenciar                | Acessar                  | Acessar    |
|                          | Exportar                 | Acessar                  | Acessar    |
| Gerenciamento do local   | Backup                   | Acessar                  | Sem acesso |
|                          | RESTAURAR                | Acessar                  | Sem acesso |
| Gerenciamento de usuário | Minha conta              | Acessar                  | Acessar    |
|                          | Gerenciamento de usuário | Acessar                  | Sem acesso |

## 11.4 Login

Faça login no Gerenciador Certegra para acessar o Data Manager. Se você já estiver conectado ao Gerenciador Certegra, pule para a etapa 2.

1. Faça login no Gerenciador Certegra. Consulte 8.1 - Login do Gerenciador Certegra para obter instruções.
2. Selecione **Data Manager**.
3. A página Gerenciar injeções é exibida (Figura 11 - 1: Certegra Data Manager - Gerenciar injeções).

Figura 11 - 1: Certegra Data Manager - Gerenciar injeções

## 11.5 Editar detalhes da injetora

Quando conectado ao Data Manager, os nomes da instituição, do grupo e da injetora da injetora selecionada são exibidos na barra de navegação. Edite os detalhes da injetora em qualquer página do Data Manager.

Para editar os nomes da instituição, do conjunto ou da injetora:

1. Na barra de navegação, selecione o botão Editar (Figura 11 - 2: Editar nome da instituição, do conjunto ou da injetora).

Figura 11 - 2: Editar nome da instituição, do conjunto ou da injetora

2. Insira informações nos campos Instalação, Conjunto e/ou Injetora.
3. Selecione o botão Confirmar para salvar as alterações feitas ou selecione o botão Cancelar para cancelar a operação (Figura 11 - 3: Confirmar ou cancelar os detalhes da injetora).

 Botão Confirmar

 Botão Cancelar

|           |         |        |         |           |          |                                     |                          |
|-----------|---------|--------|---------|-----------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Hospital: | Default | Suíte: | Default | Injetora: | Injector | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------|---------|--------|---------|-----------|----------|-------------------------------------|--------------------------|

**Figura 11 - 3: Confirmar ou cancelar os detalhes da injetora**

4. Uma janela de confirmação exibe os nomes atualizados para revisão (Figura 11 - 4: Janela de confirmação).
  - a. Selecione **Confirmar** para salvar as alterações ou
  - b. Selecione **Cancelar** para descartar as alterações.

**Figura 11 - 4: Janela de confirmação**

5. Se as alterações forem atualizadas, a mensagem "Detalhes da injetora/conjunto atualizados" será exibida.
6. Selecione **Fechar** para voltar ao Data Manager.

## 11.6 Gerenciar injeções

Quando você está conectado ao Data Manager, a página Gerenciar injeções é exibida. Também é possível acessar essa página selecionando **Gerenciar** no menu suspenso Injeções.

Em Gerenciar injeções, realize uma destas tarefas:

- ◆ Associar
- ◆ Desassociar
- ◆ Editar
- ◆ Transferir
- ◆ Ocultar/mostrar

### 11.6.1 Associar

**NOTA:** Apenas uma injeção pode ser associada por vez, a menos que o N° de múltiplo acesso esteja ativado.

Para associar um registro de injeção específico aos dados do estudo:

1. No menu suspenso Injeções, selecione **Gerenciar**.
2. Em Gerenciar injeções, selecione **Associar** (Figura 11 - 5: Associar registro de injeção).

Gerenciar injeções

Associar
  Desassociar
  Editar
  Transferência
  Ocultar/mostrar

ID/MRN do paciente 
 Nome 
 Sobrenome 
 ID do tecnólogo

Data de início 
 Data de término 
 Número de acesso

**Figura 11 - 5: Associar registro de injeção**

- Procure um registro de injeção específico utilizando os critérios de pesquisa fornecidos.

**NOTA:** É necessário especificar uma data de início e de término.

- Selecione **Pesquisar**.
- Em Resultados de pesquisa, uma lista de injeções com base nos critérios de pesquisa é exibida (Figura 11 - 6: Lista de injeções para associar).

Pesquisar resultados - Associar

Mostrar  entradas Localizar

| Início da injeção             | Nome protocolo | Tecnólogo | Contraste total |   |
|-------------------------------|----------------|-----------|-----------------|---|
| 06 Novembro 2017, 08:40:22 am | Protocolo*     | 005       | 15,0            | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:39:13 am | Protocolo*     | 005       | 15,0            | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:36:49 am | Protocolo*     | 005       | 15,0            | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:35:36 am | Protocolo*     | 005       | 15,0            | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:34:25 am | Protocolo*     | 005       | 15,0            | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:33:15 am | Protocolo*     | 005       | 15,0            | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:32:11 am | Protocolo*     | 005       | 15,0            | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:31:04 am | Protocolo*     | 005       | 15,0            | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:29:05 am | Protocolo*     | 005       | 15,0            | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:27:43 am | Protocolo*     | 005       | 15,0            | <input type="button" value="Associar"/> |

Mostrando 1 a 10 de 10 entradas

**Figura 11 - 6: Lista de injeções para associar**

- Selecione **Associar** ao lado do registro de injeção apropriado.
- Uma janela exibe o registro da injeção selecionada e uma lista de registros de estudo que pode ser associada ao registro da injeção selecionada (Figura 11 - 7: Associar registro de injeção selecionado).

**NOTA:** Por padrão, todos os dados do estudo associados à data de início da injeção serão exibidos. Edite o intervalo de datas ou pesquise por um número de acesso para recuperar registros do estudo relevante.

Associar injeção(ões) a registros de estudo

| Injeção                       | Nome protocolo | Tecnólogo | Contraste total |
|-------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 06 Novembro 2017, 08:40:22 am | Protocolo*     | 005       | 15,0            |

Estudos

Data de início: 06-Novembro-2017    Data de término: 06-Novembro-2017    Número de acesso:    

Mostrar: 10 entradas    Localizar:

| Início do estudo              | ID/MRN do paciente | Nome paciente   | Número de acesso | Descrição do estudo                                   |   |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---|---|
| 06 Novembro 2017, 08:39:49 am | MNAV3E1YB001       | FORD, CHRISTIAN | 12967039         | 73702 - CTA LOWER EXTREMITY WITH AND WITHOUT CONTRAST | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:38:44 am | FYM1SX59HNBR       | FLORES, EDITH   | 394977943        | 71551 - CHEST WITH AND WITHOUT CONTRAST               | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:36:10 am | 14FE59312D2F       | FLORES, BOBBIE  | 884070776        | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CONTRAST             | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:35:02 am | 112EE5F8300A       | DEAN, BEATRICE  | 52678230         | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST               | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:33:49 am | CE900TDBRTXQ       | CRAIG, RONNIE   | 428054861        | 72196 - PELVIS WITH AND WITHOUT CONTRAST              | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:32:45 am | L415VFUUYCTL       | COLEMAN, MARIO  | 38539740         | 71275 - CTA CHEST FOR PE WITH CONTRAST                | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:31:38 am | K6NSOOZ25SHN       | CHAVEZ, ALLISON | 577448992        | 72196 - PELVIS WITH AND WITHOUT CONTRAST              | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:29:42 am | 686922853E34       | BURKE, JULIE    | 175013157        | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST               | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:28:23 am | C22ZUFSYKYGW       | BOWMAN, LUIS    | 596625772        | 71275 - CTA CHEST FOR PE WITH CONTRAST                | <input type="button" value="Associar"/> |
| 06 Novembro 2017, 08:27:01 am | 7IMRFEKAL8ND       | BOWMAN, LEO     | 500784509        | 71550 - CHEST WITHOUT CONTRAST                        | <input type="button" value="Associar"/> |

Figura 11 - 7: Associar registro de injeção selecionado

8. Selecione **Associar** ao lado do registro de injeção apropriado para associar a injeção a algum estudo listado ou selecione **Cancelar** para cancelar a operação.
9. Se **Associar** estiver selecionado, uma mensagem de confirmação será exibida.

**NOTA:** Se o registro de injeção incorreto tiver sido associado a um estudo, desassocie o registro de injeção incorreto (consulte 11.6.2 - Desassociar) e associe novamente o registro de injeção correto.

### 11.6.1.1 Associação de estudos adicionais

Se o nº de múltiplo acesso estiver ativado, vários estudos com o mesmo número de MRN podem ser associados a um registro de injeção.

Quando os resultados de associação de pesquisa forem exibidos, selecione **Associar estudos adicionais**. Uma janela exibe o registro da injeção selecionada e uma lista de registros de estudo com o mesmo número de MRN. Selecione um registro de estudo ao selecionar a caixa sob a coluna "Associar"; vários registros de estudo podem ser associados de uma só vez.

**NOTA:** Os estudos já associados são referenciados como tal e não podem ser selecionados.

Selecione **Associar** para associar os registros do estudo selecionado ao registro da injeção.

### 11.6.2 Desassociar

**NOTA:** Apenas uma injeção pode ser desassociada por vez, a menos que o Nº de múltiplo acesso esteja ativado.

Para desassociar um estudo de um registro de injeção específico:

1. No menu suspenso Injeções, selecione **Gerenciar**.
2. Em Gerenciar injeções, selecione **Desassociar** (Figura 11 - 8: Desassociar registro de injeção).

Gerenciar injeções

Associar     **Desassociar**     Editar     Transferência     Ocultar/mostrar

ID/MRN do paciente:     Nome:     Sobrenome:     ID do tecnólogo:

Data de início: 06-Novembro-2017    Data de término: 06-Novembro-2017    Número de acesso:

Figura 11 - 8: Desassociar registro de injeção

- Procure um registro de injeção específico utilizando os critérios de pesquisa fornecidos.

**NOTA:** É necessário especificar uma data de início e de término.

- Selecione **Pesquisar**.

- Em Resultados de pesquisa, uma lista de injeções com base nos critérios de pesquisa é exibida (Figura 11 - 9: Lista de injeções para desassociar).

**NOTA:** Se o nº de múltiplo acesso estiver ativado, os resultados da pesquisa exibirão registros de injeção agrupados e ordenados pela data de início da injeção. Cada registro de injeção lista estudos associados a esse registro de injeção.

| Início da injeção             | Nome paciente   | ID/MRN do paciente | Número de acesso | Número do estudo | Descrição do estudo                                   |             |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---|-------------|
| 06 Novembro 2017, 08:40:22 am | FORD, CHRISTIAN | MNAV3E1YB081       | 12967039         | L3792140108      | 73702 - CTA LOWER EXTREMITY WITH AND WITHOUT CONTRAST | Desassociar |
| 06 Novembro 2017, 08:39:13 am | FLORES, EDITH   | FYM1SX59HNBR       | 394977943        | G3249920694      | 71551 - CHEST WITH AND WITHOUT CONTRAST               | Desassociar |
| 06 Novembro 2017, 08:36:49 am | FLORES, BOBBIE  | 14FE559312D2F      | 884070776        | 00705257424      | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CONTRAST             | Desassociar |
| 06 Novembro 2017, 08:35:36 am | DEAN, BEATRICE  | 112EE58F9300A      | 52678230         | E4 45604205      | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST               | Desassociar |
| 06 Novembro 2017, 08:34:25 am | CRAIG, RONNIE   | CE90OTDBRTXQ       | 426054861        | H8 67293953      | 72196 - PELVIS WITH AND WITHOUT CONTRAST              | Desassociar |
| 06 Novembro 2017, 08:33:15 am | COLEMAN, MARIO  | L415VF0UYCTL       | 38539740         | PN 72296614      | 71275 - CTA CHEST FOR PE WITH CONTRAST                | Desassociar |
| 06 Novembro 2017, 08:32:11 am | CHAVEZ, ALLISON | K6NSOOZ25SHN       | 57746892         | 0Y726700552      | 72196 - PELVIS WITH AND WITHOUT CONTRAST              | Desassociar |
| 06 Novembro 2017, 08:31:04 am | BURKE, JULIE    | 686822853E34       | 175013157        | 46589996752      | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST               | Desassociar |
| 06 Novembro 2017, 08:29:05 am | BOWMAN, LUIS    | C22ZLUF5YKYG       | 596625772        | L6710732826      | 71275 - CTA CHEST FOR PE WITH CONTRAST                | Desassociar |
| 06 Novembro 2017, 08:27:43 am | BOWMAN, LEO     | 71MRFEKAL8ND       | 500784509        | 06504875267      | 71550 - CHEST WITHOUT CONTRAST                        | Desassociar |

Figura 11 - 9: Lista de injeções para desassociar

- Selecione **Desassociar** ao lado do registro de injeção apropriado para desassociar a injeção do estudo listado.
- Um resumo é exibido (Figura 11 - 10: Desassociar resumo).

Associar injeções a registros de estudo.

| Injeção                       |                |           |                 |
|-------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| Início da injeção             | Nome protocolo | Tecnólogo | Contraste total |
| 06 Novembro 2017, 08:40:22 am | Protocol*      | 005       | 15,0            |

| Estudo                        |                 |                    |                  |                  |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| Início do estudo              | Nome paciente   | ID/MRN do paciente | Número de acesso | Número do estudo |
| 06 Novembro 2017, 08:39:49 am | FORD, CHRISTIAN | MNAV3E1YB081       | 12967039         | L3792140108      |

Figura 11 - 10: Desassociar resumo

- Selecione **Confirmar** para continuar com a desassociação ou selecione **Cancelar** para cancelar a operação.
- Se **Confirmar** estiver selecionado, uma mensagem de confirmação será exibida.

**NOTA:** Se a injeção incorreta tiver sido desassociada de um estudo, associe novamente a injeção ao estudo correto (consulte 11.6.1 - Associar) e desassocie a injeção incorreta.

**NOTA:** A desassociação de uma injeção não a remove automaticamente de qualquer sistema PACS/RIS ao qual o registro possa ter sido transferido. Para atualizar ou excluir, os devidos ajustes nos sistemas de interface precisam ser feitos.

### 11.6.3 Editar injeção

Para editar dados de paciente, procedimento e líquido da injeção selecionada:

1. No menu suspenso Injeções, selecione **Gerenciar**.
2. Em Gerenciar injeções, selecione **Editar** (Figura 11 - 11: Editar registros de injeção).

Gerenciar injeções

Associar
  Desassociar
  **Editar**
 Transferência
  Ocultar/mostrar

ID/MRN do paciente:   
 Nome:   
 Sobrenome:   
 ID do tecnólogo:   
 Data de início:   
 Data de término:   
 Número de acesso:

[Pesquisar](#)

**Figura 11 - 11: Editar registros de injeção**

3. Procure um registro de injeção específico utilizando os critérios de pesquisa fornecidos.

**NOTA:** É necessário especificar uma data de início e de término.

4. Selecione **Pesquisar**.

**NOTA:** Se o nº de múltiplo acesso estiver ativado, os resultados da pesquisa exibirão registros de injeção agrupados e ordenados pela data de início da injeção. Cada registro de injeção lista estudos associados a esse registro de injeção.

5. Selecione **Editar** ao lado do registro de injeção apropriado (Figura 11 - 12: Lista de injeções para editar).

Pesquisar resultados - Editar

Mostrar  entradas Localizar

| Início da injeção             | Nome paciente   | ID/MRN do paciente | Número de acesso | Número do estudo | Nome protocolo | Status    |                        |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------------|
| 06 Novembro 2017, 08:40:22 am | FORD, CHRISTIAN | MNAV3E1YB081       | 12967039         | L3792140108      | Protocolo*     | Associado | <a href="#">Editar</a> |
| 06 Novembro 2017, 08:39:13 am | FLORES, EDITH   | FYM1SX59HNBR       | 394977943        | G3249920694      | Protocolo*     | Associado | <a href="#">Editar</a> |
| 06 Novembro 2017, 08:36:49 am | FLORES, BOBBIE  | 14FE559312D2F      | 884070776        | 00705257424      | Protocolo*     | Associado | <a href="#">Editar</a> |
| 06 Novembro 2017, 08:35:36 am | DEAN, BEATRICE  | 112EE58F9300A      | 52678230         | E4 45604205      | Protocolo*     | Associado | <a href="#">Editar</a> |
| 06 Novembro 2017, 08:34:25 am | CRAIG, RONNIE   | CE9O0TDBRTXQ       | 426054861        | H8 67293953      | Protocolo*     | Associado | <a href="#">Editar</a> |
| 06 Novembro 2017, 08:33:15 am | COLEMAN, MARIO  | L415VF0UYCTL       | 38539740         | PN 72296614      | Protocolo*     | Associado | <a href="#">Editar</a> |
| 06 Novembro 2017, 08:32:11 am | CHAVEZ, ALLISON | K6NSOOZ25SHN       | 577446892        | 0Y726700552      | Protocolo*     | Associado | <a href="#">Editar</a> |
| 06 Novembro 2017, 08:31:04 am | BURKE, JULIE    | 686922853E34       | 175013157        | 46589996752      | Protocolo*     | Associado | <a href="#">Editar</a> |
| 06 Novembro 2017, 08:29:05 am | BOWMAN, LUIS    | C22ZUFSYKYGW       | 596625772        | L6710732826      | Protocolo*     | Associado | <a href="#">Editar</a> |
| 06 Novembro 2017, 08:27:43 am | BOWMAN, LEO     | 7IMRFEKAL8ND       | 500784509        | 06504875267      | Protocolo*     | Associado | <a href="#">Editar</a> |

Mostrando 1 a 10 de 10 entradas Primeiro Anterior 1 próximo Último

**Figura 11 - 12: Lista de injeções para editar**

6. A janela Editar detalhe da injeção é exibida para editar dados do paciente (Figura 11 - 13: Guia Paciente), detalhes do procedimento (Figura 11 - 14: Guia Estudo) e detalhes do líquido (Figura 11 - 15: Guia Contraste).

Lista dos campos editáveis:

- ◆ Guia Paciente (dados do paciente)
  - ◆ ID/MRN do paciente
  - ◆ Nome do paciente
  - ◆ Data de nascimento
  - ◆ Sexo
  - ◆ Altura do paciente
  - ◆ Peso do paciente

Editar detalhe injeção

Paciente Estudo Contraste

Observação: Editar um pac. afetará todos os reg. daquele pac.

ID/MRN do paciente: FYM1SX59HNBR

Nome: EDITH

Nome do meio: --

Sobrenome: FLORES

Data de nascimento: 05-Jan-1939

Sexo do paciente: Seleccione... Feminino

Altura: 172 cm

Peso: 58 kg

Confirmar Cancelar

Figura 11 - 13: Guia Paciente

- ◆ Guia Estudo (detalhes do procedimento)
  - ◆ Local da injeção
  - ◆ Calibre do cateter
  - ◆ Tecnólogo
  - ◆ Número de acesso
  - ◆ Número do estudo
  - ◆ UID do estudo
  - ◆ Descrição do estudo
  - ◆ Data do estudo
  - ◆ Tempo de estudo
  - ◆ Observações
  - ◆ Chave de integração do RIS

Editar detalhe injeção

Paciente Estudo Contraste

Estudo

Local da injeção: Seleccione... --

Calibre do cateter: Seleccione... --

Tecnólogo: --

Observações: --

Número do estudo: --

UID do estudo: --

Descrição do estudo: --

Data do estudo: --

Hora (12 horas): --

Número de acesso: --

Chave de integração do RIS: --

Confirmar Cancelar

Figura 11 - 14: Guia Estudo

**NOTA:** Se o nº de múltiplo acesso estiver ativado, todos os estudos associados à injeção serão exibidos.

- ◆ Guia Contraste (detalhes do líquido)
  - ◆ Data de vencimento
  - ◆ Número do lote/Série
  - ◆ Marca
  - ◆ Concentração
  - ◆ Volume do frasco
  - ◆ Dosagem (Somente a modalidade RM)

Editar detalhe injeção

Paciente Estudo Contraste

Contraste

Data de vencimento: 06-Novembro-2021

Lote: 91805

Tipo de líquido: Seleccione... Marca: ULTRAVIST Concentração: 240 Volume do frasco: 500

Confirmar Cancelar

Figura 11 - 15: Guia Contraste

**NOTA:** Todos os campos são editáveis, exceto quando usados com o Connect.CT. Em Connect.CT, a função Editar seguiria as regras da Lista de Trabalho de Modalidade para os campos editáveis/não editáveis.



7. Edite as informações de injeção.
8. Selecione **Confirmar** para aceitar as alterações ou **Cancelar** para descartá-las.
9. Se **Confirmar** estiver selecionado, uma mensagem de confirmação será exibida.

### 11.6.4 Transferir

Para transferir os dados de injeção para o PACS ou RIS atribuído:

1. No menu suspenso Injeções, selecione **Gerenciar**.
2. Em Gerenciar injeções, selecione **Transferência** (Figura 11 - 16: Transferir registro de injeção).

**Figura 11 - 16: Transferir registro de injeção**

3. Procure registro(s) de injeção específico(s) utilizando os critérios de pesquisa fornecidos.  
**NOTA:** É necessário especificar uma data de início e de término.
4. Selecione **Pesquisar**.
5. Em Resultados de pesquisa, uma lista de registros de injeção com base nos critérios de pesquisa é exibida (Figura 11 - 17: Lista de injeções para transferir).

**NOTA:** Se o nº de múltiplo acesso estiver ativado, os resultados da pesquisa exibirão registros de injeção agrupados e ordenados pela data de início da injeção. Cada registro de injeção lista estudos associados a esse registro de injeção.

| Início da injeção   | ID/MRN do paciente | Nome paciente   | Número de acesso | Número do estudo | Destino |
|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:40:22 am | MNAV3E1YB081       | FORD, CHRISTIAN | 12967039         | L3792140158      |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:39:13 am            | FYM1SX59HNBK       | FLORES, EDITH   | 394977943        | C3249520694      |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:36:49 am | 14FE559312D2F      | FLORES, BOBBIE  | 884070776        | 00705257424      |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:35:36 am            | 112E58F9300A       | DEAN, BEATRICE  | 52678230         | E4 45604205      |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:34:25 am            | CE90OTDERTXQ       | CRAIG, RONNIE   | 426054861        | H8 67293953      |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:33:15 am            | L415VF0UYCTL       | COLEMAN, MARIO  | 38539740         | PN 72296614      |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:32:11 am            | K8NSOO22SSHN       | CHAVEZ, ALLISON | 577446892        | 0Y726700552      |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:31:04 am            | 686922853E34       | BURKE, JULIE    | 175013157        | 46589996752      |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:29:05 am            | C22ZUFSY1YKWG      | BOWMAN, LUIS    | 596625772        | L6710732826      |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:27:43 am            | 7MRPEKAL8ND        | BOWMAN, LEO     | 500794509        | 06504675267      |         |

**Figura 11 - 17: Lista de injeções para transferir**

6. Marque a caixa de seleção ao lado da injeção ou das injeções para agendar uma transferência.  
**NOTA:** Transfira várias injeções marcando a caixa de seleção associada para cada registro de injeção.  
**NOTA:** Se o nº de múltiplo acesso estiver ativado, todos os estudos associados à injeção selecionada também serão selecionados.

7. Escolha o destino da transferência selecionando **Para PACS** e/ou **Para RIS/VR**. A coluna Destino destaca o PACS, o RIS/VR ou ambos com base no status da transferência.
8. Selecione **Transferência**.
9. Selecione **Confirmar** para confirmar as alterações ou **Cancelar** para descartá-las (Figura 11 - 18: Transferir resumo de injeções).

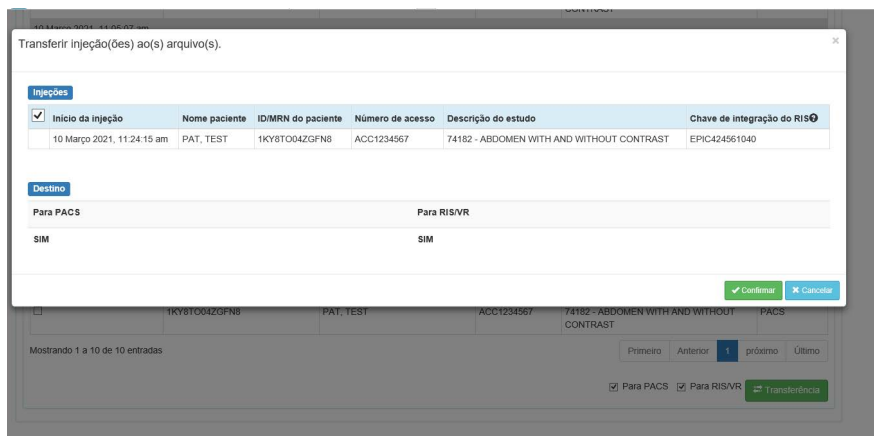


Figura 11 - 18: Transferir resumo de injeções

10. Se **Confirmar** tiver sido selecionado, uma mensagem de confirmação será exibida.

### 11.6.5 Ocultar/mostrar

**NOTA:** As injeções ocultas não podem ser gerenciadas ou exportadas.

Para ocultar ou mostrar um registro de injeção específico:

1. No menu suspenso Injeções, selecione **Gerenciar**.
2. Em Gerenciar injeção, selecione **Ocultar/mostrar** (Figura 11 - 19: Ocultar/mostrar registro de injeção).

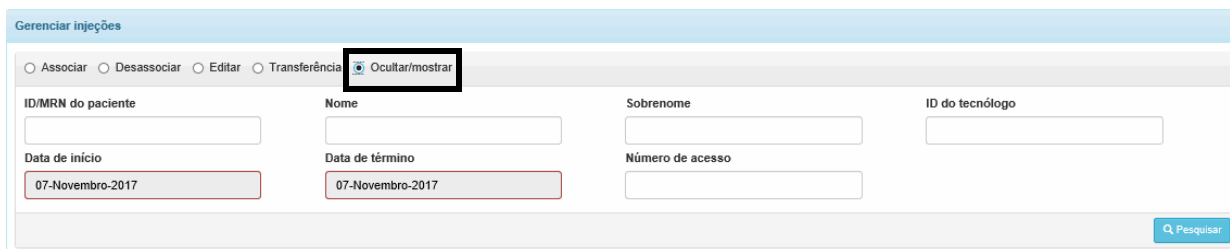


Figura 11 - 19: Ocultar/mostrar registro de injeção

3. Procure um registro de injeção específico utilizando os critérios de pesquisa fornecidos.

**NOTA:** É necessário especificar uma data de início e de término.

4. Selecione **Pesquisar**.

- Em Resultados de pesquisa, uma lista de injeções com base nos critérios de pesquisa é exibida (Figura 11 - 20: Lista de injeções a serem ocultadas/mostradas).

**NOTA:** Se o nº de múltiplo acesso estiver ativado, os resultados da pesquisa exibirão registros de injeção agrupados e ordenados pela data de início da injeção. Cada registro de injeção lista estudos associados a esse registro de injeção.

| Início da injeção             | Nome paciente   | ID/MRN do paciente | Número de acesso | Número do estudo | Status    |         |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 06 Novembro 2017, 08:49:22 am | FORD, CHRISTIAN | MNAV3E1YB081       | 12967039         | L3792140108      | Associado | Ocultar |
| 06 Novembro 2017, 08:39:13 am | FLORES, EDITH   | FYM1SX59HNBR       | 394977943        | G3249920684      | Associado | Ocultar |
| 06 Novembro 2017, 08:36:49 am | FLORES, BOBBIE  | 14FE59312D2F       | 884070776        | 00705257424      | Associado | Mostrar |
| 06 Novembro 2017, 08:35:36 am | DEAN, BEATRICE  | 112EE58F9300A      | 52678230         | E4 45604205      | Associado | Ocultar |
| 06 Novembro 2017, 08:34:25 am | CRAIG, RONNIE   | CE90OTDBRTXQ       | 426054861        | H8 67293953      | Associado | Mostrar |
| 06 Novembro 2017, 08:33:15 am | COLEMAN, MARIO  | L415VF0UYCTL       | 38539740         | PN 72296614      | Associado | Ocultar |
| 06 Novembro 2017, 08:32:11 am | CHAVEZ, ALLISON | K8NSOO22SSHN       | 577446892        | 0Y728700552      | Associado | Ocultar |
| 06 Novembro 2017, 08:31:04 am | BURKE, JULIE    | 686922853E34       | 175013157        | 4658996752       | Associado | Ocultar |
| 06 Novembro 2017, 08:29:05 am | BOWMAN, LUIS    | C22ZJFSYYKQG       | 596625772        | L6710732826      | Associado | Ocultar |
| 06 Novembro 2017, 08:27:43 am | BOWMAN, LEO     | 7IMRFEKAL8ND       | 500784509        | 06504875267      | Associado | Ocultar |

Mostrando 1 a 10 de 10 entradas

Primeiro Anterior 1 próximo Último

**Figura 11 - 20: Lista de injeções a serem ocultadas/mostradas**

- Selecione **Ocultar** ao lado do registro de injeção apropriado para ocultar a injeção ou selecione **Mostrar** ao lado do registro de injeção apropriado para mostrar a injeção.
- É exibida uma tela de resumo com os detalhes da injeção selecionada e com a operação selecionada (Ocultar / Mostrar) (Figura 11 - 21: Tela Ocultar/mostrar resumo).

**NOTA:** Se o nº de múltiplo acesso estiver ativado, todos os estudos associados à injeção selecionada serão exibidos e incluídos na operação selecionada (Ocultar / Mostrar).

Ocultar/mostrar injeção ✕

---

**Injeção**

| Início da injeção             | Nome paciente | PatientMRN   | Número de acesso | Número do estudo |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 06 Novembro 2017, 08:34:25 am | CRAIG, RONNIE | CE90OTDBRTXQ | 426054861        | H8 67293953      |

**Operação a ser executada**

Mostrar

✔ Confirmar
✕ Cancelar

**Figura 11 - 21: Tela Ocultar/mostrar resumo**

- Selecione **Confirmar** para confirmar as alterações ou **Cancelar** para descartá-las.
- Se **Confirmar** tiver sido selecionado, uma mensagem de confirmação será exibida.

## 11.7 Exportar

**NOTA:** As exportações não incluirão registros de injeção ocultos.

Exporte os detalhes da injeção em um arquivo de valores separados por vírgulas (CSV) para ser usado em aplicativos de planilha e banco de dados e para gerar apresentações e análises de dados mais detalhadas.

Escolha o nível de detalhe exportado:

- ◆ **Resumo da injeção:** Resumo consolidado das injeções dentro de um intervalo de data especificado.
- ◆ **Detalhes da injeção:** Detalhes da injeção e registros de histórico que atendem aos critérios de pesquisa específicos fornecidos.
- ◆ **Uso da seringa:** Detalhes de uso da seringa para injeções dentro de um intervalo de data especificado.

### 11.7.1 Exportar resumo da injeção

Para exportar o resumo da injeção para um determinado intervalo de data:

1. No menu suspenso Injeções, selecione **Exportar**.
2. Selecione **Resumo da injeção** (Figura 11 - 22: Tela resumo da injeção).

A interface de exportação, intitulada "Exportar", apresenta três opções de radio button: "Exportar resumo da injeção" (selecionada), "Detalhes da injeção" e "Uso da seringa". Abaixo, há dois campos de entrada para "Data de início" e "Data de término", ambos com o valor "07-Novembro-2017". Um botão verde "Exportar injeções" está localizado no canto inferior direito.

Figura 11 - 22: Tela resumo da injeção

3. Insira o intervalo de data apropriado nos campos Data de início e Data de término.
4. Selecione **Exportar injeções**.
5. Selecione **Baixar** para baixar o resumo de injeção exportado como um arquivo CSV (Figura 11 - 23: Resumo da injeção para download).

A interface de exportação, intitulada "Exportar", apresenta três opções de radio button: "Exportar resumo da injeção" (selecionada), "Detalhes da injeção" e "Uso da seringa". Abaixo, há dois campos de entrada para "Data de início" e "Data de término", ambos com o valor "07-Novembro-2017". Um botão verde "Exportar injeções" está localizado no canto inferior direito. Uma barra de mensagem verde no rodapé indica: "Exportação criada com êxito. Clique no link para baixar o arquivo. [Baixar](#)".

Figura 11 - 23: Resumo da injeção para download

6. Um arquivo de resumo da injeção de amostra é dividido em quatro partes, como exibido na Figura 11 - 24: Exemplos de resumo da injeção.

| ID paciente   | Nome      | Nome do meio | Sobrenome | Data de nascimento | Sexo      | Altura (cm) | Peso (kg) | Número de acesso | ID do estudo | UID do estudo                                |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|--------------|--|
| 71MRFEKAL8ND  | LEO       | --           | BOWMAN    | 2/23/1989          | Masculino | 162         | 103       | 500784509        | 6504875267   | 1.2.400.19301323781162017.636455714718070000 |
| C22Z2F5YKYG   | LUIS      | --           | BOWMAN    | 3/2/1976           | Masculino | 189         | 45        | 596625772        | L6710732826  | 1.2.400.12248197091162017.636455714718210000 |
| 6.87E+42      | JULIE     | --           | BURKE     | 9/4/1989           | Feminino  | 180         | 86        | 175013157        | 46589996752  | 1.2.400.14432688401162017.636455714718120000 |
| K6NSOOZ25SHN  | ALLISON   | --           | CHAVEZ    | 7/26/1938          | Feminino  | 166         | 67        | 577446892        | 0Y726700552  | 1.2.400.13657264181162017.636455714718160000 |
| L415VF0UYCTL  | MARIO     | --           | COLEMAN   | 12/2/1958          | Masculino | 189         | 67        | 38539740         | PN 72296614  | 1.2.400.18808550021162017.636455714718240000 |
| CE9OOTDBRTXQ  | RONNIE    | --           | CRAIG     | 11/24/1979         | Masculino | 169         | 70        | 426054861        | H8 67293953  | 1.2.400.14700042301162017.636455714718130000 |
| 112EES8F9300A | BEATRICE  | --           | DEAN      | 12/28/1938         | Feminino  | 185         | 51        | 52678230         | E4 45604205  | 1.2.400.20123837741162017.636455714718170000 |
| 14FE59312D2F  | BOBBIE    | --           | FLORES    | 9/21/1949          | Feminino  | 162         | 66        | 884070776        | 705257424    | 1.2.400.7958797721162017.636455714718150000  |
| FYMI5X59HNR   | EDITH     | --           | FLORES    | 1/5/1939           | Feminino  | 172         | 58        | 394977943        | G3249920694  | 1.2.400.815494881162017.636455714718180000   |
| MNAV3E1YB081  | CHRISTIAN | --           | FORD      | 2/15/1984          | Masculino | 170         | 45        | 12967039         | L3792140108  | 1.2.400.4335341191162017.636455714718250000  |

| A Marca   | A Concentração | A Lote | A Volume do frasco | A Data de vencimento | B Marca | B Concentração | B Lote | B Volume do frasco | B Data de vencimento | Hospital | Suíte   | Nome unidade de RM |
|-----------|----------------|--------|--------------------|----------------------|---------|----------------|--------|--------------------|----------------------|----------|---------|--------------------|
| ULTRAVIST | 240,00         | 71427  | 500,00             | 11/6/2021            | Saline  | 0,00           | 93174  | 0,00               | 11/6/2021            | Default  | Default | MODALITY_SIM_AE    |
| ULTRAVIST | 240,00         | 96831  | 500,00             | 11/6/2021            | Saline  | 0,00           | 61907  | 0,00               | 11/6/2021            | Default  | Default | MODALITY_SIM_AE    |
| ULTRAVIST | 240,00         | 69344  | 500,00             | 11/6/2021            | Saline  | 0,00           | 72991  | 0,00               | 11/6/2021            | Default  | Default | MODALITY_SIM_AE    |
| ULTRAVIST | 240,00         | 59318  | 500,00             | 11/6/2021            | Saline  | 0,00           | 93686  | 0,00               | 11/6/2021            | Default  | Default | MODALITY_SIM_AE    |
| ULTRAVIST | 240,00         | 95674  | 500,00             | 11/6/2021            | Saline  | 0,00           | 83080  | 0,00               | 11/6/2021            | Default  | Default | MODALITY_SIM_AE    |
| ULTRAVIST | 240,00         | 83895  | 500,00             | 11/6/2021            | Saline  | 0,00           | 87936  | 0,00               | 11/6/2021            | Default  | Default | MODALITY_SIM_AE    |
| ULTRAVIST | 240,00         | 83451  | 500,00             | 11/6/2021            | Saline  | 0,00           | 93181  | 0,00               | 11/6/2021            | Default  | Default | MODALITY_SIM_AE    |
| ULTRAVIST | 240,00         | 91857  | 500,00             | 11/6/2021            | Saline  | 0,00           | 80361  | 0,00               | 11/6/2021            | Default  | Default | MODALITY_SIM_AE    |
| ULTRAVIST | 240,00         | 91805  | 500,00             | 11/6/2021            | Saline  | 0,00           | 31951  | 0,00               | 11/6/2021            | Default  | Default | MODALITY_SIM_AE    |
| ULTRAVIST | 240,00         | 87037  | 500,00             | 11/6/2021            | Saline  | 0,00           | 71898  | 0,00               | 11/6/2021            | Default  | Default | MODALITY_SIM_AE    |

| Nome da injetora | Injetora | Número de série | Certegra | Número de série | A Carregado (ml) | A Administrado(a) (ml) | A Eliminado (ml) | A Pico de fluxo (ml/s) | A Pico de pressão (psi) | A Tipo | A Tipo de líquido             |
|------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|
| Injetor          | 20325EC  |                 |          | 12345           | 134,00           | 15,00                  | 0,00             | 3,04                   |                         | 12     | Contraste Contrastelodinizado |
| Injetor          | 20325EC  |                 |          | 12345           | 119,10           | 15,00                  | 0,00             | 3,04                   |                         | 1      | Contraste Contrastelodinizado |
| Injetor          | 20325EC  |                 |          | 12345           | 185,00           | 15,00                  | 0,00             | 3,09                   |                         | 0      | Contraste Contrastelodinizado |
| Injetor          | 20325EC  |                 |          | 12345           | 170,10           | 15,00                  | 0,00             | 3,09                   |                         | 0      | Contraste Contrastelodinizado |
| Injetor          | 20325EC  |                 |          | 12345           | 155,10           | 15,00                  | 0,00             | 3,07                   |                         | 0      | Contraste Contrastelodinizado |
| Injetor          | 20325EC  |                 |          | 12345           | 140,10           | 15,00                  | 0,00             | 3,10                   |                         | 0      | Contraste Contrastelodinizado |
| Injetor          | 20325EC  |                 |          | 12345           | 125,10           | 15,00                  | 0,00             | 3,09                   |                         | 0      | Contraste Contrastelodinizado |
| Injetor          | 20325EC  |                 |          | 12345           | 110,10           | 15,00                  | 0,00             | 3,09                   |                         | 0      | Contraste Contrastelodinizado |
| Injetor          | 20325EC  |                 |          | 12345           | 190,90           | 15,00                  | 0,00             | 4,24                   |                         | 3      | Contraste Contrastelodinizado |
| Injetor          | 20325EC  |                 |          | 12345           | 176,00           | 15,00                  | 0,00             | 3,06                   |                         | 1      | Contraste Contrastelodinizado |

| Data do estudo | Descrição do estudo                                   | Status associação | Arquivado | Status | EAs arquivadas | ID do tecnólogo | Local da injeção     | Calibre do cateter |
|----------------|---|-------------------|-----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 6/11/2017 8:27 | 71550 - CHEST WITHOUT CONTRAST                        | S                 | N         | --     |                |                 | 5 Pé esquerdo        | ga 18              |
| 6/11/2017 8:28 | 71275 - CTA CHEST FOR PE WITH CONTRAST                | S                 | N         | --     |                |                 | 5 Linha central      | ga 16              |
| 6/11/2017 8:29 | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST               | S                 | N         | --     |                |                 | 5 Linha central      | Linha central      |
| 6/11/2017 8:31 | 72196 - PELVIS WITH AND WITHOUT CONTRAST              | S                 | N         | --     |                |                 | 5 Pé esquerdo        | ga 16              |
| 6/11/2017 8:32 | 71275 - CTA CHEST FOR PE WITH CONTRAST                | S                 | N         | --     |                |                 | 5 Antebraço esquerdo | ga 16              |
| 6/11/2017 8:33 | 72196 - PELVIS WITH AND WITHOUT CONTRAST              | S                 | N         | --     |                |                 | 5 Punho esquerdo     | ga 18              |
| 6/11/2017 8:35 | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST               | S                 | N         | --     |                |                 | 5 Pé esquerdo        | ga 18              |
| 6/11/2017 8:36 | 74182 - ABDOMEN WITH AND WITHOUT CONTRAST             | S                 | N         | --     |                |                 | 5 Antebraço esquerdo | ga 16              |
| 6/11/2017 8:38 | 71551 - CHEST WITH AND WITHOUT CONTRAST               | S                 | N         | --     |                |                 | 5 Pé esquerdo        | ga 18              |
| 6/11/2017 8:39 | 73702 - CTA LOWER EXTREMITY WITH AND WITHOUT CONTRAST | S                 | N         | --     |                |                 | 5 Linha central      | Linha central      |

Figura 11 - 24: Exemplos de resumo da injeção

### 11.7.2 Exportar detalhes da injeção

Para exportar os detalhes da injeção e os registros do histórico de injeções para um determinado intervalo de data:

1. No menu suspenso Injeções, selecione **Exportar**.
2. Selecione **Detalhes da injeção** (Figura 11 - 25: Detalhes da injeção).

Figura 11 - 25: Detalhes da injeção

3. Procure um registro de injeção específico utilizando os critérios de pesquisa fornecidos.

**NOTA:** É necessário especificar uma data de início e de término.

4. Selecione **Pesquisar**.

5. Uma lista de injeções com base nos critérios de busca é exibida (Figura 11 - 26: Lista de injeções para exportar).

**NOTA:** Se o nº de múltiplo acesso estiver ativado, os resultados da pesquisa exibirão registros de injeção agrupados e ordenados pela data de início da injeção. Cada registro de injeção lista estudos associados a esse registro de injeção.

| Início da injeção   | Nome paciente   | ID/MRN do paciente | Número de acesso | Número do estudo | Status    | Destino |
|---|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:40:22 am            | FORD, CHRISTIAN | MNAV3E1YB081       | 12967039         | L3792140108      | Associado |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:39:13 am | FLORES, EDITH   | FYM1SX59HNBR       | 394977943        | G3249920694      | Associado |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:36:49 am            | FLORES, BOBBIE  | 14FE559312D2F      | 884070776        | 00705257424      | Associado |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:35:36 am            | DEAN, BEATRICE  | 112EE58F9300A      | 52678230         | E4 45604205      | Associado |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:34:25 am            | CRAIG, RONNIE   | CE90OTDBRTXQ       | 426054861        | H8 67293953      | Associado |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:33:15 am            | COLEMAN, MARIO  | L415VF0UYCTL       | 38539740         | PN 72296614      | Associado |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:32:11 am            | CHAVEZ, ALLISON | K8NSOOZ25SHN       | 577446892        | 0Y726700552      | Associado |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:31:04 am            | BURKE, JULIE    | 686922853E34       | 175013157        | 46589996752      | Associado |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:29:05 am            | BOWMAN, LUIS    | C222UFSYKKGW       | 596625772        | L6710732826      | Associado |         |
| <input type="checkbox"/> 06 Novembro 2017, 08:27:43 am            | BOWMAN, LEO     | 7IMRFEKAL8ND       | 500784509        | 06504875267      | Associado |         |

Mostrando 1 a 10 de 10 entradas

[Exportar Detalhes de Injeção](#)

Figura 11 - 26: Lista de injeções para exportar

6. Marque a caixa de seleção ao lado da injeção ou das injeções para exportar.

**NOTA:** Se o nº de múltiplo acesso estiver ativado, todos os estudos associados à injeção selecionada também serão selecionados.

7. Selecione **Exportar detalhes da injeção** para exportar os arquivos selecionados.

8. Selecione **Baixar** para baixar os detalhes de injeção exportado como um arquivo CSV (Figura 11 - 27: Detalhes da injeção para download).

Exportar

Exportar resumo da injeção  Detalhes da injeção  Uso da seringa

ID/MRN do paciente  Nome  Sobrenome  ID do tecnólogo

Data de início  Data de término  Número de acesso

[Pesquisar](#)

Exportação criada com êxito. Clique no link para baixar o arquivo. [Baixar](#)

Figura 11 - 27: Detalhes da injeção para download

9. Um arquivo de download dos detalhes da injeção de exemplo é exibido em Figura 11 - 28: Exemplos de detalhes da injeção.

| Registro histórico de injeções                                  |                                 |                               |   |   |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Nome do hospital<br>Default                                     | Nome do grupo<br>Default        | Nome unidade de RM<br>Default | Nome da injetora<br>Injector  |   |
| Tipo de procedimento<br>71551 - CHEST WITH AND WITHOUT CONTRAST | ID do procedimento<br>394977943 | ID do tecnólogo<br>5          | Local da injeção<br>Pé esquerdo   | Calibre do cateter<br>ga 18             |
| Observações<br>--   |                                 |                               |   |   |
| Marca<br>ULTRAVIST  | Concentração<br>240,00          | Volume do frasco<br>500,00    | Lote<br>91805   | Lote<br>91805                           |
| ID paciente<br>FYM1SX59HNBR                                     | Nome<br>EDITH                   | Nome do meio<br>--            | Sobrenome<br>FLORES   | Data de nascimento<br>1/5/1939          |
| Id da injetora<br>20325EC                                       | Tipo<br>Stellant2               | Nome do modelo<br>Injector    | Versão de software<br>S2-CRU-102.18-C1.06_WIN_HU;S2-SRU-100.68-C1.06_SH_HU;POD-APPL-1.05_HU |   |
| Início<br>6/11/2017 8:39  | Parar<br>6/11/2017 8:39         | Término<br>Concluído OK       | Contraste carregado (ml)<br>190,90  | Solução salina carregada (ml)<br>191,20 |
| Protocolos  |                                 |                               |   |   |
| Nome  | Estágio                         | Algoritmo                     | Limite de pressão (psi)   | Tipo de retardo                         |
| Protocol*   | Programado                      | Clássico                      | 325   | Nenhum                                  |
| Estágio   | Número da fase                  | Tipo de fase                  | Taxa de fluxo (ml/s)  | Volume (ml)                             |
| Diagnóstico   | 1                               | Contraste                     | 3,00  | 15,00                                   |
| Diagnóstico   | 2                               | Irrigação                     | 3,00  | 30,00                                   |
| Nome  | Estágio                         | Algoritmo                     | Limite de pressão (psi)   | Tipo de retardo                         |
| Protocol*   | Efetivo                         | Clássico                      | 325   | Nenhum                                  |
| Estágio   | Número da fase                  | Tipo de fase                  | Taxa de fluxo (ml/s)  | Volume (ml)                             |
| Diagnóstico   | 1                               | Contraste                     | 2,83  | 15,00                                   |
| Diagnóstico   | 2                               | Irrigação                     | 2,88  | 30,00                                   |
| Eventos anormais  |                                 |                               |   |   |
| Nome  | Informações auxiliares          |                               |   |   |
| Status de associação e transferência                            |                                 |                               |   |   |
| Associado (S/N)   | Transferido (S/N)               |                               |   |   |
| S   | N                               |                               |   |   |
| Status da troca   |                                 |                               |   |   |
| Data/hora   | Destination                     | Tipo                          | Status da troca   |   |

Figura 11 - 28: Exemplos de detalhes da injeção

### 11.7.3 Exportar uso da seringa

Para exportar o uso da seringa para um determinado intervalo de data:

1. No menu suspenso Injeções, selecione **Exportar**.
2. Selecione **Uso da seringa** (Figura 11 - 29: Uso da seringa).

Figura 11 - 29: Uso da seringa

3. Insira o intervalo de data apropriado nos campos Data de início e Data de término.
4. Selecione **Exportar uso da seringa**.
5. Selecione **Baixar** para baixar o resumo de uso da seringa como um arquivo CSV (Figura 11 - 30: Uso da seringa para download).

Figura 11 - 30: Uso da seringa para download

6. Um arquivo de download do uso da seringa exportado de exemplo é exibido em Figura 11 - 31: Exemplo de uso da seringa.

**NOTA:** Cada linha da exportação de uso da seringa mostra quando uma seringa é acoplada, desacoplada, o tempo total da injetora e o número de injeções realizadas enquanto acoplada.

| Customer | Hospital | Suite   | Nome da injetora | Seringa | Data e hora da ENTRADA da seringa | Data e hora da SAÍDA da seringa | Tempo total da seringa | Contagem de injeção |
|----------|----------|---------|------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| Default  | Default  | Default | Injector         | A       | 11/28/2017 10:24                  | 11/28/2017 12:35                | 2:11:41                | 1                   |
| Default  | Default  | Default | Injector         | B       | 11/28/2017 10:24                  | 11/28/2017 12:35                | 2:11:41                | 1                   |
| Default  | Default  | Default | Injector         | A       | 11/28/2017 12:36                  | 12/1/2017 16:15                 | 3.03:39:35             | 25                  |
| Default  | Default  | Default | Injector         | B       | 11/28/2017 12:36                  | 11/29/2017 9:49                 | 21:12:55               | 6                   |

Figura 11 - 31: Exemplo de uso da seringa




## 11.8 Gerenciamento do local

### 11.8.1 Backup

**NOTA:** Depois que o backup é iniciado, não é possível realizar outras atividades no Data Manager até o backup terminar.


Para fazer backup de todos os registros de injeção no sistema local:

1. No menu suspenso Gerenciamento do local, selecione **Backup**.
2. Selecione **Backup** (Figura 11 - 32: Efetuar backup do banco de dados).

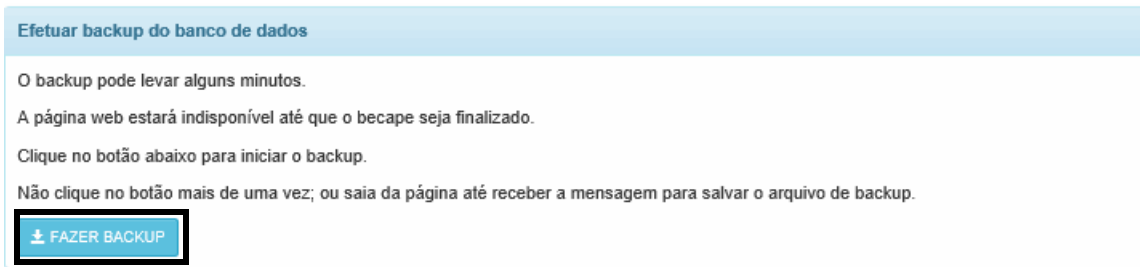


**Figura 11 - 32: Efetuar backup do banco de dados**

3. O Monitor de atividade do banco de dados é aberto e monitora o progresso do backup (Figura 11 - 33: Monitor de atividade do banco de dados).

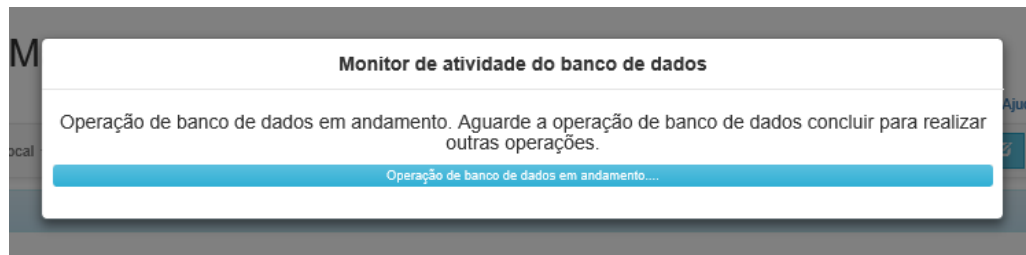

**Figura 11 - 33: Monitor de atividade do banco de dados**

4. Quando o backup termina, uma mensagem de conclusão é exibida (Figura 11 - 34: Operação concluída).

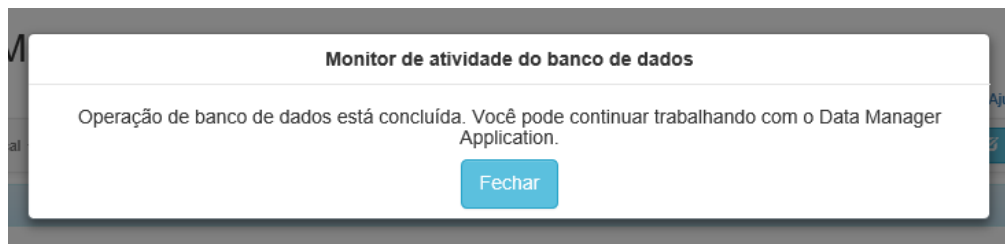

**Figura 11 - 34: Operação concluída**

5. Selecione **Fechar** para voltar a usar o Data Manager.

6. Selecione **Baixar arquivo de backup** para baixar o arquivo de banco de dados de backup (Figura 11 - 35: Baixar arquivo de backup).

**NOTA:** O arquivo de banco de dados de backup deve ser salvo somente na rede do hospital.

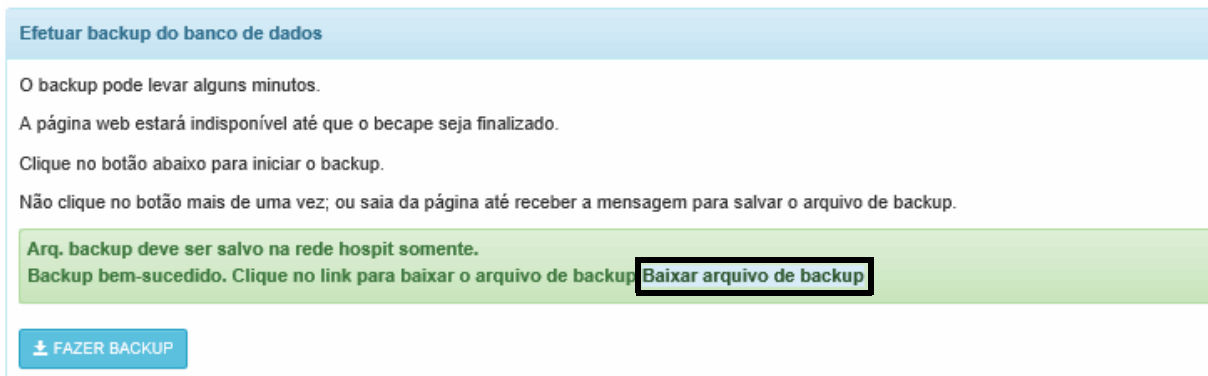


Figura 11 - 35: Baixar arquivo de backup

## 11.8.2 Restaurar

**NOTA:** O cabeçote da injetora deve ser ligado antes de restaurar os registros de injeção.

**NOTA:** Depois que a restauração é iniciada, não é possível realizar outras atividades no Data Manager até o processo terminar.

**NOTA:** Uma mensagem de aviso será exibida em relação à indisponibilidade do Data Manager até a conclusão da operação de restauração do banco de dados.

Para restaurar todos os registros da injeção utilizando um arquivo de backup no sistema local:

1. No menu suspenso Gerenciamento do local, selecione **Restaurar**.
2. Selecione **Procurar** (Figura 11 - 36: Restaurar banco de dados).

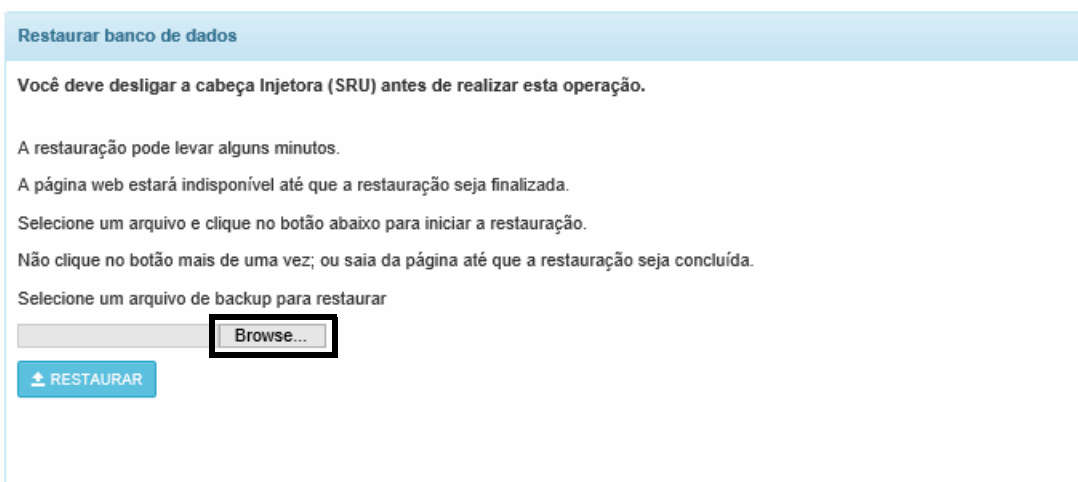


Figura 11 - 36: Restaurar banco de dados

3. Selecione o arquivo de backup de banco de dados da Certegra apropriado e selecione **Abrir** (Figura 11 - 37: Selecionar arquivo de backup).

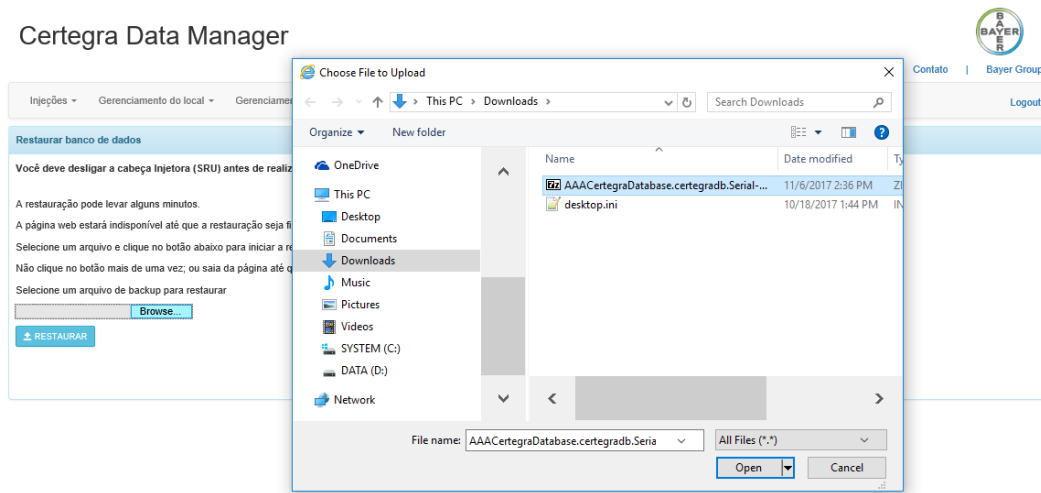


Figura 11 - 37: Selecionar arquivo de backup

4. Selecione **Restaurar**.
5. O Monitor de atividade do banco de dados é aberto e monitora o progresso da restauração (Figura 11 - 38: Monitor de atividade do banco de dados).

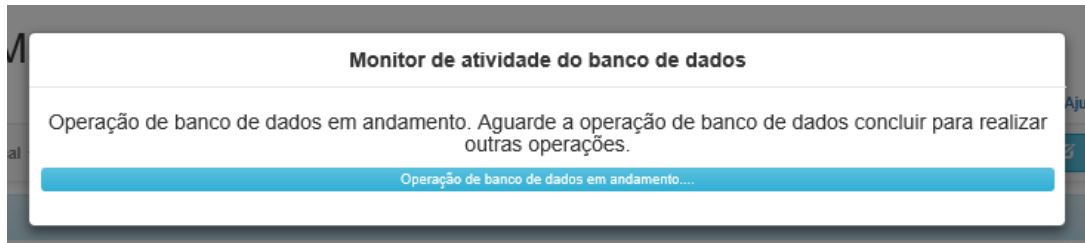


Figura 11 - 38: Monitor de atividade do banco de dados

6. Depois que os registros de injeção são restaurados, uma mensagem para reiniciar o dispositivo é exibida (Figura 11 - 39: Restauração satisfatória).

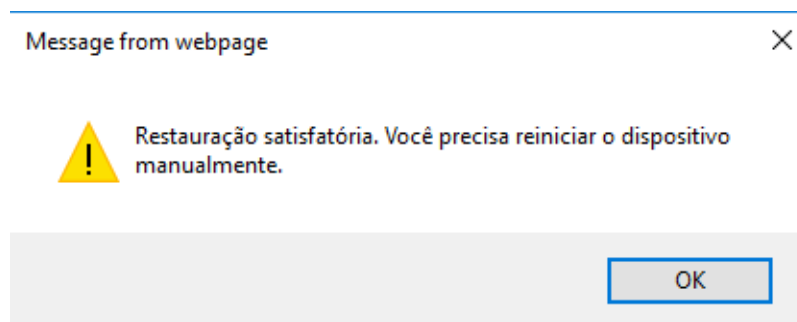


Figura 11 - 39: Restauração satisfatória

7. Selecione **OK**. O sistema é desligado e redireciona para a página de login.

## 11.9 Gerenciamento de usuário

### 11.9.1 Adicionar usuário

Para adicionar um novo usuário:

1. No menu suspenso Gerenciamento de usuário, selecione **Adicionar usuário**.
2. Insira a informação de usuário necessária para criar uma nova conta de usuário (Figura 11 - 40: Adicionar usuário).




O formulário 'Adicionar usuário' contém os seguintes campos e elementos:

- Campos de texto: Nome, Nome do meio, Sobrenome, Nome do usuário (com ícone de alerta amarelo).
- Campos de texto: Senha, Confirmar senha.
- Menu suspenso: Função (com opção 'Selecione...').
- Botões: SALVAR (com ícone de seta para baixo) e Cancelar (com ícone de X).
- Links: Política de Senha e Senha segura (guiada).

Figura 11 - 40: Adicionar usuário

3. Ao criar uma senha, a Política de senhas explica como criar uma senha segura (Figura 11 - 41: Política de Senha). Selecione **Fechar** quando terminar.

**NOTA:** Para modificar a política de senha, entre em contato com a equipe de manutenção ou um representante local designado.

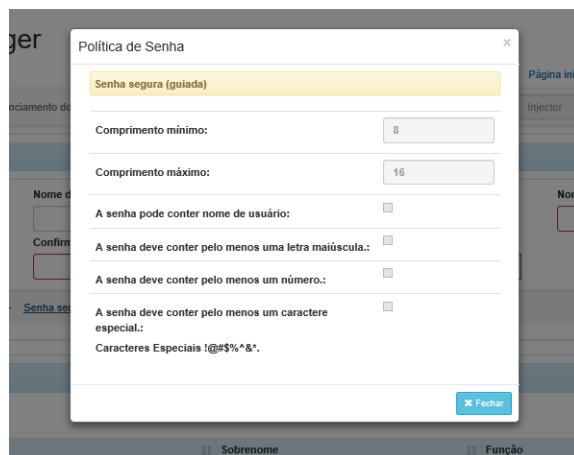

A janela de diálogo 'Política de Senha' apresenta as seguintes regras:

- Comprimeto mínimo: 8
- Comprimeto máximo: 16
- A senha pode conter nome de usuário:
- A senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula.:
- A senha deve conter pelo menos um número.:
- A senha deve conter pelo menos um caractere especial.:
- Caracteres Especiais !@#\$%^&\*.

Botão de ação: Fechar (com ícone de X).

Figura 11 - 41: Política de Senha

4. Selecione **Salvar** para criar a nova conta de usuário ou selecione **Cancelar** para cancelar a operação.

## 11.9.2 Minha conta

Para acessar as informações da conta:

1. No menu suspenso Gerenciamento de usuário, selecione **Minha conta**.
2. A tela de informações da conta mostra o nome de usuário e as informações da conta associada (Figura 11 - 42: Informações da conta).

**Figura 11 - 42: Informações da conta**

3. Para alterar a senha atual, preencha os campos em Alterar senha. A Política de senhas explica como criar uma senha segura. Selecione **Fechar** quando terminar.

**NOTA:** Para modificar a política de senha, entre em contato com a equipe de manutenção ou um representante local designado.

**NOTA:** Se a senha antiga for perdida ou esquecida, contate a Bayer ou crie uma nova conta de usuário.

## 11.10 Paciente anônimo

Use o botão Paciente anônimo para inserir um nome de paciente pré-determinado como placeholder quando não houver informações do paciente disponíveis. Por exemplo, use o botão Paciente anônimo quando não for possível esperar a disponibilidade das informações do paciente para fazer a leitura. Pressionar o botão Paciente anônimo preenche os campos de nome e sobrenome com valores pré-determinados (por exemplo, "John Doe") e apaga outros campos específicos.

**NOTA:** Consulte 5.1.2 - Inserção de paciente anônimo para uma injeção de contraste para obter mais informações sobre como acessar Paciente anônimo pré-injeção.

**NOTA:** Consulte 7.3.3.1 - Atualizar a seleção de Lista de trabalho de pacientes usando Paciente anônimo para obter mais informações sobre como acessar Paciente anônimo pós-injeção.

### 11.10.1 Ativar e configurar paciente anônimo

Os valores de Paciente anônimo são definidos e gerenciados em Paciente anônimo no Gerenciador Certegra. Paciente anônimo deve ser ativado para que os valores possam ser definidos. Faça login no Gerenciador Certegra para acessar Paciente anônimo, listado em Configurações do sistema. Se você já estiver conectado ao Gerenciador Certegra, pule para a etapa 2.

1. Faça login no Gerenciador Certegra. Consulte 8.1 - Login do Gerenciador Certegra para obter instruções.
2. Selecione **Configuração do sistema**.
3. Selecione **Paciente anônimo**.

4. Selecione **Ativar paciente anônimo** (Figura 11 - 43: Opções de configuração do paciente anônimo).

**Figura 11 - 43: Opções de configuração do paciente anônimo**

5. Insira os valores de Paciente anônimo nos campos Nome e Sobrenome (por exemplo, “John Doe”).

6. Selecione **Salvar** para salvar as alterações ou **Cancelar** para cancelá-las.

### 11.11 Solução de problemas do Data Manager

**Tabela 11 - 2: Solução de problemas do Data Manager**

| Erro  | Ação corretiva   |
|---|--|
| O Data Manager não está disponível na estação de monitoramento. | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verifique se o endereço na janela do navegador está correto.</li> <li>◆ Verifique se a Estação de Trabalho Certegra, incluindo o sistema de injeção conectado, está ligada e funcionando.</li> <li>◆ Verifique se a Estação de Trabalho Certegra está conectada à rede do hospital.</li> <li>◆ Siga todos os procedimentos associados ao hardware específico usado com a Certegra.</li> </ul> |
| Não é possível fazer login.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Entre em contato com a equipe de manutenção ou um representante local designado para criar novas contas de usuário ou redefinir a senha de uma conta existente.</li> </ul>  |
| Dados não encontrados.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verifique se os parâmetros dos critérios de pesquisa estão corretos ou use critérios alternativos.</li> </ul>   |
| Impossível realizar backup ou restaurar os dados.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verifique se o local da rede para backup e restauração está acessível a partir da estação de monitoramento.</li> <li>◆ Verifique se existe capacidade de armazenamento suficiente no local de destino do backup.</li> </ul>   |
| Não é possível acessar algumas funções.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verifique se as licenças apropriadas estão associadas ao login do usuário.</li> </ul>   |

Tabela 11 - 2: Solução de problemas do Data Manager

| Erro  | Ação corretiva  |
|---|---|
| As consultas sempre finalizam antes do intervalo de tempo especificado. | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aumente o número máximo de tentativas por consulta.</li> <li>◆ Verifique a definição configurável para nova tentativa de tempo de espera.</li> </ul> |
| Falha na transferência do PACS  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verifique se o PACS está on-line.</li> <li>◆ Verifique se a injeção foi associada automaticamente e se há um valor do UID do estudo.</li> </ul>      |
| Falha na transferência do RIS/VR  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verifique se o RIS/VR está on-line.</li> </ul>   |





## 12 Leitor de código de barras acessório e instalação

### ADVERTÊNCIAS

#### Risco de movimento não intencional do dispositivo ou acessório – Risco de lesão do paciente e/ou operador ou danos ao equipamento.

- ◆ O leitor de código de barras acessório não é seguro para RM (ressonância magnética) e não deve ser usado na sala de exames. O leitor de código de barras acessório é uma ameaça conhecida ou representa um risco em todos os ambientes de RM, conforme definido pelos Padrões Internacionais da ASTM (Sociedade Americana de Ensaios e Materiais) para o Marketing de Dispositivos de IRM.
- ◆ Não faça modificações não autorizadas na injetora ou em qualquer uma de suas partes ou acessórios.

### 12.1 Introdução

O leitor de código de barras acessório (ou leitor de código de barras) é uma eficiente ferramenta de inserção de dados disponível em plataformas de várias injetoras. O leitor de código de barras permite o preenchimento de campos de dados na Estação de Trabalho Certegra, ao digitalizar códigos de barras associados a:

- ◆ identificação de contraste (marca, data de validade e informações de lote),
- ◆ identificadores de gráficos (identificação do paciente/número do registro médico [MRN] ou número de acesso) e
- ◆ identificação de tecnólogo.

O leitor de código de barras realiza operações de inserção de dados e não afeta a operação dos procedimentos de injeção.

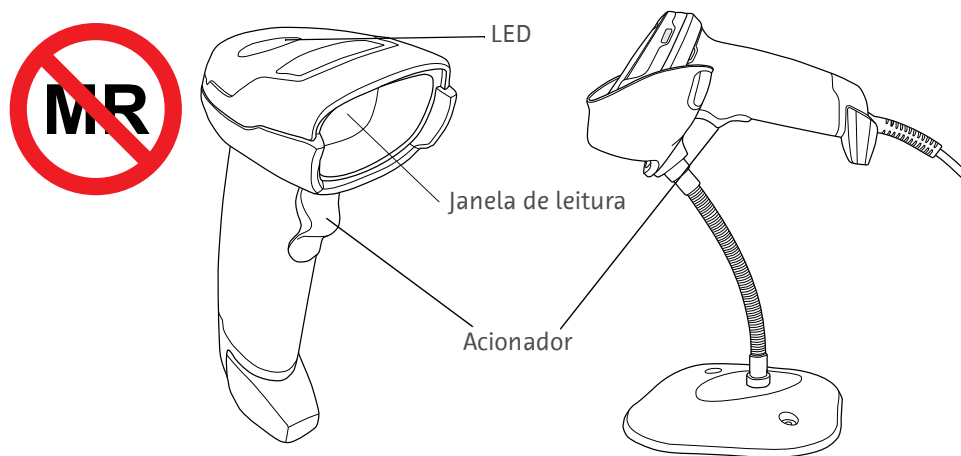


Figura 12 - 1: Leitor de código de barras

**NOTA:** As imagens do leitor do código de barras e do suporte fornecido servem apenas para fins ilustrativos e podem ser ligeiramente diferentes de um acessório para outro.

**Isenções de responsabilidade:** Todas as informações sobre leitores de código de barras e códigos de barras aplicam-se a qualquer modelo de leitor de código de barras vendido pela Bayer, salvo indicação do contrário.

Todas as ações a seguir devem ser realizadas para que o leitor de código de barras possa ser usado com a Estação de Trabalho Certegra:

- ◆ **Leitura do código de barras de inicialização** (12.3 - Leitura do código de barras de inicialização para uso no sistema),
- ◆ **Ative o código de barras** (13.2 - Ative o código de barras), e
- ◆ **Configure os códigos de barras e padrões de código de barras usando a configuração de código de barras** (13.4 - Configure códigos de barras e padrões de código de barras para uso do sistema).

**NOTA:** O leitor de código de barras é fabricado pela Zebra Technologies Corporation e fornecido Bayer mediante contrato.

### 12.1.1 Isenção de responsabilidade

Para que o leitor de código de barras opere com a Estação de Trabalho Certegra, o software da estação de trabalho deve ter a versão 4.5 ou superior.

A conexão do leitor de código de barras a um sistema de injeção incompatível é um tipo de uso não previsto do leitor de código de barras.

O leitor de código de barras não é compatível com a Estação de Trabalho Certegra preta.

## 12.2 Montagem do leitor de código de barras acessório

### 12.2.1 Instale o cabo USB

1. Insira o clipe do conector USB na porta de interface do cabo no leitor de código de barras. O cabo emitirá um clique quando for corretamente inserido na porta.

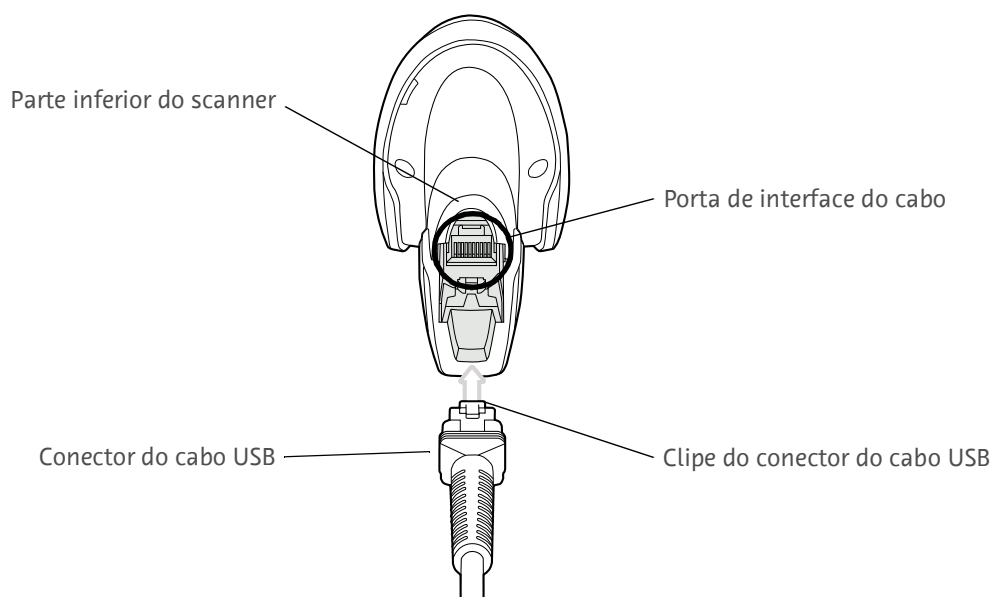


Figura 12 - 2: Instalação do cabo USB

2. Se aplicável, retire a tampa traseira da Estação de Trabalho Certegra usando uma chave de fenda Philips nº 2.  
**NOTA:** Se necessário, incline com cuidado a face da Estação de Trabalho Certegra em uma superfície plana para ter melhor acesso à tampa traseira e às portas USB.
3. Conecte a extremidade USB do cabo à Estação de Trabalho Certegra. O cabo deve ser conectado à Estação de Trabalho Certegra para que o equipamento ligue.

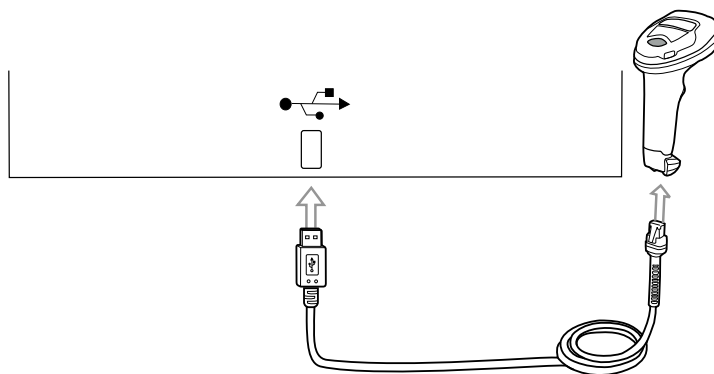


Figura 12 - 3: Conectar o cabo USB à Estação de Trabalho Certegra

4. O leitor de código de barras emite bipes baixos/médios/altos para indicar que está funcionando.
5. Se a tampa traseira da Estação de Trabalho Certegra tiver sido removida, reinstale a tampa traseira usando uma chave de fenda Philips nº 2.

### 12.2.2 Montagem do suporte

Para montar o suporte do leitor de código de barras para varredura automática:

1. Desaparafuse a porca borboleta na parte inferior do "pescoço" do suporte.
2. Encaixe a parte inferior do pescoço flexível na abertura na parte superior da base do suporte.

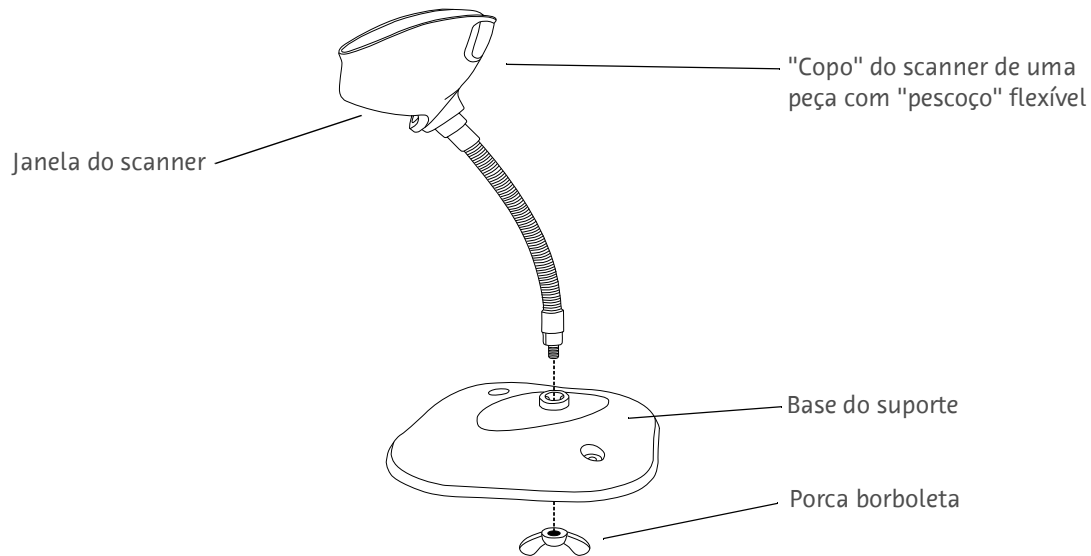


Figura 12 - 4: Montagem do suporte

3. Prenda o "copo" e o pescoço na base apertando a porca borboleta embaixo.
4. Dobre o pescoço conforme necessário para fazer a varredura ideal.

#### 12.2.2.1 Montagem do suporte (opcional)

A base do suporte pode ser montada em uma posição fixa em superfície plana com dois parafusos (não fornecidos).

Para montagem do parafuso:

1. Posicione a base montada em uma superfície plana.
2. Coloque um parafuso nº 10 (não fornecido) em cada orifício de montagem do parafuso até a base do suporte ficar firme. Use uma chave de fenda apropriada para o parafuso selecionado.

### 12.3 Leitura do código de barras de inicialização para uso no sistema

Para configurar o leitor de código de barras para uso com o sistema da injetora:

1. Leia o código de barras em Figura 12 - 5: Código de barras de inicialização.

**NOTA:** Consulte 14.1 - Como utilizar o leitor de código de barras acessório para obter instruções sobre como ler códigos de barras usando o leitor de código de barras.

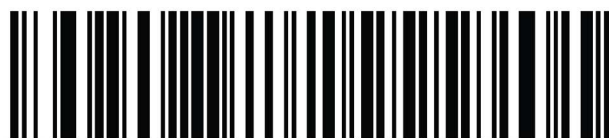


Figura 12 - 5: Código de barras de inicialização

2. O leitor de código de barras emite imediatamente bipes altos/baixos para confirmar que a configuração entre o leitor de código de barras e o sistema da injetora foi concluída.
3. Se ainda não tiver sido concluída, defina códigos de barras para uso do sistema da injetora (13 - Configuração do código de barras) antes de usar o leitor de código de barras com a Estação de Trabalho Certegra.

## 12.4 Verifique a instalação e a configuração para uso

**NOTA:** Se a configuração ainda não tiver sido concluída, consulte 13 - Configuração do código de barras.

1. Digitalize um código de barras pré-configurado ou configurado da Bayer.

**NOTA:** O código de barras não pode ser lido quando a injetora está acionada ou injetando.

**NOTA:** Se o nº de múltiplo acesso estiver ativado e um código de barras do MRN ou número de acesso for digitalizado, consulte 10.3.2 - Selecione os números de acesso usando o leitor de código de barras acessório.

2. Se o código de barras for lido com sucesso:
  - a. O leitor de código de barras emite um bipe alto e curto;
  - b. Os dados digitalizados aparecerão automaticamente no(s) campo(s) aplicáveis; e
  - c. Uma marca de verificação verde aparece sob a área Eventos do painel de informática (Figura 12 - 6: Guia Eventos - Leituras de código de barras).
3. Se o código de barras não for lido com sucesso:
  - a. Um X vermelho aparece sob a área Eventos do painel de informática (Figura 12 - 6: Guia Eventos - Leituras de código de barras). Esta mensagem de erro representa uma leitura de código de barras com falha, um padrão de código de barras não configurado para uso com o sistema ou alguma tentativa de ler um código de barras quando a leitura é proibida pelo sistema.

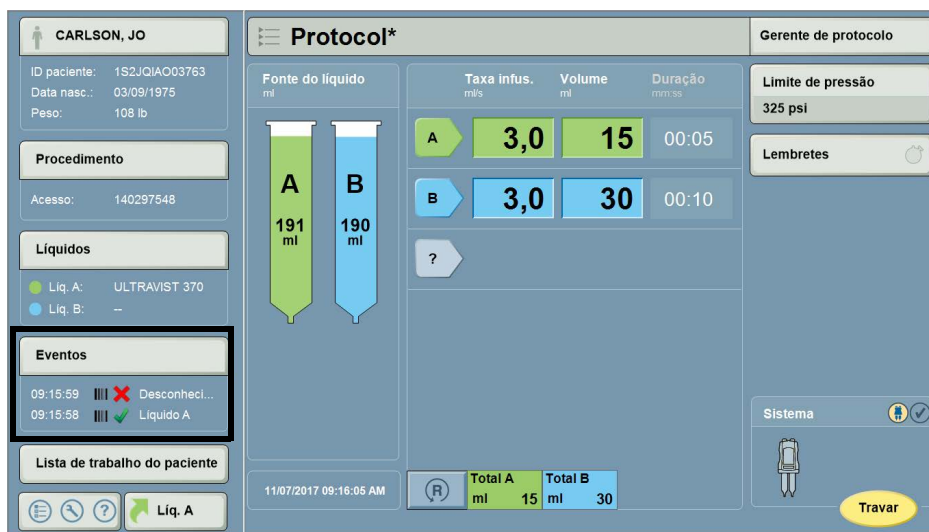


Figura 12 - 6: Guia Eventos - Leituras de código de barras

4. Revise as informações preenchidas para confirmar se foram inseridas corretamente.
5. Para obter informações adicionais sobre como usar o leitor de código de barras com o sistema, consulte 14.2 - Digitalize códigos de barra para a Estação de Trabalho Certegra.

## 13 Configuração do código de barras

### 13.1 Faça login no Gerenciador Certegra

Códigos de barras e padrões de códigos de barras são definidos e gerenciados usando a Configuração de código de barras no Gerenciador Certegra. Para acessar a configuração do código de barras:

1. Faça login no Gerenciador Certegra. Consulte 8.1 - Login do Gerenciador Certegra para obter instruções de login.
2. Selecione **Configuração do sistema**.
3. Selecione **Configuração do código de barras**.
4. A página de configuração do contraste é exibida automaticamente (Figura 13 - 4: Configuração do contraste).

### 13.2 Ative o código de barras

1. Faça login no Gerenciador Certegra. Consulte 8.1 - Login do Gerenciador Certegra para obter instruções.
2. Selecione **Configuração do sistema**.
3. Selecione **Configuração do código de barras**.
4. No menu suspenso Gerenciamento, selecione **Configuração do código de barras**.
  - a. Se a configuração de código de barras não estiver ativada, a página Configuração do código de barras será exibida com uma mensagem.



Figura 13 - 1: Configuração do código de barras não ativada

5. Selecione **Ativar configuração do código de barras**. Uma marca de seleção aparece na caixa.

**NOTA:** Selecionar **Ativar configuração do código de barras** ativa o painel Informática e a Confirmação de dados. A desativação da configuração de código de barras não desativa nenhum reforço.

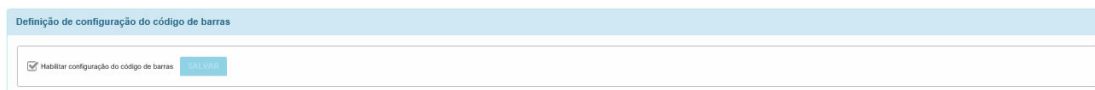


Figura 13 - 2: Configuração do código de barras ativada

6. Selecione **Salvar**.

### 13.3 Código de barras de contraste 2D da Bayer

O contraste da Bayer pode incluir um código de barras 2D, que pode armazenar informações sobre o seguinte: marca do contraste, concentração, tamanho do frasco, data de validade e lote. Consulte Figura 13 - 3: Exemplos de códigos de barras de contraste 2D.

Esses códigos de barras 2D são configurados automaticamente na Estação de Trabalho Certegra e não precisam ser definidos na configuração de código de barras. Digitalize o código de barras 2D da Bayer para preencher as informações de contraste nos campos apropriados.

Se apenas os códigos de barras de contraste 2D da Bayer forem utilizados no local, não será necessária uma configuração adicional de códigos de barras de contraste e padrões de códigos de barras aplicáveis ao contraste. Agora consulte 12.4 - Verifique a instalação e a configuração para uso.



Figura 13 - 3: Exemplos de códigos de barras de contraste 2D

### 13.4 Configure códigos de barras e padrões de código de barras para uso do sistema

Definir códigos de barras de contraste e padrões de código de barras ajuda o leitor a reconhecer informações de códigos de barras codificadas como identificadores específicos. Os códigos de barras de contraste são definidos como caracteres alfanuméricos fixos que representam informações de contraste. Os padrões de código de barras são modelos que identificam as informações variáveis dentro do código de barras (data de validade, lote ou paciente/estudo).

**NOTA:** Recomenda-se configurar códigos de barras ou padrões de códigos de barras que apareçam na embalagem principal/do frasco em vez da embalagem externa.

**NOTA:** O conteúdo incorporado nos códigos de barras varia e depende do fabricante ou do departamento de TI do hospital local. Entre em contato com um deles conforme apropriado se tiver dúvidas sobre o conteúdo do código de barras.

Assim que a configuração tiver sido concluída, consulte 12.4 - Verifique a instalação e a configuração para uso.


#### 13.4.1 Configure o código de barras de contraste

Os códigos de barras na embalagem primária normalmente representam a combinação da marca de contraste, concentração e tamanho do frasco. Os códigos de barras de contrastes podem ser configurados para identificar todas essas informações. As combinações destas informações devem ser configuradas separadamente.

Tabela 13 - 1: Exemplo de códigos de barras de contraste

| Código | Exemplo de código de barras de contraste   | Valor de código de barras inserido  | Conteúdo   |
|--------|--|---|--|
| NDC    | <br>N 3 0270-0445-40 3        | 302700445403<br><b>NOTA:</b> NÃO insira "N" nem traços.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Marca</li> <li>◆ Tamanho do frasco</li> <li>◆ Concentração</li> </ul> |
| GTIN   | <br>NDC No (01)10302641482557 | 0110302641482557<br><b>NOTA:</b> NÃO insira nenhum texto qualificador, como "NDC NO" ou parênteses. | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Marca</li> <li>◆ Tamanho do frasco</li> <li>◆ Concentração</li> </ul> |

Tabela 13 - 1: Exemplo de códigos de barras de contraste

| Código | Exemplo de código de barras de contraste   | Valor de código de barras inserido   | Conteúdo  |
|--------|--|--|---|
| GS1    | <br>(01)30302707099167(17)140900(10)123456L | 01303027070991671714099010<br>123456L<br><br>NÃO insira parênteses. Insira todas as letras e todos os números do código de barras. | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ (01):               <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Marca</li> <li>◆ Tamanho do frasco</li> <li>◆ Concentração</li> </ul> </li> <li>◆ (17):               <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Data de vencimento</li> </ul> </li> <li>◆ (10):               <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lote</li> </ul> </li> </ul> |

**NOTA:** No caso do código GS1, o sistema salvará a parte relevante do GTIN (01) e será configurado para ler as partes restantes.

Para configurar códigos de barras de contraste dentro da Configuração de código de barras, vá até Configuração de contraste dentro da Configuração de código de barras. Para localizar esta página, selecione **Configuração do contraste** no menu suspenso Configuração de conteúdo.



Figura 13 - 4: Configuração do contraste

### 13.4.1.1 Código de barras de contraste 2D que não é da Bayer

Para configurar códigos de barras de contraste 2D em contrastes não fabricados pela Bayer, entre em contato com o fabricante para recuperar as informações armazenadas no código de barras 2D. Esta informação deve ser configurada como se fossem padrões de código de barras 1D separados.

### 13.4.1.2 Adicionar código de barras de contraste

1. Selecione **Adicionar** no cabeçalho **Contraste** (Figura 13 - 4: Configuração do contraste).
2. Uma janela é exibida. Preencha os campos necessários e selecione **Adicionar** quando terminar.

Figura 13 - 5: Código de barras de contraste (CT esquerdo; RM direito)

Tabela 13 - 2: Campos e funções de código de barras de contraste

| Campo de informações      | Função  |
|---------------------------|---|
| Nome da marca             | Identifique o nome da marca do contraste.                         |
| Concentração              | Identifique a concentração do contraste.                          |
| Tamanho do frasco         | Identifique o tamanho do frasco do contraste.                     |
| Dosagem*                  | Identifique a dosagem do contraste.                               |
| Código de barras          | Identifique os números e/ou caracteres do código de barras.       |
| Peso mínimo do paciente*  | Defina o menor peso possível do paciente para o uso de contraste. |
| Peso máximo do paciente*  | Defina o maior peso possível do paciente para o uso de contraste. |
| Idade mínima do paciente* | Defina a menor idade possível para o uso de contraste.            |

\* Apenas RM



### 13.4.1.3 Editar código de barras de contraste

1. Selecione uma entrada em **Contraste** (Figura 13 - 4: Configuração do contraste).
2. Uma janela é exibida. Edite os campos conforme necessário.
3. Selecione **Atualizar** quando terminar.

### 13.4.1.4 Excluir código de barras de contraste

**NOTA:** Excluir um código de barras de contraste na Configuração de código de barras também remove essas informações do uso na Estação de Trabalho Certegra.

1. Selecione uma entrada em **Contraste** (Figura 13 - 4: Configuração do contraste).
2. Uma janela é exibida.
3. Selecione **Excluir**.
4. Um prompt é exibido para confirmação. Selecione **Sim** para excluir o código de barras.

Para remover o código de barras do contraste do uso, mas manter as informações de contraste, siga as etapas em 13.4.1.3 - Editar código de barras de contraste e exclua o código de barras listado. Isso mantém o contraste para uso no sistema, mas desativa qualquer acesso através do código de barras.

### 13.4.1.5 Contraste pré-configurado

Quando ativada, a Configuração de código de barras será automaticamente vinculada à Estação de Trabalho Certegra e compartilhará as informações salvas. Se o contraste já tiver sido programado na Estação de Trabalho Certegra, essas informações serão automaticamente adicionadas à Configuração de código de barras.

Essas entradas na Configuração de código de barras não conterão informações de código de barras; adicione-as e selecione **Atualizar** para salvar o contraste pré-configurado.

**NOTA:** Excluir códigos de barras de contraste na Configuração de código de barras também remove essas informações do uso na Estação de Trabalho Certegra.

## 13.4.2 Configurar o padrão de código de barras (data de validade, lote e paciente/estudo)

Os padrões de código de barras são configurados para identificar:

- ◆ **Data de vencimento do contraste,**
- ◆ **Informações de lote do contraste,** ou
- ◆ **Identificadores de gráficos** (MRN ou número de acesso do paciente).

O padrão de código de barras atribuído a cada um desses três itens será único em sua combinação de comprimento, caracteres e símbolos. Mas, para qualquer padrão, todas as ocorrências de comprimento, caracteres e símbolos devem ser idênticas.

**NOTA:** Se os padrões forem os mesmos para várias marcas de contraste, eles só precisarão ser configurados uma vez. Por exemplo, se várias marcas de contraste tiverem o mesmo modelo de data de validade, apenas um padrão de código de barras de data de validade precisará ser configurado.

**NOTA:** Se a embalagem do contraste não fornecer uma data de vencimento ou um código de barras de lote, não será possível configurar o padrão aplicável.

**NOTA:** Para solução de problemas, consulte 13.5 - Solução de problemas e notas de configuração.

Para configurar padrões de código de barras na Configuração de código de barras, selecione uma das seguintes opções no menu suspenso Configuração de conteúdo.

**Tabela 13 - 3: Onde configurar o padrão de código de barras**

| Menu suspenso de configuração de conteúdo Opção de Menu | Seção de configuração de padrão de código de barras  |
|---|--|
| Configuração do contraste                               | Definição do padrão de código de barras <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Padrão do código de barras de data</li> <li>◆ Padrão de código de barras do lote/remessa</li> </ul> |
| Definição do padrão de código de barras do paciente     | Definição do padrão de código de barras do paciente <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Definições do paciente/estudo</li> </ul>  |

### 13.4.2.1 Adicionar padrão de código de barras

1. Selecione **Adicionar** no cabeçalho da seção apropriada.
2. Uma janela é exibida. Preencha os campos necessários e selecione **Adicionar** quando terminar.

**Figura 13 - 6: Exemplo de padrão do código de barras do paciente/estudo**

**Tabela 13 - 4: Campos e funções de padrão de código de barras**

| Campo de informações            | Função  |
|---------------------------------|---|
| Nome do padrão                  | Nomeie o padrão de código de barras. Por exemplo, "Padrão de validade 1" ou o padrão propriamente dito ("MMAAAA").  |
| Comprimento do código de barras | Identifique o número de caracteres alfanuméricos sob o código de barras. Esta informação é usada para determinar o número de campos necessários para o "Padrão de código de barras". Por exemplo, o comprimento do código de barras "112020" é 6.<br><br><b>NOTA:</b> Não conte traços, barras ou parênteses. |

Tabela 13 - 4: Campos e funções de padrão de código de barras

| Campo de informações       | Função  |
|----------------------------|---|
| Etiqueta DICOM*            | <p>Identifique o padrão de código de barras como MRN do paciente ou número de acesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Um <b>Número de Registro Médico (MRN)</b> é um número ou código primário de identificação hospitalar do paciente.</li> <li>◆ Um <b>Número de acesso</b> é uma série de números que os hospitais usam para identificar um estudo ou procedimento específico.</li> </ul> <p>A etiqueta DICOM está associada ao código de barras do paciente/estudo, que o sistema usa para consultar a Lista de trabalho de modalidade para obter informações do paciente e do estudo.</p>   |
| Padrão de código de barras | <p>Identifique o padrão de código de barras usando caracteres e símbolos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Y – Ano de um dígito (se não for um prefixo ou sufixo)</li> <li>◆ M – Mês de um dígito (se não for um prefixo ou sufixo)</li> <li>◆ D – Dia de um dígito (se não for um prefixo ou sufixo)</li> <li>◆ # – Caractere numérico de um dígito (0-9)</li> <li>◆ @ – Caractere alfabético de um dígito (a-z ou A-Z)</li> <li>◆ * – Caractere alfanumérico de um dígito (0-9, a-z, A-Z)</li> <li>◆ 0-9, a-z, A-Z – O caractere alfanumérico propriamente dito (diferencia maiúsculas de minúsculas, apenas entrada manual)</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> Inserir caracteres especificados (por exemplo, "1" ou "A") - em vez de símbolos ou caracteres variáveis (por exemplo, "#" ou "@") - limitará o padrão do código de barras ao que foi definido. Um código de barras que se desvia do padrão não será lido com sucesso.</p> |
| Prefixo (Opcional)         | Use o campo "Prefixo" para ocultar os caracteres que aparecem no início de um código de barras. Consulte 13.4.2.2 - Configurar o padrão de código de barras para ocultar caracteres (prefixo/sufixo).   |
| Sufixo (Opcional)          | Use o campo "Sufixo" para ocultar os caracteres que aparecem no fim de um código de barras. Consulte 13.4.2.2 - Configurar o padrão de código de barras para ocultar caracteres (prefixo/sufixo).   |

\* Apenas paciente/estudo

### 13.4.2.2 Configurar o padrão de código de barras para ocultar caracteres (prefixo/sufixo)

**NOTA:** Nem todo código de barras contém um prefixo e/ou sufixo. Configure o prefixo e/ou sufixo conforme necessário.

(Opcional) Configure um prefixo e/ou sufixo em um padrão de código de barras para ocultar caracteres que aparecem no início ou no final do código de barras. Por exemplo, um MRN de um paciente em um hospital pode sempre começar com "MRN"; se esses três caracteres extras forem considerados desnecessários, o código de barras pode ser configurado para removê-los.

Um prefixo e/ou sufixo pode ser definido para os seguintes padrões de código de barras:

- ◆ **Data de vencimento:** A definição de um prefixo e/ou sufixo elimina partes dos dados de código de barras codificados do valor que aparece como a data de validade na guia Líquido A do painel Informática.
- ◆ **Lote:** A definição de um prefixo e/ou sufixo elimina partes dos dados de código de barras codificados do valor que aparece como o lote na guia Líquido A do painel Informática.
- ◆ **Paciente/estudo:** A definição de um prefixo e/ou sufixo elimina partes dos dados de código de barras codificados do valor que é usado para consultar informações do paciente e do estudo na Lista de trabalho de modalidade.

Digite o comprimento do código de barras e o padrão do código de barras primeiro e, depois, configure o prefixo/sufixo conforme necessário.

**NOTA:** O uso de caracteres ou símbolos que não correspondem ao campo “Padrão de código de barras” resulta em uma mensagem de erro.

**NOTA:** Quando configurado, o prefixo e/ou sufixo ficará acinzentado no campo “Padrão de código de barras”.

Na Figura 13 - 7: Prefixo/sufixo, o padrão de código de barras estabelecido é “\*\*\*###@.” Neste exemplo, o “\*\*\*” e o “@” foram determinados como desnecessários; portanto, esses valores são configurados como prefixo e sufixo, respectivamente, de forma a remover essas informações do código de barras.

Padrão de código de barras do lote/remessa do contraste

● NOME DO PADRÃO  
Lot Pattern 1

● COMPRIMENTO DO CÓDIGO DE BARRAS  
6

● PADRÃO DE CÓDIGO DE BARRAS  
\* \* # # # @

● PREFIXO  
\*\*

● SUFIXO  
@

● Instruções  
Clique [aqui](#) para abrir o PDF de instrução para criar padrões de código de barras.

✕ Cancelar ✓ Adicionar

Figura 13 - 7: Prefixo/sufixo

### 13.4.2.3 Editar padrão de código de barras

1. Selecione uma entrada na seção apropriada.
2. Uma janela é exibida. Edite os campos conforme necessário.
3. Selecione **Atualizar** quando terminar.

### 13.4.2.4 Excluir padrão de código de barras

1. Selecione uma entrada na seção apropriada.
2. Uma janela é exibida.
3. Selecione **Excluir**.
4. Um prompt é exibido para confirmação. Selecione **Sim** para excluir o código de barras.

### 13.4.3 Configure o código de barras de tecnólogo

Os códigos de barras do tecnólogo são configurados para identificar o tecnólogo. Os códigos de barras do tecnólogo não devem variar; portanto, o valor do código de barras sempre será vinculado ao tecnólogo configurado na Configuração de código de barras.

Para configurar códigos de barras de tecnólogo na Configuração de código de barras, selecione Configuração de tecnólogo no menu suspenso Configuração de conteúdo.



Figura 13 - 8: Configuração de tecnólogo

#### 13.4.3.1 Adicionar código de barras de tecnólogo

1. Selecione **Adicionar** no cabeçalho **Tecnólogo**.
2. Uma janela é exibida. Preencha os campos necessários e selecione **Adicionar** quando terminar.

Figura 13 - 9: Tecnólogo

Tabela 13 - 5: Campos e funções de padrão de código de barras

| Campo de informações       | Função  |
|----------------------------|---|
| Código de barras do crachá | Identifique os números e/ou caracteres do código de barras. |
| ID tecn.                   | Identifique o nome do tecnólogo.                            |

### 13.4.3.2 Editar código de barras de tecnólogo

1. Selecione uma entrada em **Tecnólogo**.
2. Uma janela é exibida. Edite os campos conforme necessário.
3. Selecione **Atualizar** quando terminar.

### 13.4.3.3 Excluir código de barras de tecnólogo

1. Selecione uma entrada em **Tecnólogo**.
2. Uma janela é exibida.
3. Selecione **Excluir**.
4. Um prompt é exibido para confirmação. Selecione **Sim** para excluir o código de barras.

### 13.4.3.4 Importar código de barras de tecnólogo

Na seção Importar, selecione **Substituir** ou **Anexar exclusivo**. Selecione **Procurar**, e escolha o arquivo especificado para envio. Selecione **Abrir**, e o caminho do arquivo aparece na janela Importar. Selecione **Importar**.

**NOTA:** Selecionar **Substituir** substitui as informações existentes do tecnólogo por novos dados que estão sendo importados. Selecionar **Anexar exclusivo** adiciona novas informações do tecnólogo que estão sendo importadas e mantém as informações existentes.

### 13.4.3.5 Procurar tecnólogo

Digite o código de barras de crachá ou ID do tecnólogo na ferramenta de pesquisa. Os resultados da pesquisa são exibidos na seção Tecnólogo.

### 13.4.3.6 Editar o ID do tecnólogo exibido na Estação de Trabalho Certegra

Na seção Tecnólogo, selecione **BADGEBARCODE** para exibir o código de barras de crachá do tecnólogo ou **TECHID** para exibir o ID do tecnólogo. Selecione **Salvar** quando terminar.

## 13.4.4 Exportar configurações de código de barras

Para exportar configurações de código de barras de TC ou RM:

1. No menu suspenso Gerenciamento, selecione **Exportar**.
2. Selecione **Exportar**.

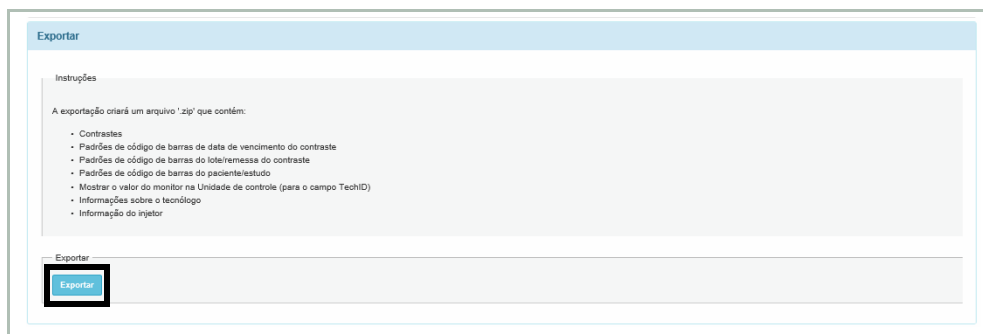


Figura 13 - 10: Exportar

- Quando as configurações de código de barras são exportadas, uma confirmação é exibida. A caixa Resultado fornece um resumo dos tipos e do número de arquivos exportados.

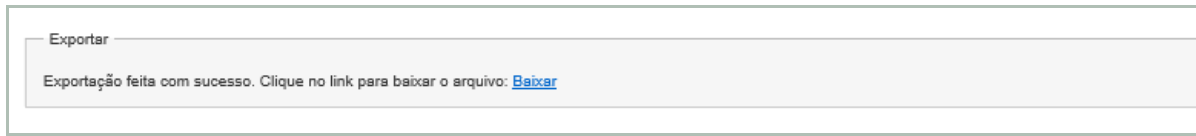


Figura 13 - 11: Exportação bem-sucedida

- Selecione **Baixar** para baixar o arquivo.

### 13.4.5 Importar configurações de código de barras

**NOTA:** Se estiver importando configurações de uma modalidade diferente (TC ou RM), a configuração de código de barras bloqueará automaticamente as informações de contraste conflitantes. As informações de contraste não conflitantes serão importadas.

Para importar configurações de código de barras de TC ou RM:

- No menu suspenso Gerenciamento, selecione **Importar**.

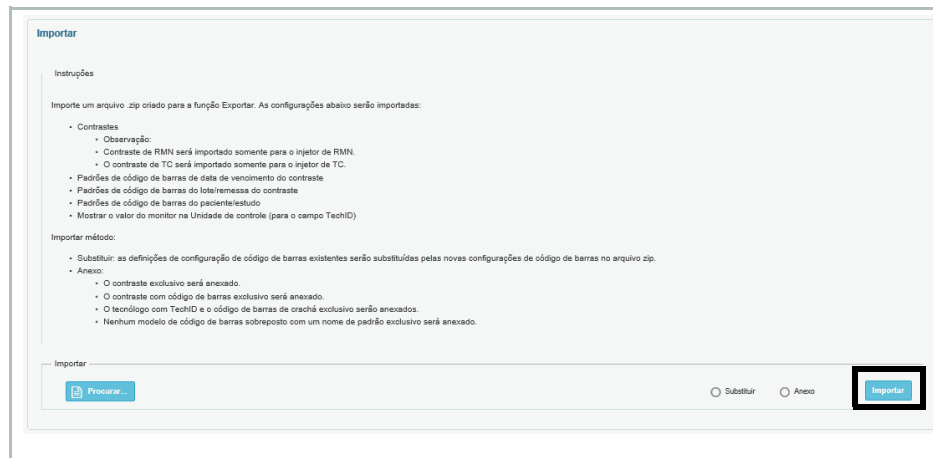


Figura 13 - 12: Importar

- Na seção Importar, selecione **Substituir** ou **Anexar exclusivo**.

**NOTA:** Selecionar **Substituir** substitui as configurações de código de barras existentes por novos dados que estão sendo importados. Selecionar **Anexar exclusivo** adiciona novas configurações de código de barras que estão sendo importadas e mantém as configurações existentes.

- Selecione **Procurar**.
- Escolha o arquivo especificado para upload e selecione **Abrir**.
- O caminho do arquivo aparece na janela Importar. Se o arquivo correto for selecionado, selecione **Importar**.
- Quando as configurações de código de barras são importadas, a caixa Resultado fornece um resumo das configurações de código de barras que foram exportadas com e sem êxito.
- Para copiar o resumo dos tipos e do número de arquivos exportados, selecione **Clique para copiar para a área de transferência**.
- Para verificar se os dados de configuração foram importados, procure os padrões de código de barras listados em Configuração de conteúdo. Se a importação tiver sido bem-sucedida, os padrões de código de barras importados serão exibidos.

### 13.5 Solução de problemas e notas de configuração

Os erros a seguir podem ocorrer ao configurar padrões de código de barras:

- ◆ **Nome do padrão de código de barras duplicado:** Ocorre uma mensagem de erro se você adicionar ou editar um padrão de código de barras com o mesmo nome de um padrão existente. Se esse erro ocorrer, renomeie o padrão de código de barras.
- ◆ **Código de barras duplicado:** Ocorre uma mensagem de erro se você adicionar ou editar um padrão de código de barras que é uma duplicata de um padrão existente. Um padrão de código de barras só precisa ser configurado uma vez.
- ◆ **Sobreposição de padrões:** Ocorre uma mensagem de erro se você adicionar ou editar um padrão de código de barras com o mesmo número de caracteres de um padrão existente. O leitor de código de barras não diferenciará dois padrões de código de barras diferentes com o mesmo número de dígitos. Selecione **Cancelar** para desconsiderar as alterações ou exclua o padrão sobreposto e reinsira o novo padrão.

**NOTA:** As mensagens de erro na tela podem ocorrer e fornecer instruções para solucionar problemas de inserção de dados. Se não for possível resolver o problema seguindo as instruções exibidas, entre em contato com a equipe de manutenção.

A seguir, são apresentadas notas gerais a serem consideradas ao configurar códigos de barras e padrões de códigos de barras:

- ◆ **Código de barras não identificado:** O código de barras ou padrão de código de barras não pode ser configurado se um código de barras não for acompanhado por números ou caracteres. Entre em contato com o fabricante para obter as informações armazenadas no código de barras.
- ◆ **Código de barras faltando:** O padrão de código de barras ou código de barras não pode ser configurado se a embalagem ou o rótulo de contraste não fornecer um código de barras para obter informações específicas. Entre em contato com o fabricante.
- ◆ **Campos necessários:** Determinados campos de informação são necessários. Uma mensagem de erro será exibida se nenhuma informação for inserida nesses campos quando **Adicionar** ou **Atualizar** estiver selecionado.
- ◆ **Janela de dica:** Os campos de informação podem ser acompanhados por um símbolo para indicar que informações adicionais estão disponíveis. Selecione o símbolo para ver a dica.

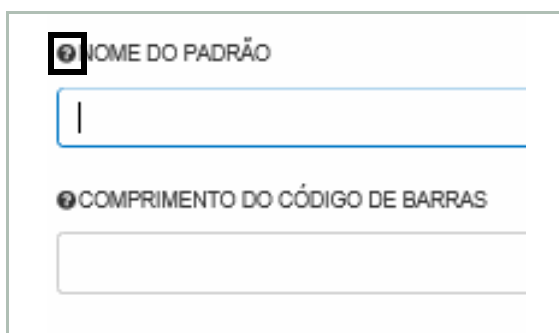


Figura 13 - 13: Janela de dica



## 14 Informações gerais do código de barras



### ADVERTÊNCIAS

#### Risco de movimento não intencional do dispositivo ou acessório – Risco de lesão do paciente e/ou operador ou danos ao equipamento.

- ◆ O leitor de código de barras acessório não é seguro para RM (ressonância magnética) e não deve ser usado na sala de exames. O leitor de código de barras acessório é uma ameaça conhecida ou representa um risco em todos os ambientes de RM, conforme definido pelos Padrões Internacionais da ASTM (Sociedade Americana de Ensaio e Materiais) para o Marketing de Dispositivos de IRM.
- ◆ Não faça modificações não autorizadas na injetora ou em qualquer uma de suas partes ou acessórios.

### 14.1 Como utilizar o leitor de código de barras acessório

#### 14.1.1 Varredura portátil

1. Escolha o leitor de código de barras. Um ponto de mira é exibido.

**NOTA:** O ponto de mira fica menor quando o leitor de código de barras está mais perto do código de barras e maior quando está mais afastado. Os códigos de barras com barras ou elementos menores devem ser lidos mais próximos do leitor, enquanto os códigos de barras com barras ou elementos maiores devem ser lidos mais distantes do leitor.

2. Verifique se o ponto de mira está centralizado no código de barras.

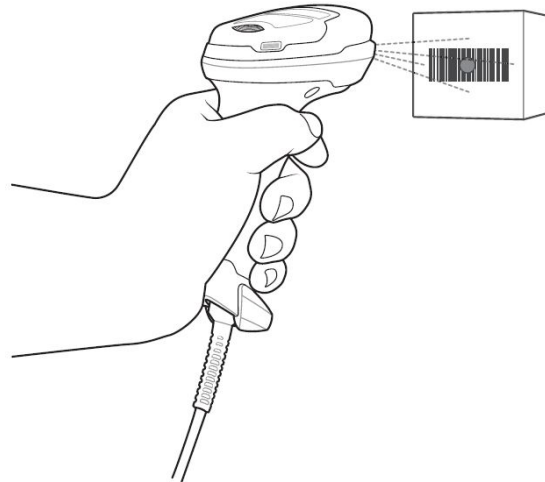


Figura 14 - 1: Centralização do ponto de mira

3. Pressione e mantenha pressionado o gatilho até:

- a. O código de barras ser lido. O leitor emitirá um bip, o LED piscará e o ponto de mira apagará.

**NOTE:** Se o código de barras de inicialização (12.3 - Leitura do código de barras de inicialização para uso no sistema) ainda não tiver sido lido, o leitor de código de barras emitirá quatro bipes baixos. O leitor de código de barras deve ser configurado para uso com o sistema da injetora para que as informações do código de barras sejam lidas e reconhecidas pela Estação de Trabalho Certegra. Consulte 12 - Leitor de código de barras acessório e instalação.

- b. Ou o código de barras não ser lido e, nesse caso, o ponto de mira apagará.

### 14.1.2 Varredura automática

Quando colocado no suporte, o leitor de código de barras opera continuamente. Isso permite fazer a leitura automática quando o código de barras está no campo de visão do leitor.

Quando o leitor de código de barras não for usado por um período predeterminado, ele entrará no modo de baixo consumo de energia e o LED apagará.

Para operar o código de barras no suporte:

1. Verifique se o cabo USB está devidamente conectado ao leitor de código de barras. Consulte 12.2.1 - Instale o cabo USB para obter instruções de conexão.
2. Insira o leitor de código de barras no suporte. Verifique se a parte frontal do leitor está devidamente colocada no "copo" do suporte.

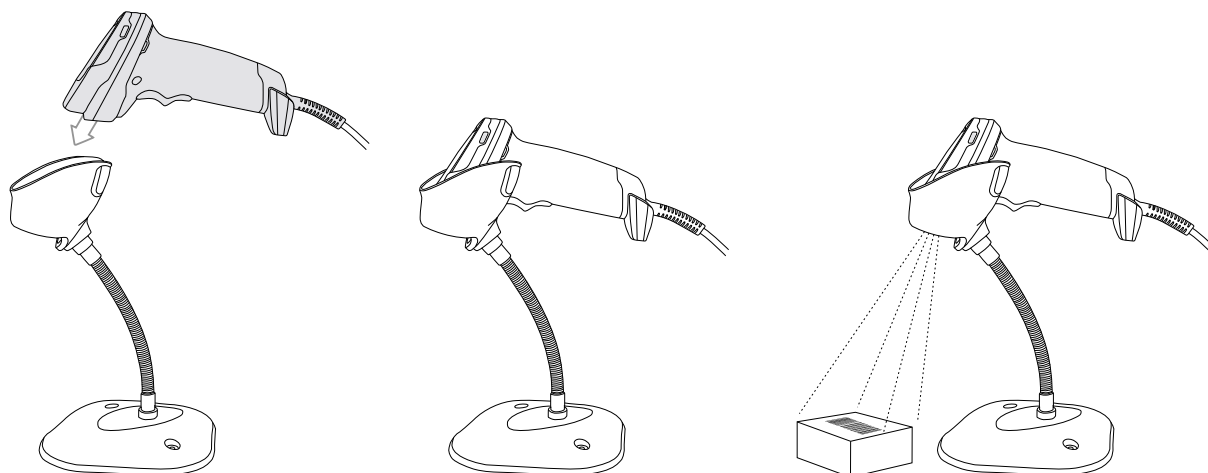


Figura 14 - 2: Inserir o scanner no suporte

3. Ajuste o ângulo de varredura dobrando o pescoço do suporte conforme necessário.
4. Coloque o código de barras no campo de visão do leitor.
5. Se o código de barras tiver sido lido, o leitor emitirá um breve bipe alto e o LED apagará momentaneamente.

### 14.1.3 Bipes e indicações de LED

O leitor de código de barras emite uma série de bipes e luzes de LED coloridas para indicar o status do leitor de código de barras ou da leitura do código de barras.

Tabela 14 - 1: Bipes do leitor de código de barras

| Sequência de tons          | Explicação  |
|----------------------------|---|
| Bipe baixo/médio/alto      | Leitor de código de barras ligando  |
| Bipe alto curto            | Código de barras lido.  |
| 4 bipes baixos longos      | Erro de transmissão. Consulte a Tabela 14 - 4: Solução de problemas para obter mais informações.  |
| Bipe alto/baixo/alto/baixo | Código de barras de inicialização lido. Consulte 12.3 - Leitura do código de barras de inicialização para uso no sistema para obter mais informações. |

**Tabela 14 - 2: Indicações de varredura portátil**

| Indicação de LED | Explicação   |
|------------------|--|
| Desligado        | O leitor de código de barras está ligado e pronto para ler ou não há fonte de alimentação no leitor de código de barras. |
| Verde            | Código de barras lido.   |
| Vermelha         | Erro de transmissão. Consulte a Tabela 14 - 4: Solução de problemas para obter mais informações.                         |

**Tabela 14 - 3: Indicações de varredura automática**

| Indicação de LED          | Explicação   |
|---------------------------|--|
| Desligado                 | Não há fonte de alimentação no leitor de código de barras.                                       |
| Verde                     | Pronto para ler.   |
| Desligado momentaneamente | Código de barras lido.   |
| Vermelha                  | Erro de transmissão. Consulte a Tabela 14 - 4: Solução de problemas para obter mais informações. |

### 14.1.4 Retorno tátil (vibração)

O código de barras oferece adicionalmente um retorno tátil (vibração) após uma leitura de código de barras bem-sucedida. O retorno tátil varia de acordo com o modelo do leitor de código de barras, que pode ser encontrado na parte superior do leitor. Além disso, o leitor de código de barras DS4308 produz retorno sonoro em uma leitura bem-sucedida. Segurar o gatilho no leitor de código de barras por 15 segundos coloca o leitor de código de barras no modo de vibração. Para reverter a configuração de vibração novamente para retorno sonoro, segure o gatilho no leitor de código de barras por 15 segundos. O leitor de código de barras DS4308 não fornece retorno sonoro e por vibração simultaneamente.

Além disso, o leitor de código de barras DS46 fornece retorno sonoro e tátil em uma leitura bem-sucedida. Segurar o gatilho no leitor de código de barras por 15 segundos coloca o leitor de código de barras apenas no retorno tátil. Para reverter a configuração de retorno sonoro para tátil novamente para retorno de áudio, segure o gatilho no leitor de código de barras por 15 segundos. Além disso, o retorno tátil pode ser habilitado ou desabilitado lendo os códigos de barras abaixo.

## 14.2 Digitalize códigos de barra para a Estação de Trabalho Certegra

**NOTA:** Siga todas as etapas descritas em 12 - Leitor de código de barras acessório e instalação antes de utilizar o leitor de códigos de barra com a Certegra Workstation.

### 14.2.1 Digitalização de códigos de barras pré-injeção

1. Digitalize um código de barras pré-configurado ou configurado da Bayer.

**NOTA:** O código de barras não pode ser lido quando a injetora está acionado ou injetando.

**NOTA:** Os códigos de barras podem ser lidos em qualquer ordem.

**NOTA:** Se o nº de múltiplo acesso estiver ativado e um código de barras do MRN ou número de acesso for digitalizado, consulte 10.3.2 - Selecione os números de acesso usando o leitor de código de barras acessório.

2. Se o código de barras for lido com sucesso:
  - a. O leitor de código de barras emite um bipe alto e curto;
  - b. Os dados digitalizados aparecerão automaticamente:

- i. no painel de informática se o código de barras for lido a partir da tela principal da Estação de Trabalho Certegra, ou
  - ii. no(s) campo(s) aplicáveis se o código de barras for lido com a janela de informações do paciente aberta; e
- c. Uma marca de verificação verde aparece sob a área Eventos do painel de informática (Figura 14 - 3: Guia Eventos - Leituras de código de barras). O campo exibe o nome do campo preenchido e um carimbo de data e hora da leitura.
3. Se o código de barras não for lido com sucesso:
- a. Um X vermelho aparece sob a área Eventos do painel de informática (Figura 14 - 3: Guia Eventos - Leituras de código de barras). Esta mensagem de erro representa uma leitura de código de barras com falha, um padrão de código de barras não configurado para uso com o sistema ou alguma tentativa de ler um código de barras quando a leitura é proibida pelo sistema.

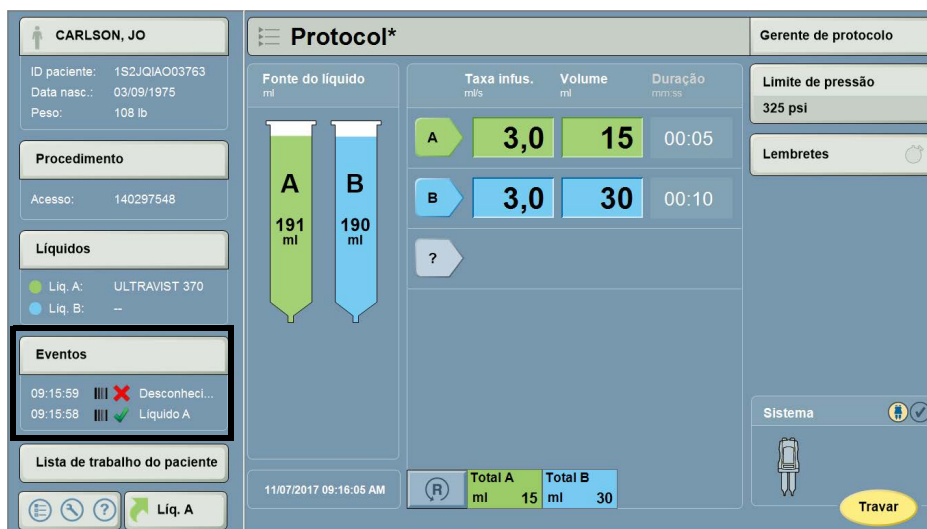


Figura 14 - 3: Guia Eventos - Leituras de código de barras

**NOTA:** Para obter mais informações, selecione a área Eventos no painel Informática para exibir a guia Eventos.

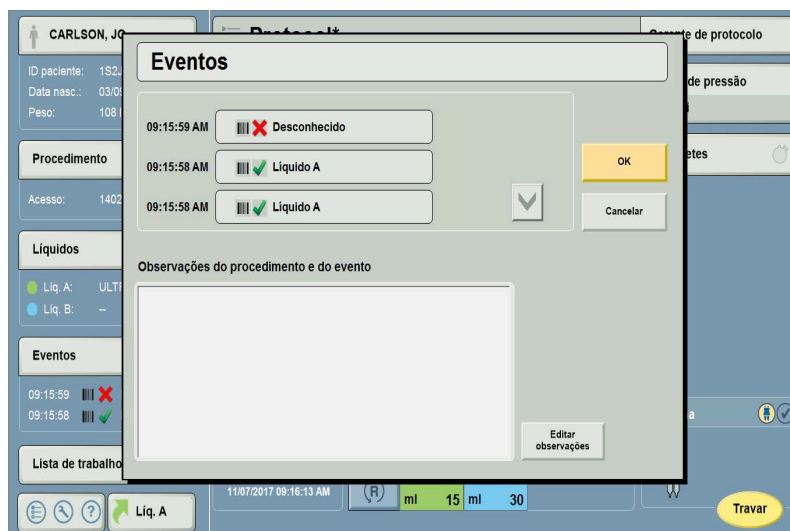


Figura 14 - 4: Detalhes da guia Eventos - Leituras de código de barras

## 14.2.2 Leitura de códigos de barras pós-injeção

As informações do paciente e do procedimento exibidas na janela Confirmação de dados podem ser atualizadas pós-injeção usando o leitor de código de barras. Consulte 7 - Confirmação dos dados para obter mais informações sobre Confirmação de dados.

1. Depois que a injeção é concluída, a janela Confirmação de dados é exibida.

| Confirmação dos dados  |   |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
|--|---|--------------------|-------------------------------|----------|------------|--------|---------------------|---------|---|------------------|-------|----------------|---------|--------|-------|---------------------|--|------------------------------|--|------------------|----|-------------------|----|---------------------|----|-------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|---|-----------------------------|-------------------|
| Estas informações serão capturadas no registro eletrônico do paciente.   |   |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Editar dados do paciente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ID do paciente:</td> <td>12345678</td> </tr> <tr> <td>Sobrenome:</td> <td>VARGAS</td> </tr> <tr> <td>Nome:</td> <td>LUCILLE</td> </tr> <tr> <td>Data de nascimento:</td> <td>04/24/1967</td> </tr> <tr> <td>Peso:</td> <td>282 lb</td> </tr> <tr> <td>Altura:</td> <td>170 cm</td> </tr> <tr> <td>Sexo:</td> <td>Feminino</td> </tr> </tbody> </table> | Editar dados do paciente                |                    | ID do paciente:               | 12345678 | Sobrenome: | VARGAS | Nome:               | LUCILLE | Data de nascimento:   | 04/24/1967       | Peso: | 282 lb         | Altura: | 170 cm | Sexo: | Feminino            | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Editar dados do procedimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ID do tecnólogo:</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Local da injeção:</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Calibre do cateter:</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Número de acesso:</td> <td>284405480 (2)</td> </tr> <tr> <td>ID do estudo:</td> <td>JT444158060</td> </tr> <tr> <td>Descrição do estudo:</td> <td>70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST</td> </tr> <tr> <td>Chave de integração do RIS:</td> <td>EPIC284405480 (2)</td> </tr> </tbody> </table> | Editar dados do procedimento |  | ID do tecnólogo: | -- | Local da injeção: | -- | Calibre do cateter: | -- | Número de acesso: | 284405480 (2) | ID do estudo: | JT444158060 | Descrição do estudo: | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST | Chave de integração do RIS: | EPIC284405480 (2) |
| Editar dados do paciente   |   |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| ID do paciente:  | 12345678                                |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Sobrenome:   | VARGAS                                  |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Nome:  | LUCILLE                                 |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Data de nascimento:  | 04/24/1967                              |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Peso:  | 282 lb                                  |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Altura:  | 170 cm                                  |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Sexo:  | Feminino                                |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Editar dados do procedimento   |   |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| ID do tecnólogo:   | --                                      |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Local da injeção:  | --                                      |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Calibre do cateter:  | --                                      |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Número de acesso:  | 284405480 (2)                           |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| ID do estudo:  | JT444158060                             |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Descrição do estudo:   | 70552 - BRAIN WITH AND WITHOUT CONTRAST |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Chave de integração do RIS:  | EPIC284405480 (2)                       |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Editar Líquido A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo da fonte:</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Lote:</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Data de vencimento:</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>  | Editar Líquido A                        |                    | Tipo da fonte:                | --       | Lote:      | --     | Data de vencimento: | --      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Editar Líquido B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo da fonte:</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Lote:</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Data de vencimento:</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table> | Editar Líquido B |       | Tipo da fonte: | --      | Lote:  | --    | Data de vencimento: | --   |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Editar Líquido A   |   |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Tipo da fonte:   | --                                      |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Lote:  | --                                      |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Data de vencimento:  | --                                      |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Editar Líquido B   |   |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Tipo da fonte:   | --                                      |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Lote:  | --                                      |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Data de vencimento:  | --                                      |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Editar observações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">--</td> </tr> </tbody> </table>  |   | Editar observações |                               | --       |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Editar observações   |   |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| --   |   |                    |                               |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| <table border="0"> <tr> <td> Líquido A</td> <td>Lista de trabalho do paciente</td> <td>Voltar</td> <td>Salvar</td> </tr> </table>  |   | Líquido A          | Lista de trabalho do paciente | Voltar   | Salvar     |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |
| Líquido A  | Lista de trabalho do paciente           | Voltar             | Salvar                        |          |            |        |                     |         |   |                  |       |                |         |        |       |                     |  |                              |  |                  |    |                   |    |                     |    |                   |               |               |             |                      |   |                             |                   |

Figura 14 - 5: Janela Confirmação de dados

2. Digitalize um código de barras pré-configurado ou configurado da Bayer.
 

**NOTA:** O código de barras não pode ser lido quando a injetora está acionado ou injetando.

**NOTA:** Os códigos de barras podem ser lidos em qualquer ordem.

**NOTA:** Se o nº de múltiplo acesso estiver ativado e um código de barras do MRN ou número de acesso for digitalizado, consulte 10.3.2 - Selecione os números de acesso usando o leitor de código de barras acessório.
3. Se o código de barras for lido com sucesso:
  - a. O leitor de código de barras emite um bipe alto e curto;
  - b. Os dados digitalizados aparecerão automaticamente:
    - i. no(s) campo(s) aplicáveis na janela Confirmação dos dados, ou
    - ii. no(s) campo(s) aplicáveis se a janela de informações do paciente estiver aberta. Selecione **OK** para aceitar as alterações feitas ou selecione **Cancelar** para cancelá-las.
4. Na janela Confirmação de dados, selecione **Salvar** para salvar as alterações feitas.

### 14.3 Solução de problemas do leitor de código de barras acessório

**NOTA:** As mensagens de erro na tela podem ocorrer e fornecer instruções para solucionar problemas de inserção de dados. Se não for possível resolver o problema seguindo as instruções exibidas, entre em contato com a equipe de manutenção.

**Tabela 14 - 4: Solução de problemas**

| Erro  | Explicação   |
|---|--|
| O ponto de mira não aparece.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Não há fonte de alimentação no leitor de código de barras. Conecte o leitor de código de barras à fonte de alimentação.</li> <li>◆ Segurar o gatilho no leitor de código de barras por 10 segundos desliga o ponto de mira. Solte o gatilho para que o ponto de mira reapareça.</li> <li>◆ Segurar o gatilho no leitor de código de barras por 15 segundos coloca o leitor de código de barras no modo de vibração. Para reverter a configuração de vibração novamente para retorno sonoro, segure o gatilho no leitor de código de barras por 15 segundos.</li> </ul>              |
| O leitor lê os códigos de barras, mas não transmite dados.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ O cabo USB está solto. Reconecte o cabo USB.</li> <li>◆ O código de barras está ilegível. Verifique se o código de barras não está danificado lendo um código de barras de teste do mesmo tipo.</li> <li>◆ O leitor de código de barras não está devidamente configurado. Consulte 12 - Leitor de código de barras acessório e instalação.</li> </ul>   |
| O leitor não consegue ler o código de barras.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ O leitor de código de barras não está programado para o tipo de código de barras. O erro aparece como um X vermelho na área Eventos do painel Informática. Consulte 4.6.1 - Visualizar informações de eventos para obter mais informações.</li> <li>◆ O código de barras está fora da área do ponto de mira. Consulte Figura 14 - 1: Centralização do ponto de mira para mover o ponto de mira corretamente sobre o código de barras.</li> </ul>  |
| Os dados lidos não são exibidos na Estação de Trabalho Certegra.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ O código de barras está ilegível. Verifique se o código de barras não está danificado lendo um código de barras de teste do mesmo tipo.</li> <li>◆ Verifique a configuração da Estação de Trabalho Certegra. Consulte 12 - Leitor de código de barras acessório e instalação.</li> <li>◆ Redefina para as configurações de fábrica. Consulte 14.3.1 - Redefinir parâmetros padrão (opcional).</li> <li>◆ Se reconfigurar o sistema e redefinir o leitor de código de barras para as configurações de fábrica não funcionar, entre em contato com a equipe de manutenção.</li> </ul> |
| Os dados lidos exibidos na Estação de Trabalho Certegra estão incorretos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verifique se as configurações de código de barras definidas estão corretas. Consulte 13.4 - Configure códigos de barras e padrões de código de barras para uso do sistema.</li> <li>◆ Verifique a configuração da Estação de Trabalho Certegra. Consulte 13 - Configuração do código de barras.</li> <li>◆ Redefina para as configurações de fábrica. Consulte 14.3.1 - Redefinir parâmetros padrão (opcional).</li> <li>◆ Se o problema continuar depois que você tentar as três sugestões acima, entre em contato com a equipe de manutenção.</li> </ul>                          |

### 14.3.1 Redefinir parâmetros padrão (opcional)

1. Para redefinir parâmetros padrão, leia o código de barras em Figura 14 - 6: Redefinir código de barras de parâmetros padrão.



**Figura 14 - 6: Redefinir código de barras de parâmetros padrão**

2. O leitor de código de barras deve ser reiniciado para ser usado com o sistema da injetora. Consulte 12.3 - Leitura do código de barras de inicialização para uso no sistema para obter mais instruções.


### 14.3.2 Remoção do cabo USB se necessário

**NOTA:** O leitor de código de barras não ligará se o cabo não estiver conectado à Estação de Trabalho Certegra.

1. Se aplicável, retire a tampa traseira da Estação de Trabalho Certegra usando uma chave de fenda Philips nº 2.

**NOTA:** Se necessário, incline com cuidado a face da Estação de Trabalho Certegra em uma superfície plana para ter melhor acesso à tampa traseira e às portas USB.

2. Remova o cabo USB da Estação de Trabalho Certegra.
3. Usando uma chave de fenda chanfrada ou plana, pressione o clipe do conector do cabo USB pelo slot de acesso localizado na base do leitor de código de barras.

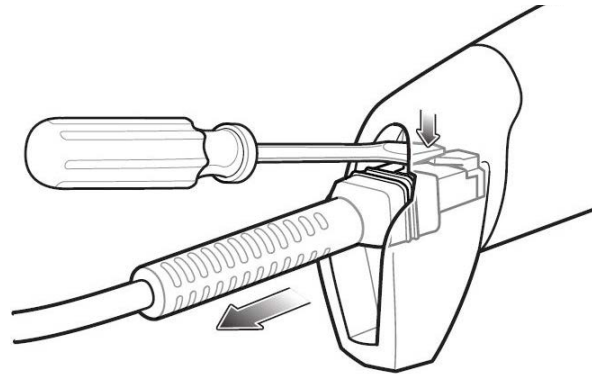

**Figura 14 - 7: Remoção do cabo USB**

4. Retire o cabo com cuidado.
5. Para reconectar o cabo USB ao leitor de código de barras, consulte 12.2.1 - Instale o cabo USB.
6. Caso não reconecte o leitor de código de barras à Estação de Trabalho Certegra, reinstale a tampa traseira (se removida) usando uma chave de fenda Philips nº 2.

## 14.4 Manutenção e limpeza

### 14.4.1 Geral

Esta seção contém os procedimentos recomendados para manutenção e limpeza do leitor de código de barras. A manutenção e inspeção de rotina garantem o desempenho contínuo do leitor de código de barras e reduzem a possibilidade de mau funcionamento do equipamento.

O leitor de código de barras deve receber manutenção adequada para garantir que esteja em perfeitas condições de operação. A programação de cada manutenção depende de como o leitor de código de barras é usado e da frequência de uso. Em geral:

- ◆ Não permita o contato de material abrasivo com a janela.
- ◆ Retire as partículas de sujeira com um pano úmido.
- ◆ Limpe a janela usando um pano umedecido com um produto de limpeza aprovado (listado abaixo).
- ◆ Não pulverize água ou outros líquidos de limpeza diretamente na janela.

O fabricante testou e aprovou os seguintes produtos de limpeza:

**NOTA:** Produtos de limpeza que possuem os princípios ativos não listados abaixo não devem ser usados no leitor de código de barras.

- ◆ Álcool isopropílico
- ◆ Alvejante/hipoclorito de sódio
- ◆ Água oxigenada
- ◆ Detergente neutro e água

#### 14.4.2 Diariamente

1. Umedeça um pano com um dos produtos de limpeza aprovados listados em 14.4.1 - Geral ou use lenços pré-umedecidos.
2. Limpe com cuidado todas as superfícies, incluindo a parte frontal, a traseira, as laterais, a parte superior e a parte inferior do leitor de código de barras. Nunca aplique líquido diretamente no scanner. Tome cuidado para não deixar líquido acumulado ao redor da janela do scanner, do gatilho, do conector do cabo ou em alguma outra área.
3. Limpe o gatilho e os espaços entre o gatilho e a carcaça. Use um cotonete para alcançar áreas estreitas ou inacessíveis.
4. Com um pano macio e não abrasivo, seque imediatamente a janela do scanner depois de limpá-la para evitar manchas.
5. Deixe a unidade secar naturalmente antes de usar.

#### 14.4.3 Mensalmente

Mantenha uma rotina regular de limpeza abrangente para retirar o acúmulo natural de sujeira que ocorre com o uso diário nos conectores, na janela do scanner e na superfície principal do leitor de código de barras.

1. Gabinete: Siga as instruções em 14.4.2 - Diariamente.
2. Janela do scanner: Limpe a janela do scanner com um pano próprio para lente ou outro material adequado para limpeza de materiais ópticos, como óculos.
3. Conector do scanner:
  - a. Umedeça um cotonete com álcool isopropílico.
  - b. Esfregue o cotonete no conector do scanner. Não deixe nenhum resíduo de algodão no conector.
  - c. Repita pelo menos três vezes.
  - d. Use o cotonete para remover toda graxa e sujeira perto da área do conector.
  - e. Usando um cotonete seco, repita as etapas b, c e d. Não aplique álcool conforme instruído em nenhuma dessas etapas.

#### 14.5 Treinamento necessário

O leitor de código de barras destina-se a usuários e outros médicos certificados na realização de exames de TC ou RM (por exemplo, técnicos) e treinados no uso de todos os equipamentos envolvidos na realização desses exames.

O recurso Configuração do código de barras no site do Gerenciador Certegra pode ser usado por usuários clínicos ou não clínicos (por exemplo, administradores ou técnicos de TI/biomédicos) responsáveis pelas tarefas de configuração em apoio à operação do sistema.

#### 14.6 Contraindicações



Desconhecidas.

## 14.7 Especificações ambientais

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura operacional:        | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)    |
| Temperatura para armazenamento: | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) |
| Umidade relativa:               | 5% a 95%, sem condensação        |

## 14.8 Opcionais

| Número de catálogo | Descrição   |
|--------------------|---|
| BCRSCWS            | Códigos de barras acessórios do MEDRAD® Stellant com a Estação de Trabalho Certegra®      |
| BCRMRXP            | Código de barras acessório do MEDRAD® MRXperion   |
| BCRFLEX            | Códigos de barras acessórios do MEDRAD® Stellant FLEX com a Estação de Trabalho Certegra® |







(240) 64448771



(10) A

Based on 64448305 Rev. A

2021-06-04

A Bayer se reserva o direito de modificar as especificações e os recursos aqui descritos, ou descontinuar a fabricação do produto ou serviço identificado neste documento a qualquer momento, sem prévio aviso ou obrigação. Entre em contato com seu representante autorizado da Bayer para obter informações mais atualizadas.

Os dados do paciente que aparecem neste documento são informações de saúde protegidas (PHI) fictícias e/ou PHI reais das quais todas as informações de identificação pessoal (PII) foram removidas ou tornadas anônimas de outra forma. Nenhuma informação de identificação pessoal é apresentada.

Bayer, a cruz da Bayer, Certegra, MEDRAD, MRXperion, MEDRAD MRXperion, Stellant, MEDRAD Stellant, Stellant FLEX, MEDRAD Stellant FLEX, P3T, VirtualCare, Ultravist e Magnevist são marcas comerciais de propriedade e/ou registradas para a Bayer nos Estados Unidos e/ou outros países. Outros nomes de marcas comerciais e de empresas mencionados aqui são propriedades de seus respectivos proprietários e são usados aqui unicamente com finalidade informativa. Não se deve inferir nem implicar nenhum relacionamento ou aprovação.

© 2017-2021 Bayer. Este material não pode ser reproduzido, exibido, modificado ou distribuído, sem o consentimento anterior expresso da Bayer.

Extraído de *DS4308/DS4308P Digital Scanner Product Reference Guide*, Zebra Technologies Corporation, pp. 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-4, 2-6, 2-7, 2-8, 2-11, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-8, 3-9, 4-5, 6-6, 10-2. Copyright 2016 da Symbol Technologies LLC. Reimpresso com permissão.

Importado por: Bayer S.A.

Rua Domingos Jorge, 1100

CEP: 04779-900 - Socorro -

São Paulo - SP

CNPJ: 18.459.628/0001-15

Para Sistema de Injeção para TC Stellant:

Registro ANVISA nº: 80384380052

Para MRXperion Sistema de Injeção:

Registro ANVISA nº: 80384380068

Resp. Téc.: Erika F. Maellaro R.

CRF-SP: 47.983

SAC 0800 702 12 41

sac@bayer.com



Bayer 拜耳 バイエル باير Байер

Para dar feedback ou solicitar assistência, use o formulário de contrato fornecido em [radiology.bayer.com/contact](http://radiology.bayer.com/contact)



Fabricante  
Bayer Medical Care Inc.  
1 Bayer Drive  
Indianola, PA 15051-0780  
EUA  
Telefone: +1-412-767-2400  
+1-800-633-7231  
Fax: +1-412-767-4120



Representante europeu autorizado  
Bayer Medical Care B.V.  
Avenue Céramique 27  
6221 KV Maastricht  
Holanda  
Telefone: +31 43 3585600  
Fax: +31 43 3656598



625 Alpha Drive  
Pittsburgh, PA 15238  
EUA

